

Scarban®



VELVET TOUCH

SILIKONIGEELI (15 ml)

- Käytetään pienten arpien hoidossa
- Ehkäisee, pehmentää ja vaalentaa tuoreita arpia
- Soveltuu erityisesti kasvo- ja silmäluomileikkausten jälkihoitoon
- Silkkimäisen pehmeä, ilman tahmeutta ja rasvaisuutta
- Lyhyt kuivumisaika - alle 10 sekuntia
- Näkymätön, pysyy iholla pitkään
- Vähentää arven punoitusta nopeasti
- Geelin päällä voi käyttää meikkejä



SCARBAN® ARVENHOITON

Scarban®

VELVET TOUCH

SILIKONIGEELIN KÄYTTÖOHJE:

- Hiero kevyesti hyvin pieni määrä geeliä hoidettavalle alueelle
- Lisää 2-4 kertaa päivässä, useammin kohtiin jotka altistuvat hankaukselle
- Voit käyttää geelin päällä meikkejä heti levityksen jälkeen
- Geeli poistetaan pesemällä miedolla saippualla
- Totuttele geelin käyttöön vähitellen; käytä geeliä 4 tunnin ajan, ellei ongelmia ilmene, lisää käyttöä tunti päivässä 20 tuntiin saakka
- Soveltuu myös herkälle iholle. Voidaan käyttää myös lapsilla
- Käytä vain ehjälle iholle
- Älä käytä yhdessä ihonhoitovoiteiden kanssa
- Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin ja limakalvoille
- Mikäli geeli aiheuttaa jatkuvaa ihoärsytystä, ota yhteys lääkäriisi

SISÄLTÖ:

Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Dimethicone
Crosspolymer, Cyclohexasiloxane

Scarban® maahantuoja:
LYMED OY
Pyhäjärvenkatu 5 A 33200 Tampere
p. 020 779 2233 - f. 020 779 2230
info@lymed.fi - www.lymed.fi

Scarban® valmistaja:
TRICOLAST NV
Ommegangstraat 53, B-9800 Deinze
www.scarban.eu

