

LYMED[®]

LYMED-KUVASTO

LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

1/2026



**SKIN
COMPRESSION
SENSE
INTERIM & LIGHT
POST-OPERATION**

ISO 13485

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



VALPAS
CERTIFICATIONS



Kaikki ajantasainen tieto:

LYMED.FI

AMMATTILAISILLE:

Kuvasto

Tilauslomakkeet

Mittausohjevideot

KÄYTTÄJILLE:

Pukemisohteet ja -videot

Hoito- ja käyttöohjeet

Verkkokauppa

Asiakaskokemuksia

LYMED-KUVASTO

SISÄLLYS

TUOTETIETO

Yritys	4
Mikä on painevaate ja mihin sitä voi hyödyntää?	5
Lymed-lääkinnälliset laitteet	6
Lymed-tuoteryhmät ja niiden käyttökontekstit	7
Ohjeita sopivan tuotteen valintaan	12
Tuotteiden tilaaminen	14
Paine ja kompressio	16
Lymed-materiaalit	18
Kankaan ja paineen valitseminen mittatilaustuotteisiin	20
Kankaan ja paineen valitseminen Sense-tuotteisiin	21
Väri- ja kuvamerkkivaihtoehdot	22
Silikoni- ja elastaaninauhavaihtoehdot	23
Lisävalinnat ja yksilöidyt ratkaisut	24
Tilaaminen ja tuotekoodit	27
Mittatilaustuotteiden lisävalinnat	28
Vakiokokoisten tuotteiden lisävalinnat	34
Sense-toiminnalliset vahvikkeet	38

SKIN™ Painevaatteet arpihoitoon

Paidat, vatsatuki	41
Rintalastaremmit	42
Bodyt	44
Housut	45
Jalkaputket ja sukat	46
Hihat ja käsineet	48
Räpyläremmi ja sormituppi	52
Päähineet ja kaulurit	54

COMPRESSION™ Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Paidat ja bodyt	58
Rintaliivit ja rintaliivitopit	60
Kompressorintaliivit	62
Housut	64
Suspensori ja penisputki	72
Raskaushousut	73
Jalkaputket ja sukat	74
Hihat ja käsineet	76
Päähineet	80

SENSE™ Neurologiset painevaatteet

Pareesipaita- ja body	83
Paidat	84
Haalarit	85
Bodyt	86
Housut	88
Jalkaputket ja sukat	89
Hihat ja käsineet	90

INTERIM & LIGHT™ Kevyt- ja ensipainevaatteet

Paidat	97
Housut	100
Käsineet ja hihat	102
Sukat	105
Päähineet	106

POST-OPERATION™ Post-operatiiviset tukivaatteet

Tukihousut	108
Tukipaita ja -hihat	113
Sidos- ja rintaliivit, tukiremmi	116
Tukivyöt	123
Kasvotuet, post-operatiivinen päähine	125



reddot award 2014
winner



Joint Award to Industry for
Innovation in the Treatment of Lymphoedema



ENTREPRENEURIAL
TECHNOLOGY AWARD
2013



SPORTS
PRODUCT OF
THE YEAR
2011



QUALITY
INNOVATION
THE YEAR
2013



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016



A'DESIGN AWARD
WINNER 2016
SILVER

FINNISH
TEXTILE &
FASHION
HONORABLE
MENTION 2018

Lymed Oy on suomalainen Tampereella vuonna 1993 perustettu perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy lääkinällisiä painevaatteita sekä hyvinvointituotteita.

Alusta alkaen Lymed on profiloitunut kansainvälisesti korkealaatuisten painevaatteiden kehittäjänä ja edelläkävijänä. Lymedin tuotevalikoima on maailman laajin ja tuotteitamme valmistetaan moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Lymed toimii apuvälinevalmistajana, jonka ydinosaaminen on painevaatteiden valmistamisen syvälinen asiantuntemus sekä ääriäätälöityjen ratkaisujen löytäminen asiakkaillemme.

Lymedin moniammatillinen tiimi yhdistää teknologian ja vahvan tekstiilialan osaamisen tuottaen asiakkaillemme parhaita mahdollisia painevaatteita.

Lymedin laaja-alaista osaamista kuvaa, että yritys valmistaa tuotteita myös eläimille, kuten koirille, hevosille ja kameleille.

LYMED-TUOTTEIDEN VALMISTUS

Lymed-tuotteen valmistuksen lähtökohta on paras mahdollinen istuvuus, käyttömukavuus, viimeistely ja edustava ulkonäkö.

Lymed-tuotteet täyttävät tiukimmat laatuvaatimukset mukavuudesta tinkimättä. Ainutlaatuiset mittatilaus- ja erityisratkaisut ovat meillä mahdollisia, sillä tuotteiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon yksilölliset tarpeet, kuten pukemisen haasteet, työ ja harrastukset sekä fyysiset rajoitteet.

Lymedin kaikki mittatilaus- ja vakiokokoiset tuotteet suunnitellaan Tampereella. Mittatilaustuotteemme valmistetaan alusta loppuun Suomessa, Tampereella. Vakiokokoisien Lymed-tuotteiden leikkuu- ja ompelutyötä tehdään Tampereen lisäksi myös Virossa.

JAAMME OSAAMISTAMME JA KOULUTAMME UUSIA MITTAAJIA

Lymed ja maakohtaiset jakelijamme kouluttavat jatkuvasti mittaajia, tilaajia ja kaikkia painevaatteista kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia.

Mittaajamme toimivat pääasiallisesti toiminta- ja fysioterapian sekä neurologisen toiminta- ja fysioterapian aloilla, sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon piirissä.



MIKÄ ON PAINEVAATE?

Painevaate on pehmeä ja elastinen lääkinällinen apuväline, jota käytetään tukemaan kehon toimintaa ulkopuolelta kohdistuvaa painetta hyödyntäen. Painevaatteita voidaan käyttää eri-ikäisillä käyttäjillä monenlaisissa käyttökonteksteissa osana sairauksiin, vammoihin ja toimintakyvyn haasteisiin liittyvää hoito- ja kuntoutuskokonaisuutta.

Painevaate on käytännössä hyvin tiukasti istuva tuote ja se voidaan valmistaa sen mukaan, millainen käyttötarkoitus ja tavoiteltu vaikutus painevaateella ensisijaisesti on, ja millaiselle kehonalueelle paine kohdistetaan. Yleisnimitystä painevaate voidaan käyttää sekä tasaisen paineen paine- ja tukivaatteille että kompressiovaatteille. Kompressiovaatteissa paine kevenee keskikehoa kohti.

Painevaatteita käytetään osana ammattilaisen ohjaamaa hoitokokonaisuutta, perustuen yksilölliseen arvioon ja hoitavan ammattilaisen suositukseen. Painevaatteet eivät korvaa muuta lääketieteellistä hoitoa tai terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita.

MIHIN KÄYTTÖKOHTEISIIN PAINEVAATTEITA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ?

Painevaatteet ovat osa kokonaisvaltaista hoitoa ja toipumista tukevia käytäntöjä, joissa ulkoinen paine tukee kehon toimintaa eri käyttökohteissa.

ARPIEN HALLINTA

Painevaatteita käytetään osana arpihoitoa tukemaan arven hallintaa ja arven kypsymisprosessia. Ne soveltuvat muun muassa:

- **palovamma-arpisiin**
- **hypertrofisiin arpisiin**
- **keloideihin**

Painevaatteet tukevat arven kypsymisprosessia ja auttavat hallitsemaan arpeen liittyvää paksuuntumista, jäykkyyttä ja epämukavuutta.

TURVOTUKSEN HALLINTA

Kompressiovaatteita käytetään turvotuksen hallinnan tukena tilanteissa, joissa kehon neste- ja verenkierto on kuormittunut. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöillä, joilla turvotus liittyy:

- **laskimoperäiseen vajaatoimintaan**
- **imusuoniperäiseen turvotukseen**
- **leikkausten ja muiden toimenpiteiden jälkitilaan**
- **pitkäaikaiseen paikallaanoloon tai kuormitukseen**

Kompressiovaatteet tukevat kehon omaa veren- ja nestekiertoa ulkoisen kompression avulla.

SENSOMOTORISET KÄYTTÖKOHTEET

Painevaatteita voidaan käyttää tukena sensomotorisissa käyttökohteissa, kuten:

- **liikehäiriöihin ja liikkeen säätelyn haasteisiin liittyvissä tilanteissa**
- **kiputiloihin ja kehon jännitystiloihin liittyvissä tilanteissa**
- **kehon virheasentojen ja kuormitukseen liittyvien haasteiden yhteydessä**

Painevaatteet tukevat kehotietoisuutta, proprioseptiivista palautetta ja liikkeen hallintaa sekä voivat auttaa lievittämään epämukavaa oloa ja tukemaan kehon rauhoittumista arjen ja kuntoutuksen aikana.

POST-OPERATIIVINEN JÄLKIHOITO

Painevaatteita käytetään leikkausten jälkeen osana toipumista, esimerkiksi:

- **erilaisten invasiivisten leikkausten jälkeen**

Painevaatteet tukevat turvotuksen, mustelmien ja arven hallintaa sekä tarjoavat ulkoista tukea ja lievitystä toipumisen aikana.

ENITEN YKSILÖINTI-MAHDOLLISUUKSIA


Mittatilaustuotteisiin voi toteuttaa haastavia tuoteratkaisuja sekä yksilöllisiä toiveita.



Lue lisää sivulta 24


HELPPO HUOLTAA

Tuotteet ovat konepestäviä, rumpukuivattavia ja nopeasti kuivuvia.

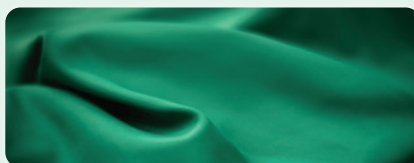

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ


Tuotteet on suunniteltu kestämaan arkea. Korjaukset ja muokkaukset mahdollisia jopa tuotteen valmistuksen jälkeen.

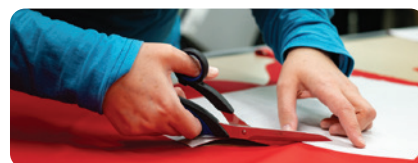

Lue lisää sivulta 15

MUOTOILULLA MUKAVUUTTA

Nivelkohtien anatomiset muotoilut toiminnallisen istuvuuden saavuttamiseksi.

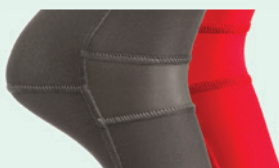

OHUET, ALLERGISOIMATTOMAT KANKAAT

Lymed-kankailla parempi käyttömukavuus samoilla painetasoilla: ohuet tuotteet sallivat liikkumisen ja eivät hankaloita arkea.

Lymed-materiaalit eivät sisällä luonnonkumia tai muita allergeeneja.

Lue lisää sivulta 18 alkaen

LITTEÄ SAUMARAKENNE

Saumamme ovat räätälöidyt mahdollisimman mukavaksi ihoa vasten.



Lue lisää sivulta 18

NÄYTTÄÄ VAATTEELTA, TUNTUU VAATTEELTA, MUTTA ON LÄÄKINNÄLLINEN LAITE

Lääkinnällinen painevaate on tarkoitettu käytettäväksi osana sairauden tai vamman hoitoa ja kuntoutusta, ja se luetaan EU:n lääkitseväksi laitteeksi koskevan MDR-asetuksen mukaisesti lääkitseväksi laitteeksi.

Lääkitsevän painevaateen käyttö poikkeaa tavallisesta vaatteesta: käyttö on suunniteltua ja ohjeistettua.

LYMED-MITTATILAUSTUOTTEET TUOTERYHMISSÄ:

- Skin™
- Compression™
- Sense™

Laiteluokka: Luokka I lääkitsevä laite (MDR)
Laitetyyppi: Yksilölliseen käyttöön valmistettu laite

LYMED-VAKIOKOKOISET TUOTTEET TUOTERYHMISSÄ:

- Skin™
- Compression™
- Sense™
- Interim & Light™
- Post-operation™

Laiteluokka: Luokka I lääkitsevä laite (MDR)

LYMED-TUOTETIETO

Lymed-tuoteryhmät ja niiden käyttökontekstit



SKIN™

PAINEVAATTEET ARPIHOITOOIN

MITTATILAUS

VAKIOKOKO



Painevaatteita käytetään osana arpihoitoa tukemaan arprien hallintaa ja kypsymisprosessia erityisesti palovammojen, laajojen ihonsiirteiden ja kirurgisten toimenpiteiden jälkihoidossa. Ne on tarkoitettu hypertrofisten arprien ja keloidien hallintaan, ja niitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi silloin, kun haavan tai ihonsiirteiden paraneminen on hidasta ja hypertrofisen arven muodostumisen riski on kohonnut.

Painevaatteet tukevat arven hallintaa ulkoisen paineen avulla. Tasainen paine voi auttaa tukemaan arven kypsymisprosessia, hallitsemaan arven paksuuntumista ja jäykkyyttä sekä lievittämään arpeen liittyvää epämukavuutta, kuten kutinaa ja punoitusta. Painevaatteista saatava hyöty on suurimmillaan silloin, kun niitä käytetään arven kypsymisvaiheessa osana suunnitelmallista arpihoitoa.

Painevaatteita voidaan käyttää osana yksilöllistä hoitokokonaisuutta tietyissä ihon tiloihin liittyvissä tilanteissa, kun hoitava ammattilainen arvioi ulkoisen paineen tukevan hoidon tavoitteita. Painevaatteita voidaan käyttää myös sidosten ja haavasuojausten paikallaan pitämiseen osana hoito- tai toipumissuunnitelmaa.

Arven hallintaan tarkoitetuissa paineissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudella. Painevaatteet suositellaan tilattavaksi mittatilauksena, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä istuvuus ja ehkäistään paranemassa olevan ihon ärsyntyminen riskiä. Painevaatehoito voidaan aloittaa matalan painetaso tuotteilla totutellen varsinaiseen paineeseen.

Ensipainevaatteita, joissa on matalampi painetaso, voidaan käyttää nopeammin jo ennen varsinaista arpihoidon aloittamista, kts. Interim & Light-tuoteryhmä.

Lymed Skin -tuotteet tehdään pääasiassa mittojen mukaan, kaikkiin kehonosiin. Tuotteet valmistetaan arven hallintaan tarkoitettulla painetasolla. Lisäksi on saatavilla kevennetty painetaso, joka soveltuu erityisesti lapsille.

TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÖKONTEKSTIT

- Hypertrofiset arvet
- Palovamma-arvet
- Keloidit
- Muut leikkausten tai vammojen jälkeiset arvet

YLEISIMMÄT KÄYTÖN TAVOITTEET

- Arven muotoutumisen tukeminen ja arven paksuuntumisen ehkäisy
- Arven kypsymisprosessin tukeminen
- Arpeen liittyvän punoituksen, kutinan ja kipuun liittyvien tuntemusten hallinta

LYMED-TUOTETIETO

Lymed-tuoteryhmät ja niiden käyttökontekstit



COMPRESSION™ LÄÄKINNÄLLISET KOMPRESSIOVAATTEET

MITTATILAUS

VAKIOKOKO



Painevaatteita turvotuksen hallintaan ja ennaltaehkäisyyn kutsutaan kompressiovaatteiksi.

Lääkinnällisiä kompressiovaatteita käytetään osana turvotuksen hallintaa ja ennaltaehkäisyä erilaisissa turvotukseen ja verenkierron kuormitukseen liittyvissä tilanteissa. Kompressiovaatteet tukevat kehon veren- ja nestekiertoa ulkoisen kompression avulla.

Kompressiovaatteita voidaan käyttää turvotuksen ennaltaehkäisyyn tilanteissa, joissa alaraajojen tai muiden kehonosien nestekierron kuormitus on lisääntynyt. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen istuma- tai seisomatyö, matkustaminen, raskaus sekä leikkausten ja toimenpiteiden jälkeinen toipumisvaihe.

Kompressiovaatteita voidaan käyttää myös laskimoperäisissä tiloissa, joissa alaraajoissa käytetään haavasidoksia, tukemaan turvotuksen hallintaa sekä sidosten ja haavasuojausten paikallaan pysymistä osana kokonaisvaltaista hoito-, tuki- tai toipumissuunnitelmaa. Lisäksi kompressiovaatteita voidaan käyttää valikoiduissa tulehduksellisissa tai sidekudokseen liittyvissä sairauksissa, kun tavoitteena on näihin liittyvän turvotuksen hallinnan tukeminen osana kokonaisvaltaista hoitoa.

Kompressiovaatteiden paine on rakennettu tuotteeseen siten, että se kevenee asteittain alhaalta ylöspäin kehon keskikohtaa kohti, paineen ollessa voimakkainta raajojen ääriosoissa. Tämä voi auttaa vähentämään kudoksiin kertyvää nestettä ja tukemaan turvotuksen hallintaa. Lymed Compression -tuotteet ovat pääasiallisesti mittatilaustuotteita, joiden tuottama paine jaetaan neljään kompressioluokkaan voimakkuuden perusteella. Lymed Compression-tuotteita voi käyttää lähtökohtaisesti sekä päivällä että yöllä.

TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÖKONTEKSTIT

- Primaarinen ja sekundaarinen lymfaödeema
- Lipoödeema
- Laskimoperäiset verenkierron kuormitustilat, kuten laskimovajaatoiminta ja suonikohjut
- Laskimoperäiset alaraajojen tilat, joissa hoito toteutetaan haavasidosten kanssa
- Leikkauksen tai vamman jälkeinen turvotus

YLEISIMMÄT KÄYTÖN TAVOITTEET

- Turvotuksen hallinnan tukeminen ja turvotuksen uusiutumisen ehkäisyn tukeminen
- Kehon veren- ja nestekierron tukeminen
- Turvotukseen ja siihen liittyvän epämuikavuuden hallinnan tukeminen
- Sidosten ja haavasuojausten paikallaan pysymisen tukeminen osana hoitokokonaisuutta

LYMED-TUOTETIETO

Lymed-tuoteryhmät ja niiden käyttök kontekstit



SENSE™

NEUROLOGISET PAINEEVAATTEET

Paineevaatteita käytetään kuntoutuksen apuvälineenä ja työkaluna neurologisessa fysio- ja toimintaterapiassa, osana ammattilaisen ohjaamaa kuntoutus- ja hoitokokonaisuutta.

Neurologisten paineevaatteiden vaikutus perustuu ulkoiseen paineeseen, joka tukee kehon hallintaa, liikkeen säätelyä ja kehotietoisuutta. Paineevaatteen tuottama paine voi tukea proprioseptista palautetta, mikä voi auttaa lihasaktiivisuuden ja liikkeen hallinnan tukemisessa kuntoutuksen aikana. Paineevaatteet voivat myös tarjota ulkoista tukea nivelille, mikä voi auttaa hallitsemaan nivelten yliikkuvuutta ja tukemaan liikkeen ennakoitavuutta ja hallittavuutta arjen tilanteissa.

Kliinisessä käytännössä paineevaatteita käytetään myös osana kivun hallintaa muiden hoitomuotojen rinnalla, erityisesti tilanteissa, joissa kipua liittyy kehonhallinnan häiriöihin, nivelten yliikkuvuuteen, sensomotorisiin poikkeamiin tai kudosten kuormitukseen.

Ammattilaisten kokemuksen mukaan paineevaatteiden tuottama tasainen ulkoinen paine ja kehotietoisuutta lisäävä vaikutus voivat tukea kipuun liittyvän

MITTILAUS

VAKIOKOKO



epämukavuuden hallintaa osana kokonaisvaltaista hoitoa. Paineevaatteita hyödynnetään käytännössä esimerkiksi CRPS- ja EDS-potilaiden kivun hallinnan tukena, osana ammattilaisen arvioimaa hoitokokonaisuutta, ilman että niiden katsotaan korvaavan muuta lääketieteellistä tai terapeutista hoitoa.

Lymed Sense-paineevaatteita voidaan räätälöidä laajasti yksilöllisten tavoitteiden mukaan tukemaan arjessa suoriutumista ja kuntoutuksen tavoitteita.

TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÖKONTEKSTIT

- Liikkeen säätelyn ja motorisen hallinnan häiriöt
- Neurokehitykselliset häiriöt ja sensomotorisia oireita sisältävät tilat
- Keskushermoston tai ääreishermoston vauriot ja toimintahäiriöt
- Sidekudokseen liittyvät tilat, joissa esiintyy nivelten yliikkuvuutta
- Tuki- ja liikuntaelimestön kuormitustilat
- Osana kivunhallintaa

YLEISIMMÄT KÄYTÖN TAVOITTEET

- Sensomotorisen toiminnan ja liikkeen säätelyn tukeminen
- Kehonhahmotuksen ja kehotietoisuuden vahvistaminen
- Proprioseptisen palautteen tukeminen
- Liikkeen laadun ja hallittavuuden tukeminen
- Nivelten ulkoisen tuen tarjoaminen yliikkuvuuden hallintaan
- Kivunhallinnan tukeminen
- Toiminnallisuuden ja arjessa suoriutumisen tukeminen



INTERIM & LIGHT™

KEVYT- JA ENSIPAINEVAAATTEET

VAKIOKOKO



Lymed Interim & Light -tuotteet ovat vakiokokoisia, kevyen ja tasaisen ulkoisen paineen tuottavia painevaatteita, joita käytetään erityisesti osana arven hallintaa. Tuotteet on suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön siirtymävaiheessa ennen mittatilaustuotteisiin siirtymistä tai osana hoidon alkuvaihetta, kun varsinaista painevaatehoitoa ei vielä voida aloittaa tai kun käyttäjää totutetaan painevaatteen käyttöön. Tuotteita voidaan käyttää myös sidosten ja haavasuojauksen paikallaan pysymisen tukena.

Lymed Interim & Light -tuotteita voidaan käyttää myös osana kivunhallintaa muiden hoitomuotojen rinnalla, erityisesti silloin kun tarvitaan kevyttä ulkoista tukea ja keho tietoisuutta lisäävää vaikutusta hoidon alkuvaiheessa ennen mittatilaustuotteen käyttöönottoa.

Lisäksi Lymed Interim & Light -tuotteita voidaan käyttää osana yksilöllistä hoitokokonaisuutta tietyissä ihon tiloihin liittyvissä tilanteissa silloin, kun hoitava ammattilainen arvioi kevyen ulkoisen paineen tukevan hoidon tavoitteita.

TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÖKONTEKSTIT

- Erialaisten arprien hallinta
- Osana kivunhallintaa lyhytaikaisesti
- Sidosten paikallaan pysymisen tukeminen

YLEISIMMÄT KÄYTÖN TAVOITTEET

- Arven hallinnan ja kypsymisprosessin tukeminen varhaisessa vaiheessa
- Käyttäjän totuttamiseen painevaatteen käyttöön
- Kevyen paineen tarjoamiseen ennen varsinaista painevaatehoitoa

LYMED-TUOTETIETO

Lymed-tuoteryhmät ja niiden käyttökontekstit



POST-OPERATION™

POST-OPERATIIVISET TUKIVAATTEET

VAKIOKOKO



Post-operatiiviset tukivaatteet ovat paine- ja tukivaatteita, joita käytetään osana erilaisten invasiivisten leikkausten ja toimenpiteiden jälkihoitoa.

Tukivaatteet tuottavat ulkoisen paineen ja/tai tarjoavat ulkoista tukea, joka tukee leikkauksen jälkeistä toipumista operoidulla kehonalueella.

Paine ja ulkoinen tuki voivat auttaa tukemaan turvotuksen, mustelmien ja arven hallintaa sekä lievittämään toipumisen aikaista epämukavuutta ja tukemaan liikkumista ja toimintaa toipumisen aikana.

Post-operatiivisia tukivaatteita voidaan käyttää myös sidosten ja haavasuojausten paikallaan pitämiseen osana kokonaisvaltaista hoito- tai toipumissuunnitelmaa.

Lymed Post-operation -tuotteet ovat vakiokokoisia tuotteita, joissa paine on tasainen.

TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÖKONTEKSTIT

- Vatsan ja alavartalon alueen toimenpiteet
- Rintojen korjaus- ja muokkaustoimenpiteet
- Kasvojen alueen ja olkavarsien toimenpiteet
- Rasvaimuoperaatiot
- Synnytyksen ja keisarinleikkauksen jälkeinen toipuminen
- Erilaisten invasiivisten leikkausten jälkihoito


YLEISIMMÄT KÄYTÖN TAVOITTEET

- Ulkoinen tuki operoidulle alueelle
- Turvotuksen ja mustelmien hallinnan tukeminen
- Leikkausarven hallinnan tukeminen
- Leikkausalueeseen liittyvän kivun ja epämukavuuden hallinnan tukeminen
- Sidosten ja haavasuojausten paikallaan pysymisen tukeminen


Arven hallinta




Neste- ja verenkierron tukeminen Laskimovajaatoiminta

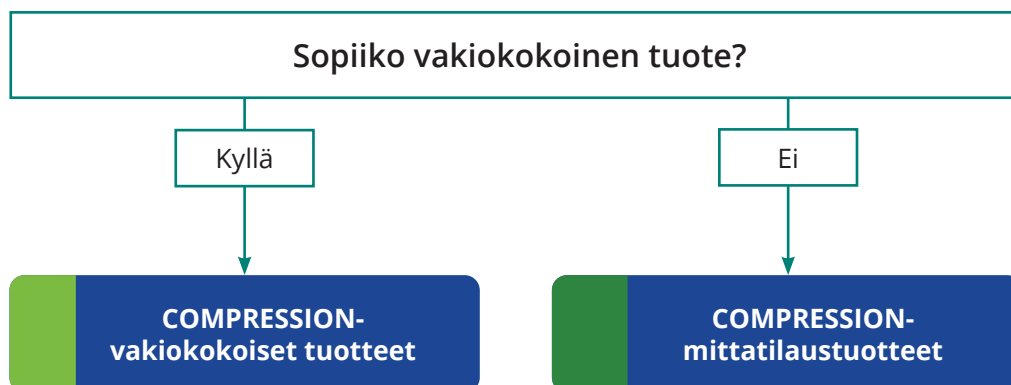

Sensomotoriset ja neurologiset käyttökohteet Kivun hallinta

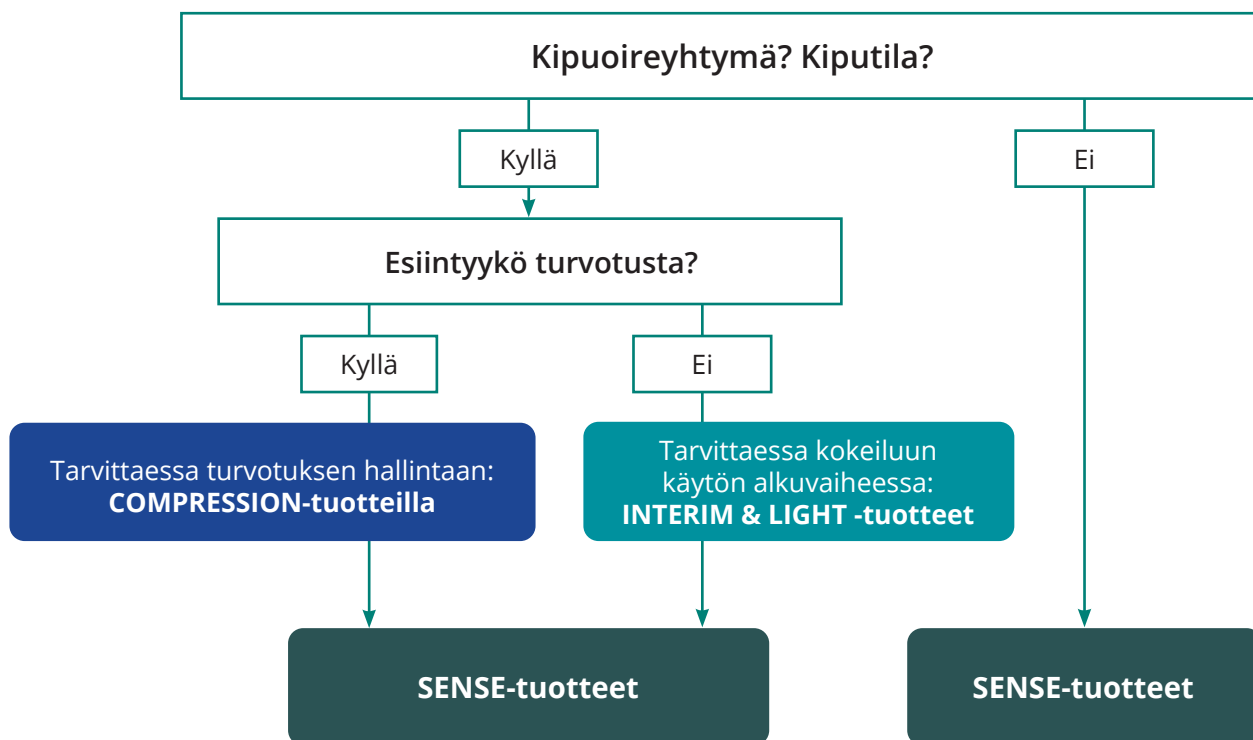

Post-operatiivinen jälkihoito

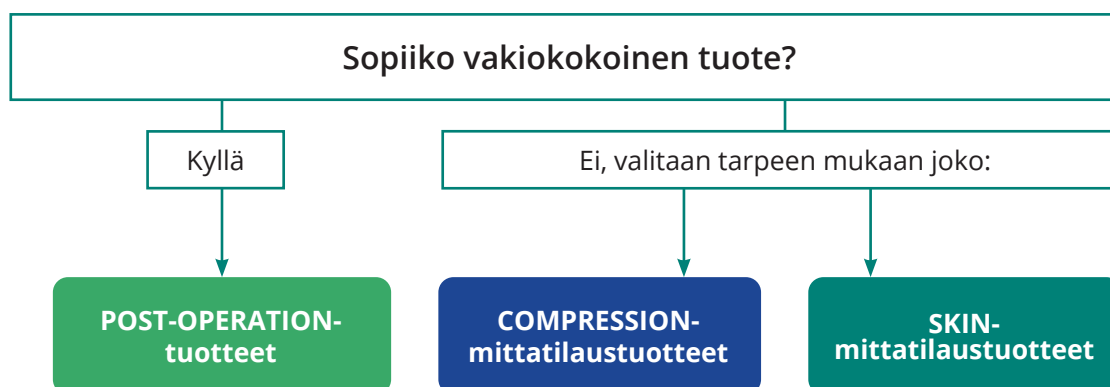

LYMED-TUOTTEIDEN TILAAMINEN

Lymed Oy:n valmistamia tuotteita voivat tilata sekä yksityinen ja julkinen terveydenhuolto että yksityisasiakkaat. Lymedin tuotteet ovat apuvälineitä ja tuotteita on mahdollista saada myös maksusitoumuksella. Lymed-tuotteiden saatavuuden voi tarkistaa alueellisista terveydenhuollon palveluista.

Lymed-mittatilaustuotteiden valmistaminen vaatii asiakkaan yksilölliset mitat. Lymed-mittaajat huolehtivat

mittatilaustuotteiden tilauksesta Lymedille. Mittaajat toimivat pääasiallisesti toiminta- ja fysioterapian sekä neurologisen toiminta- ja fysioterapian aloilla.

Vakiokokoisia tuotteita voit kysyä jakelijoiltamme tai suoraan Lymed Oy:stä. Lymed-jakelijoita löytyy ympäri Suomen.

TILAUSPROSESSI

MITTATILAUS

1. Oikean tuotteen valinta

- Hoidosta vastaava taho arvioi painevaateen käytön tarpeen ja valitsee siihen soveltuvan tuotteen kuvastossa esitettyjen tuotetietojen perusteella.

2. Mittaaminen ja tilaaminen

- Asiakkaan mittaus Lymedin ohjeiden mukaan.
- Mahdolliset lisätiedot, toiveet ja valokuvat.

3. Tilauksen lähetys jakelijallemme tai Lymediin

- Tarkastamme tilauksen ja mittatiedot.
- Olemme tarvittaessa yhteydessä tilaajaan.

4. Tilauksen toimitus

- Tilauksen toimitus sopimuksen mukaan.

VAKIOKOKO

1. Oikean tuotteen valinta

- Hoidosta vastaava taho arvioi painevaateen käytön tarpeen ja valitsee siihen soveltuvan tuotteen kuvastossa esitettyjen tuotetietojen perusteella.

2. Oikean koon valinta

- Koon määrittäminen kuvaston ohjeiden mukaan.

3. Tilauksen lähetys jakelijallemme tai Lymediin

- Tarkastamme tilauksen ja mittatiedot.
- Olemme tarvittaessa yhteydessä tilaajaan.

4. Tilauksen toimitus

- Tilauksen toimitus sopimuksen mukaan.

ARVIOITU KÄYTTÖIKÄ JA TUOTTEEN UUSIMINEN

Lymed-tuotteet ovat kestäviä ja suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Tuotteeseen kohdistuu paljon rasitusta ja ominaisuuksiensa osalta eikä käyttöikää voi verrata tavallisiin vaatteisiin tai sukkiin.

Säännöllisessä käytössä olevien Lymed-tuotteiden käyttöikä vaihtelee yleensä kolmesta kuuteen kuukauteen. Arvioitu käyttöikä perustuu kohtuudella ennakoitaviin ulkoisiin vaikutuksiin ja ympäristöolosuhteisiin. Kulutusalltiissa tuotteissa, kuten sukissa ja käsineissä, käyttöikä saattaa vaihdella käyttäjien välillä huomattavastikin.

Painevaatteita suositellaan uusittavaksi vähintään puolen vuoden välein ja aktiivisesti käytössä olevaa tuotetta joka kolmas kuukausi.

Aktiivisilla käyttäjillä, kuten lapsilla ja työelämässä olevilla aikuisilla, tarve uusimiseen voi olla tiheämpi. Tuotteen kuntoa ja istuvuutta tulee valvoa aktiivisesti painevaateen käyttöjakson aikana.

Kulumisnopeuteen vaikuttavat mm.:

- Käyttötarkoitus ja -tiheys
- Paineen tai kompression voimakkuus
- Yksilölliset ratkaisut
- Käyttäjän anatomia ja ihon ominaisuudet
- Ulkoisten tekijöiden hankausvaikutus
- Muiden apuvälineiden yhteiskäyttö
- Tuotteen käyttö- ja pesurutiini

PAINEVAATE ON UUSITTAVA, KUN

- Käyttäjän mitat tai paino muuttuvat
- Tuote ei enää puhdistu kunnolla ja materiaalin tuntu muuttuu rasvaiseksi
- Tuotteen elastisuus heikkenee ja alkuperäinen painetaso muuttuu
- Tuote tai sen osa rikkoontuu

KAKSI KESTÄÄ PIDEMPÄÄN KUIN YKSI

- Jos käytät painevaatetta jatkuvasti, on suositeltavaa, että käytössäsi on useampi samanlainen tuote.
- Useamman tuotteen vuorottelu helpottaa pesua ja tuotteen kangas pääsee välillä lepäämään.
- Vuorottelu lisää kummankin tuotteen käyttöikä.

KORJAUKSET JA MUOKKAUKSET

Lääkinnällisinä laitteina lääkinällistä painevaatteita ei tule korjata itse, vaikka olisi ompelutaitoinen.

Lymed tarjoaa tuotteilleen korjaus- ja muokkauspalvelua. Ota aina ensin yhteyttä sinua palvelleeseen jakelijaan, tuotteen myöntäjään tai Lymedin asiakaspalveluun, jos olet hankkinut tuotteen suoraan meiltä.

Korjaukset ja muokkaukset tehdään Lymedin ehtojen mukaisesti ja jokainen korjaus ja muokkaus arvioidaan tilannekohtaisesti.

Lymed suosittelee harkitsemaan uuden tuotteen tilaamista korjauksen teettämisen sijaan, jos tuote on kovin kulunut.

Lisätietoja muokkauksista ja korjauksista löydät www.lymed.fi

Lymedin sopimus- ja toimitusehdot kokonaisuudessaan osoitteessa: www.lymed.fi

Sopimus- ja toimitusehdot voivat vaihdella Lymed-tuotteen myöntäjän tai asuinmaan mukaan.

PAINEEN MUODOSTAMINEN TUOTTEEN AVULLA

Kompressio- ja painevaatteiden vaikutukset perustuvat tuotteeseen toteutettuun paineeseen.

Kangas ei itsessään muodosta painetasoa, vaan paine muodostuu hoidettavan alueen ympärysmittojen ja tuotteen ympärysmittojen negatiivisesta suhteesta kankaan venyvyys- ja palautumisominaisuuksiin perustuen.



Tuotteen antama paine jaotellaan yleisesti kahteen eri tyyppiin hoitotavoitteiden mukaan. Kompressiotuotteissa paine on progressiivisesti aleneva eli voimakkain kehon distaaliosissa keventyen kehon keskiosaa kohden. Tasaisen paineen painevaatteissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudella.

MITTATILAUS- VS. VAKIOKOKOINEN TUOTE

Painevaatetta hankittaessa tulee arvioida, voidaanko käyttää vakiokokoisista tuotetta vai tarvitaanko mittatilaustuote.

Lähtökohtaisesti Lymed suosittelee aina mittatilaustuotteen käyttöä. Mittatilaustuotteilla saavutetaan yleisesti parempi istuvuus, kuin vakiokokoisilla tuotteilla. Rungas turvotus, anatomiset erityispiirteet sekä yksilölliset erikoistarpeet ohjaavat yleisesti mittatilaustuotteen valintaan.

Vakiokokoisien tuotteiden istuvuus tulee todentaa huolellisesti: mitä paremmin käyttäjän mitat vastaavat mittataulukkoa, sitä todennäköisemmin istuvuus on oikea ja paine toteutuu oikein.

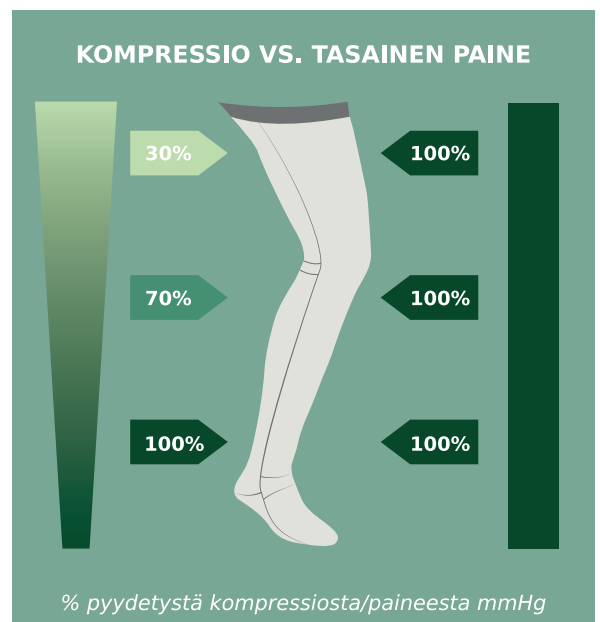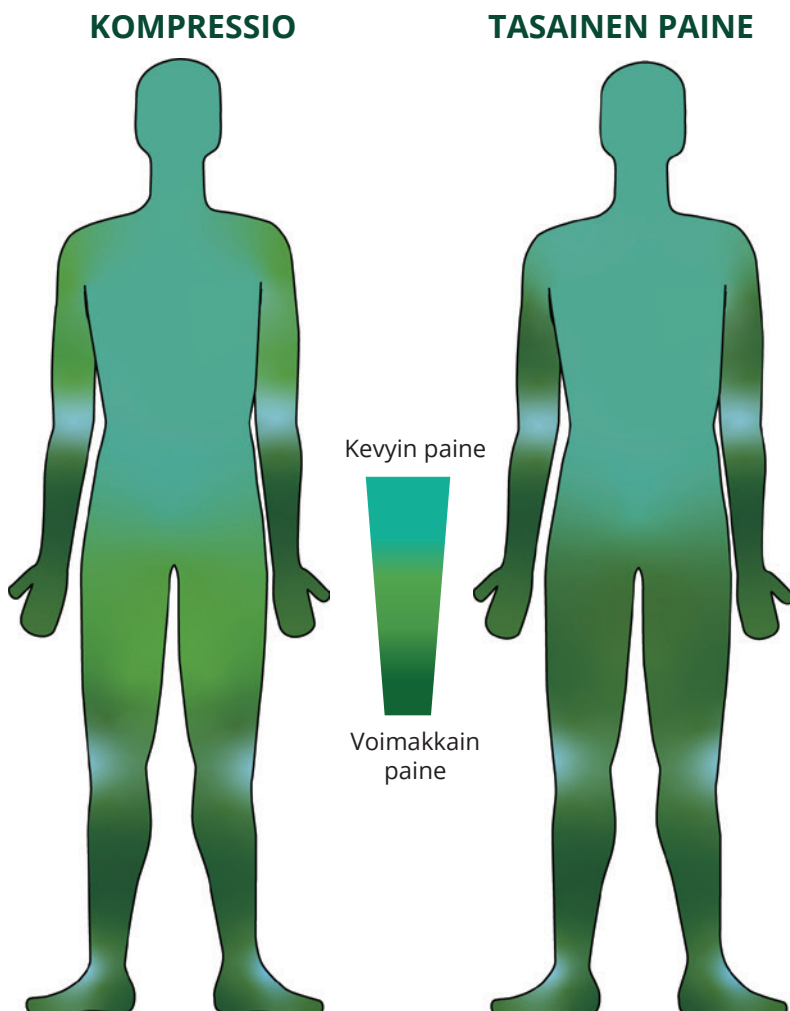

LYMED-TUOTTEIDEN KOMPRESSIOLUOKAT JA PAINETASOT

Tuotteiden painetaso tai kompressioluokka valitaan hoidon tarpeen ja tavoitteen sekä tuotteen käyttöalueen mukaan. Lymed-tuotteita on saatavilla sekä tasaisella paineella että kompressiolla riippuen tuoteryhmästä ja sille määritellystä käyttötarkoituksesta.

Painevaatteiden tuottaman paineen yksikkönä käytetään elohopeamillimetriä (mmHg).

Tuotteen paineluokalla ilmoitetaan alin ja ylin paine, joiden välille paine käytännössä keskimääräisesti asettuu. Hoidettavan alueen paineen toteutumiseen vaikuttaa kudoksen rakenne sekä käyttäjän aktiivisuus. Kiinteämpi kudosis tai aktivoituva lihas antaa vastapainetta tuotteelle, jolloin kudokseen kohdistuva paine voi käytännössä olla suurempi.

Tuotteen ollessa puettuna voidaan toteutuvaa painetta mitata painevaatekäyttöön tarkoitetuilla painemittareilla. Painemittareita voidaan käyttää myös painevaateen käytönaikaiseen seurantaan ja arvioitaessa tuotteen uusimistarvetta.

KOMPRESSIOLUOKAT

Lymed-tuotteiden kompressioluokittelu 1 - 4 perustuu eurooppalaiseen esistandardiin ENV 12718:2001.

PAINETASOT

Lymedin tarjoamat tuoteryhmäkohtaiset painetasot ja niiden pohjalta esitetyt yleiset mahdolliset suositukset perustuvat kirjallisuudessa määritettyihin viitearvoihin, käyttötarkoitukseen liittyviin suosituksiin sekä asiakaskäytöstä ja -tarpeista kertyneeseen kokemukseen.

KOMPRESSIOLUOKAT CCL Progressiivinen paine

Compression -tuotteet

Ccl 1 15 - 21 mmHg

Ccl 2 23 - 32 mmHg

Ccl 3 34 - 46 mmHg

Ccl 4 49 mmHg ja korkeampi

PAINETASOT Tasainen paine

Skin -tuotteet

Kevennetty paine 16 - 22 mmHg

Normaali paine 23 - 30 mmHg

Sense -tuotteet

Mieto paine 9 - 13 mmHg

Keskitaso paine 14 - 20 mmHg

Voimakas paine 21 - 30 mmHg

Interim & Light -tuotteet 10 - 18 mmHg

Post-operation -tuotteet 23 - 30 mmHg



Kompressioluokkien käyttösuosituksia löydät
käypähoitosuosituksista ja kansallisista oppaista.

LYMED-MATERIAALIT


Kokemukseen painevaatteen miellyttävyydestä vaikuttaa moni tekijä. Keskeisimpiä ovat käyttäjälle valittu paineen taso sekä kankaan tuntuma ihoa vasten.

Lymed-kankaat on suunniteltu kestämään pitkään painevaatekäytössä ollen samalla mukavia, hengittäviä ja helppoja hoitaa. Kankaat ovat suunniteltu liukkaaksi, mikä helpottaa pukemista.

Käytössämme on kolme eri kangasta eri jäämäkkyyksissä, joista voidaan toteuttaa erilaisia painetasoja hoitotavoitteita tukien.

Lymed-tuotteet on tehty tasoneulotusta loimineuloksesta (flat knitted warp knit), polyamidi-elastaani-sekoituksesta. Loimineuloksen ominaisuuksia ovat mm. erinomainen paineenkestävyys, kankaan purkautumattomuus ja mahdollisuus valmistaa haastavan muotoisia tuotteita.

Kuvaamalla hoidon tavoitteet, tarvittavan painetason sekä painetason ja käyttäjän arkikäyttöä parhaiten tukevan kangasvalinnan, saamme tehtyä yksilöllisen apuvälineen, jota on myös miellyttävä käyttää.

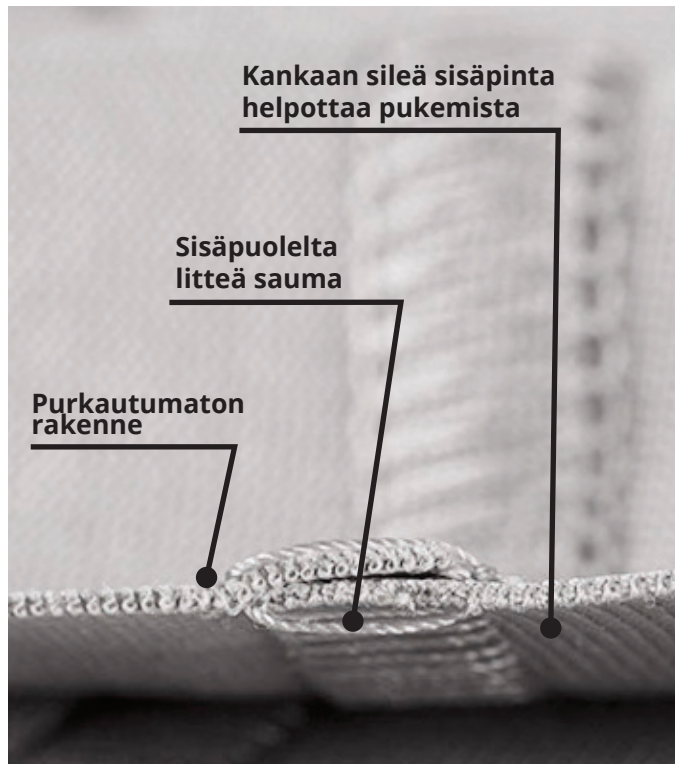

Tekstiilimateriaalimme ovat Öko-Tex 100 sertifioituja

Materiaalimme ovat Öko-Tex-sertifioituja, eivätkä ne sisällä kumia tai muita tunnettuja allergeeneja. Materiaalit valmistetaan vastuullisesti Euroopassa.



Kankaat testataan kestävyydeltään, värinkestoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan. Kankaat läpäisevät tiukimmatkin testit – niiden hankauksenkesto on jopa yli 150 000 Martindalea! (SFS-EN ISO 12947-2)

Tämän lisäksi Lymed on kehittänyt jatkuvaan laaduntarkkailuun standardien ulkopuolisia, käytäntöä simuloivia testausmenetelmiä yhdessä suomalaisten tutkimusinstanssien kanssa.

Kankaissa on myös aurinkosuoja UPF 98 %.



KOLME LAADUKASTA JA OHUTTA KANGASTA

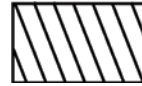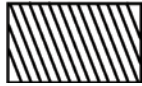

	VAHVA KANGAS	KESKIVAHVA KANGAS	KEVYT KANGAS
Kankaan kuvaus mittatilaustuotteen tilaamiseen	Käytetyin kankaamme ja yleisin asiakkaidemme valinta <ul style="list-style-type: none"> • Jämäkin tuntuma • Hyvä ensisijainen valinta, ellei tarvetta kevyempään • Ainoa vaihtoehto ccl 4 tuotteisiin 	Vaihtoehto kevyempää tuntumaa kaipaaville, lapsille, vanhuksille tai herkkäihoisille <ul style="list-style-type: none"> • Tuntuma vahvaa kangasta kevyempi ja sileämpi • Voi olla helpompi pukea 	Vain miedon paineen Sense-tuotteisiin erikoisherkillä käyttäjille <ul style="list-style-type: none"> • Erittäin kevyt tuntuma • Erityisesti vauvoille
Koostumus	61 % polyamidi 39 % elastaani	54 % polyamidi 46 % elastaani	83 % polyamidi 17 % elastaani
Rakenne	Tasoneulottu loimineulos	Tasoneulottu loimineulos	Tasoneulottu loimineulos
Hankauksen kesto (Martindale)	>150 000	>150 000	90 000
Hengittävyys	447 l/m ² /s	466 l/m ² /s	246 l/m ² /s
Paksuus	0,64 mm	0,57 mm	0,48 mm
Aurinkosuoja	98 % UV-suoja	98 % UV-suoja	98 % UV-suoja



LYMED-TUOTETIETO

Kankaan ja paineen valitseminen mittatilaustuotteisiin

Tuotteiden painetaso tai kompressioluokka valitaan käyttötarkoituksen ja hoidon tavoitteiden sekä tuotteen käyttöalueen mukaan.

Materiaalivalinnalla voi olla vaikutus tuotteen tuntuun ja sitä kautta käytön koettuun vaikutukseen.





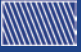

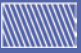
Käyttäjän reaktio tuotteeseen voi myös vaihdella käytön aikana, jolloin tuotevalinnat voivat edellyttää tarkistamista.

MITTATILAUSTUOTTEIDEN PAINE- JA KANGASVALINNAT

Tuoteryhmäkohtaiset, yhteensopivat paine- ja kangasvaihtoehdot varmistavat tuotteen suorituskyvyn.

Poikkeavat ratkaisut kankaiden valinnassa voivat jossain tapauksissa olla mahdollisia. Arvioimme pyynnöt tapauskohtaisesti valmistuksen näkökulmasta.

Vakiokokoisten tuotteiden kangasvaihtoehtoja ei voi muuttaa.

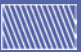COMPRESSION	
CCL 1	
	Vahva kangas
	Keskivahva kangas
CCL 2	
	Vahva kangas
	Keskivahva kangas
CCL 3	
	Vahva kangas
	Keskivahva kangas
CCL 4	
	Vahva kangas

Jos olet epävarma kangas- ja painevalinnoista, aloita aina yleisillä suosituksilla.

Mikäli käyttäjä kaipaa tukevampaa tunnetta, mutta suurempi painetaso tai kompressioluokka ei ole käyttäjälle soveltuva, niin suosittelemme tilaamaan tuotteen vahvemmalla kankaalla. Tarvittaessa jämakkyyttä voidaan lisätä erilaisilla vahvikkeilla ja tuplakankailla, kts. lisävalinnat.

SKIN

NORMAALI PAINETASO



Vahva kangas



Keskivahva kangas

KEVENNETTY PAINETASO



Vahva kangas



Keskivahva kangas

SENSE

LUE LISÄÄ
SENSE-TUOTTEISTA



MIETO PAINE



Keskivahva kangas*



Kevyt kangas



Vahva kangas

KESKITASON PAINE



Keskivahva kangas**



Vahva kangas

VOIMAKAS PAINE



Vahva kangas



Keskivahva kangas

VINKKEJÄ SENSE-TUOTTEIDEN PAIN- JA KANGASVALINTOIHIN

Alla esitetyt suositukset perustuvat Lymedin keräämään käyttökokemukseen ja asiakaspalautteeseen sekä ammattilaisten kliiniseen kokemukseen.

- *Aikuisten ja lasten yleisin Sense-tuote toiminnallisuuden tukemiseen on miedon paineen tuote keskivahvalla kankaalla. Toiminnallisuuden tukemiseen tarkoitettua painevaateetta on harvemmin tarvetta tilata voimakkaalla paineella ja vahvalla kankaalla.
- **Aikuisen kipuasiakkaan ensimmäinen Sense-tuote on tyypillisimmin keskitason paineen ja keskivahvan kankaan tuote.

KIPUTILAT JA KIPUOIREYHTYMÄT

- Aikuisen kipua kokevan käyttäjän ensimmäinen Sense-tuote on tyypillisimmin keskitason paineen ja keskivahvan kankaan tuote.
- Usein kipua kokevalla käyttäjällä on käytössä useampi eri painetaso ja/tai kangastyypin tuote, joita voidaan vaihdella jopa päiväkohtaisesti kaivatun paineen ja tuntuman mukaisesti.
- Osa kipua kokevista käyttäjistä saattaa useammin valita myös voimakkaan paineen tuotteen vahvalla kankaalla, muista Sense-tuotteiden käyttäjistä poiketen.

KÄYTTÄJÄLLÄ KIPUA JA TURVOTUSTA

- Mikäli käyttäjällä esiintyy turvotusta, voidaan turvotuksen hallintaa tarvittaessa tukea ensin lääkinällisellä kompressiotuotteella (Compression-tuoteryhmä) ennen siirtymistä Sense-tuotteisiin.

EHLER-DANLOS OIREYHTYMÄ (EDS)


- EDS-käyttäjien painevaatevalinnat vaihtelevat huomattavasti. Osa käyttäjistä kaipaa hyvin kevyttä painetta, kun taas osa haluaa kovimman mahdollisen painetaso.
- EDS-käyttäjryhmälle tyypillinen haaste pitkäaikaisessa painevaatteiden käytössä on kehon ympärysmittojen vaihtelu, mikä vaikuttaa tuotteen istuvuuteen ja käyttötuntumaan.
- Mikäli on haastavaa arvioida, kaivataanko kevyttä vai jämääkää tuntumaa, tuote miedolla paineella ja keskivahvalla kankaalla voi olla hyvä lähtökohta.

PAREESITUOTTEET

- Tälle käyttäjäryhmälle tyypillisin painetaso on mieto, joko vahvasta tai keskivahvasta materiaalista valmistettu tuote.

LASTEN SENSE-TUOTTEET

- Alle 10-vuotiaille lapsille ensimmäiseksi Sense-tuotteeksi tilataan usein miedon paineen ja keskivahvan kankaan tuote.
- Vauvoille on perusteltua harkita miedon paineen ja kevyen kankaan tuotetta.
- Lapsille, joilla on todettu herkkä oksennusrefleksi, on perusteltua harkita miedon paineen ja kevyen kankaan tuotetta.

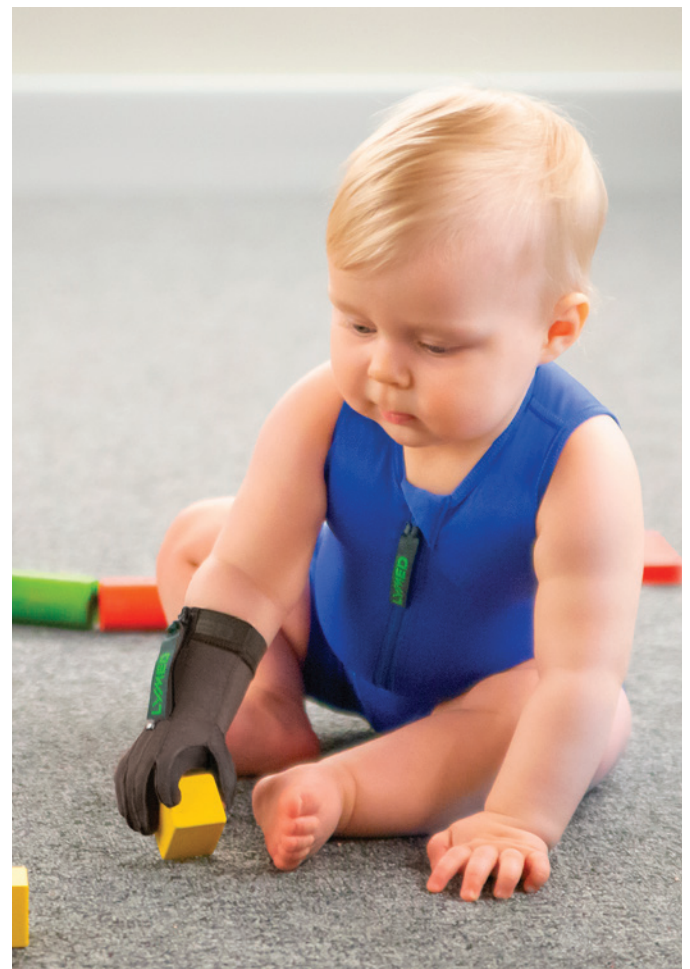

LYMED-TUOTETIETO


Väri- ja kuvamerkkivaihtoehdot

Lymed-materiaalit eivät sisällä kumia, päällystettyä kumia tai muita yleisesti allergisoivia ainesosia.

KANKAAN VÄRIT




F1 Beige

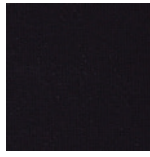

F2 Musta



F3 Valkoinen

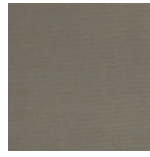

F4 Harmaa



F5 Sininen




F6 Punainen



F7 Vihreä

SAUMAN VÄRIT

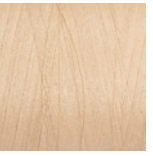


S1 Beige



S2 Musta



S3 Valkoinen

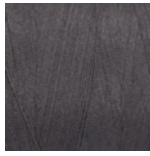


S4 Harmaa



S5 Sininen




S6 Punainen

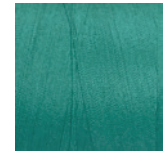

S7 Vihreä



S8 Pinkki

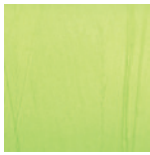

S9 Kirkas vihreä



S10 Keltainen



S11 Oranssi



S12 Kirkas sininen



S13 Violetti

KUVAMERKIT

KOKO (HALKAISIJA): 2,2 CM



P1 Kissa



P2 Koira



P3 Kettu



P4 Jänis



P5 Ankka



P6 Mansikka



P7 Lumihietale



P8 Dino



P9 Karhu



P10 Kuoriainen



P11 Leppäkerttu



P12 Kilpikonna



P13 Valas



P14 Kukka

Kaavoittajamme määrittelevät kuvamerkkien sijainnin tuotekohtaisesti.

SILIKONIN AIHEUTTAMA IHOÄRSYTYKSEN

Kirjallisuuden perusteella suurin osa reaktioista, joita silikonit aiheuttavat, ovat allergisoimattomia ja epäspesifisiä. Tällöin kyseessä on useimmiten silikonin aiheuttama herkkyysreaktio. Tällaiset silikonin aiheuttamat ihoärsytykset liittyvät pääasiassa ihon ominaisuuksiin (mm. pH, mikrobikanta, hien määrä), ihonhoitotuotteisiin ja hygieniaan – sekä näiden kaikkien yhteisvaikutukseen.



Ärsytystä voi koettaa vähentää puhdistamalla tuotteen silikoninauhaa ja alla olevaa ihoa totuttua tiheämmin. Kaikki tuotteet voidaan valmistaa joko ilman silikoninauhaa tai sen paikkaa voidaan vaihtaa. Nauhamalleja on useita ja niitä voi vaihtaa tuotteeseen myös jälkikäteen. Joissakin tapauksissa on harkittava myös tuotemallin vaihtamista sellaiseen, jossa ei ole tarvetta käyttää silikoninauhaa. Herkkäihoiselle parhaiten soveltuvat silikoninauhavaihtoehdot ovat SIL 1 ja SIL 2.

LYMED-TUOTETIETO

Silikoni- ja elastaaninauhavaihtoehdot

Lymed-kuvastossa on kunkin tuotteen kohdalla määritettynä tuotteeseen kuuluvat elastaani- ja silikoninauhat. Lymed elastaani- ja silikoninauhat eivät sisällä kumia, päällystettyä kumia tai muita yleisesti allergisoivia ainesosia.

ELASTAANINAUHAT



ELA 1

Elastaaninauha
Leveys: 3 cm

ELA 2

Elastaaninauha
Leveys: 2 cm


ELA 3

Kanttinauha / elastaaninauha
Leveys: 0,75 cm / 1,5 cm

ELA 4

Elastaaninauha
Leveys: 5 cm

SILIKONINAUHAT

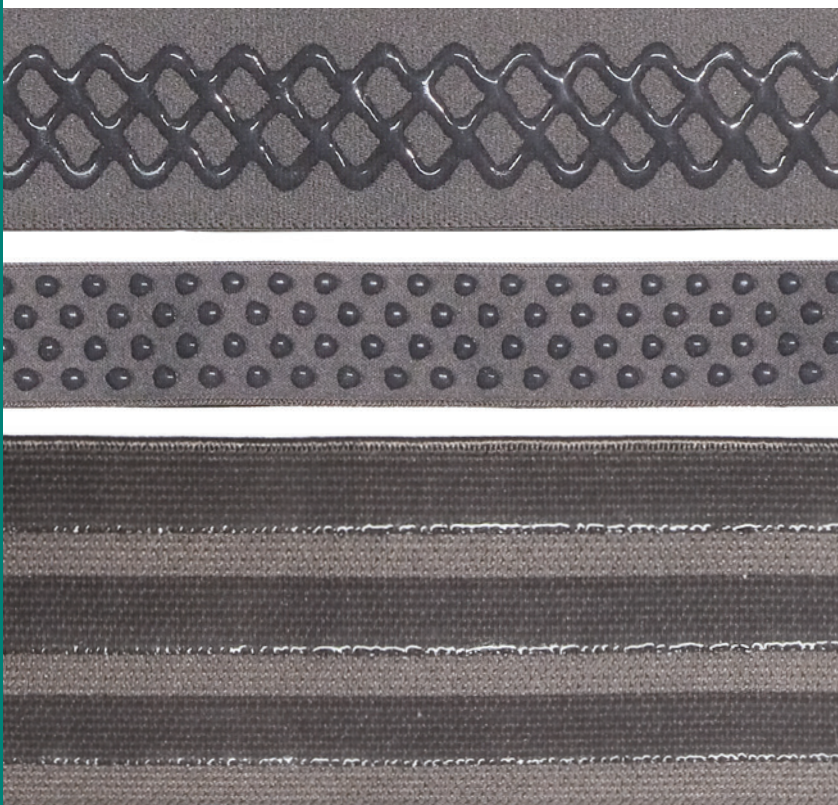

SIL 1

Kennosilikoninauha
Leveys: 3 cm

SIL 2

Pistesilikoninauha
Leveys: 2 cm

SIL 4

Raitasilikoninauha
Leveys: 5 cm

LYMED-TUOTTEIDEN YKSILÖINTI KÄYTTÄJÄN TARPEISIIN

MITEN VOIN TUKEA ITSENÄISTÄ PUKEMISTA?

MITEN VOIN AUTTAA, ETTÄ LYMED-TUOTE PYSYY PAIKALLAAN?

Lisävalintojemme valikoiman avulla Lymed-tuotteita on mahdollista yksilöidä loputtomasti vastaamaan käyttäjän tarpeita. Kuvastossamme on esiteltynä perusmalliset Lymed-tuotteet sekä yleisimmät lisävalinnat, joiden avulla saamme käyttäjälle parhaiten istuvan ja käyttötarkoitusta vastaavan painevaatteen.

Vastaamme mielellämme kaikkiin tuotteeseen liittyviin kysymyksiin sekä autamme suunnittelemaan käyttäjän ja tilaajan tarvetta vastaavan tuotteen.

Kiperissä tapauksissa tilannetta selventävät kuvat, alustavat mitat ja laajat taustatiedot.

Mikäli tarvetta lisävalintoihin ei ole tiedossa ennen ensimmäistä tilausta, Lymed suosittelee valitsemaan perusmallisen Lymed-tuotteen. Lisävalintoja tuotteisiin voidaan harkita silloin, kun tiedetään, että perusmalli ei vastaa tarpeita, perusmallin itsenäinen käyttö on hankalaa tai halutaan vähentää tarvetta avusteiseen pukemiseen.

ERIKOISOSAAMISEMME

- Pienikokoiset tuotteet vauvoille sekä poikkeuksellisen isokokoiset tuotteet.
- Kehon muodon huomiointi tuotteessa, mm. dysmelia, laajat kudospuutokset ja amputaatiotynkiä muokkaavat tuotteet.
- Paikallinen lisätuki ja -vahvistus tuplakankailla, lastataskuilla ja neopreenipehmikkeillä.
- Säädettävät remmit ja tarrakiinnitykset kehon toiminnallisen ohjauksen tarpeisiin.
- Genitaalialueen erikoisratkaisut, mm. lisäpainenläpät, taskut ja aukot.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN PERUSTEELLA YKSILÖIDYISTÄ TUOTTEISTA



Yksilöity ratkaisu amputaatioalueelle

LYMED-SUKKIEN YKSILÖINTIMAHDOLLISUUDET OVAT MARKKINOIDEN LAAJIMMAT

KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT RATKAISUT

Lymed-sukkiin on mahdollista saada erilaisia ratkaisuja helpottamaan pukemista. Suosituin näistä on vetoketju, joka voidaan toteuttaa melkein mihin kohtaan tuotetta tahansa kaikissa eri pituuksissa.

Lisävalintoja tuotteisiin voidaan harkita silloin, kun perusmallin itsenäinen käyttö on hankalaa ja halutaan vähentää tarvetta avusteiseen pukemiseen.



Nilkan muotoilu

SUKKIEN KÄRKIVAIHTOEHDOT

Sukkiin voidaan valita erilaisia kärkivaihtoehtoja tarpeen mukaan.



Kärki kiinni Kärki auki Varvassukka varpaat kiinni Varvassukka varpaat auki Tabi-sukka Isovarvassukka



Varvikas

SUKKIEN VETOKETJUVAIHTOEHDOT

Avusteisessa pukemisessa vetoketjun käyttö voi nopeuttaa tuotteen pukemista ja helpottaa avustajaa. Itsenäisessä pukemisessa vetoketju voi poistaa muiden pukemisapuvälineiden käytön tarpeen.

Vetoketjuratkaisut ovat käteviä myös haavanhoidossa. Ne nopeuttavat siteiden vaihtoa esimerkiksi säärihaavoja hoidettaessa.

Vetoketju voidaan sijoittaa mihin kohtaan tuotetta tahansa käyttäjän omien mieltymysten ja pukemismahdollisuuksien mukaan.

Vetoketjun alle on mahdollista saada vetoketjun kiinnitystä helpottavia apuhakasia.



Kokopitkä, reunanauhan yli

Kokopitkä, ehjä reunanauha

Osapitkä

LYMED-TUOTETIETO

Lisävalinnat ja yksilöidyt ratkaisut



Vetoketjun vetimeen kiinnitettävä vetolenkki helpottamaan vetoketjun sulkemista.



Pukemista avustava vetolenkki, joka kiinnitetään tuotteeseen.



Kiinnitys hakasilla.



Vetoketjun sisäpehmuste suojaamaan ja ehkäisemään ihokarvojen jäämistä vetoketjun väliin.

LISÄVALINTOJEN TILAAMINEN

Lisävalinnat tilataan aina tuotteen yhteydessä kirjoittamalla tuotekoodin perään halutun lisävalinnan tuotekoodi tai -koodit. Annamme mielellämme arvion kustannuksista, mikäli tuotteeseen halutaan monimutkaisia perusmallista poikkeavia ominaisuuksia.

ESIMERKKI VAKIOKOKOISEN TUOTTEEN TILAAMISESTA LISÄVALINNALLA:

Pitkähihaisen Interim & Light paidan tilaaminen vetoketjulla ja apuhakasella



Näin ilmoitat tilauksessa:

STIN224336F1Z AHZS

STIN224336F1Z

TUOTEKOODI

- Interim & Light paita
- Miehet
- Pitkät hihat
- Koko 6
- Beige
- Vetoketju

AHZS

LISÄVALINTA

- Apuhakanen vetoketjuun

ESIMERKKI MITTATILAUSTUOTTEEN TILAAMISESTA LISÄVALINNALLA:

Kompressiopolvisukan tilaaminen vetoketjulla ja sisäpehmusteella



Näin ilmoitat tilauksessa:

CO20629F2 AZ AZF

CO20629F2

TUOTEKOODI

- Kompressiopolvisukka
- Kärki kiinni
- Musta

AZ, AZF

LISÄVALINNAT







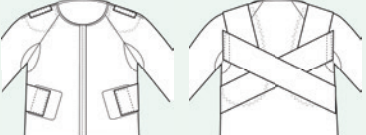
- Vetoketju
- Sisäpehmuste vetoketjun alle

*Määrittele
vetoketjun paikka
tilauksessa*



MITTATILAUSTUOTTEIDEN LISÄVALINNAT

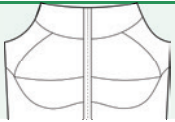- Kaikki lisävalinnat eivät ole saatavilla kaikkiin tuotevaihtoehtoihin.
- Lymed ottaa yhteyttä tilaajaan, jos lisävalintaa ei voida toteuttaa.
- Viimeistelyratkaisut ovat pääasiassa aikuisten mallien yleisimpiä ratkaisuja. Näiden ratkaisujen sopivuus arvioidaan tilauksen perusteella.
- Lisävalintoja suunniteltaessa tuotteen tilaajan ja painevaatehoidosta vastaavan ammattilaisen tulee yhdessä arvioida ratkaisujen soveltuvuus käyttäjän yksilölliseen tilanteeseen, käyttökontekstiin ja päivittäiseen toimintaan.

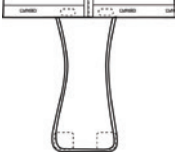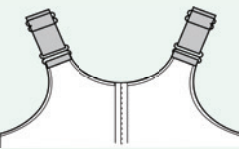Paidat ja bodyt	Koodi	
RINTAKUPIT Sisältää yhden tai kaksi mittojen mukaan muotoiltua rintakuppia.	MC	
POOLOKAULUS Korotettu kaulus kaksinkertaisesta kankaasta.	AC	
POOLOKAULUS NEOPREENILLA Korotettu kaulus kaksinkertaisesta kankaasta, jossa täyteenä neopreeni.	ACN	
AVATTAVA HAARAOSA Paitaan tai vatsatukeen kiinnitetty kankainen haaraosa, joka kulkee jalkojen välistä. Auttaa pitämään alareunaa paikallaan ja estää tuotteen ylös rullaantumista. Toisesta päästä kiinteä ja toisessa päässä neppariinnitys. Saatavana pyydettyä tarrakiinnityksellä. Erilainen kuin body-malli.	ADF	
SÄÄDETTÄVÄT OLKAIMET HIHATTOMAAN TUOTTEeseen Kiinteät ja säädettävät, 3 cm leveät olkaimet hihattomaan paitaan ja bodyyn. Saatavana pyydettyä avattavilla olkaimilla. Saatavilla vain väreissä beige, musta, valkoinen. Muunväriset tuotteet valmistetaan mustilla olkaimilla.	ABV	
LYHYET LAHKEET BODYYN Lyhyet, enintään polven yläpuolelle ylettyvät lahkeet.		
Aikuisten Skin-bodyyn Aikuisten Compression-bodyyn Aikuisten Sense-bodyyn Lasten Skin-bodyyn Lasten Compression-bodyyn Lasten Sense-bodyyn	PRA21L COA21L SEA21L PRA10L COA10L SEA10L	
SENSE: PAREESITUOTTEIDEN MOLEMMINPUOLINEN SCAPULATUKI Valittavissa pareesipaitaan tai -bodyyn, kun tuotteeseen halutaan molemminpuolinen scapulatuksi.	SEE2	


Käsineet

LISÄSORMI KÄMMENKÄSINEeseen

Yhden sormen lisäys. Useamman sormen lisäykseen käytettävä käsineen koodia. Peukalo kuuluu kämmenkäsineen perusmalliin.

Koodi

ADP

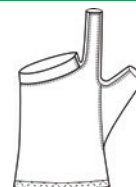

LYMED-TUOTETIETO

Mittatilaustuotteiden lisävalinnat

Kainalopituiset hihaputket

Koodi

HIHAKIINNITYS - MALLI 1


Remmikiinnitys rinnan alta pitämään hihaa ylhäällä. Sopii erityisesti isorintaisille.

Aikuisten hihaan

A20S1

Lasten hihaan

A10S1

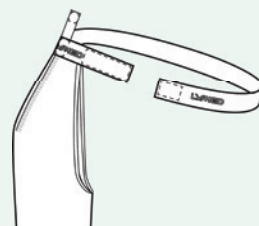

HIHAKIINNITYS - MALLI 2


Remmikiinnitys kainalon alta pitämään hihaa ylhäällä.

Aikuisten hihaan

A20S2

Lasten hihaan

A10S2

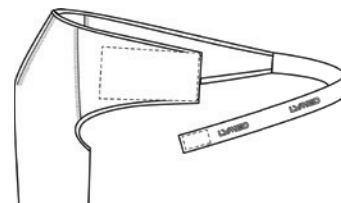

HIHAKIINNITYS - MALLI 3

Hihakiinnitysmalli vastahiha yhdistämään kaksi kainalopituista hihaa. Kiinnityksen yhteydessä tilattava kaksi hihaa.

Aikuisten hihaan

A20S3

Lasten hihaan

A10S3




Housut ja sukat

Koodi

OLKAIMET HOUSUIHIN

Kiinteät ja säädettävät, 3 cm leveät joustavat olkaimet housuihin. Saatavilla vain väreissä beige, musta, valkoinen. Muunväriset tuotteet valmistetaan mustilla olkaimilla.

AB

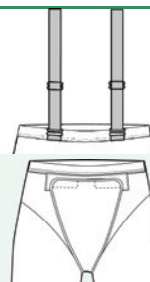

LISÄPAINELÄPPÄ GENITAALIALUEELLE

Käytetään housuissa luomaan paikallista lisäpainetta. Kiinteästi kiinni haarassa, tarrakiinnitys alavatsalla.

AF



LISÄPAINELÄPPÄ NEOPREENILLA GENITAALIALUEELLE

Käytetään housuissa luomaan paikallista lisäpainetta. Kiinteästi kiinni haarassa, neopreenitäyte, tarrakiinnitys alavatsalla.

AFN



VYÖTÄRÖN KOROTUS

Housun korotus lisäympärysmittalla.


HW



RASKAUSVATSAMUOTOILU HOUSUIHIN

Raskausmallinen vatsaosaa tavalliseen housumalliin. Kuva sivulla 73.

AM

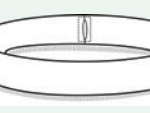

NAUHAKUJA VYÖTÄRÖLLE

Kankainen nauhakuja housun vyötärölle. Nauhakuja sisältää ELA1-nauhan.

ALP



LISÄVARVAS AVO- TAI UMPIKÄRKISEEN SUKKAOSAAN

Yhden varpaan lisäys. Useamman varpaan lisäykseen käytettävä varvassukan koodia.

ATP



VYÖTÄRÖKIINNITYS

Kiinteä, säädettävä vyötärökiinnitysnauha auttamaan reisisukan tai reisispituisen jalkaputken paikallaan pysymistä.

Aikuiset










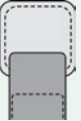
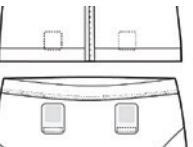
A20B

Lapset

A10B

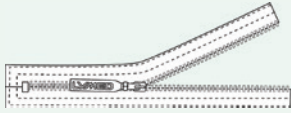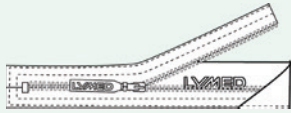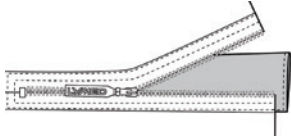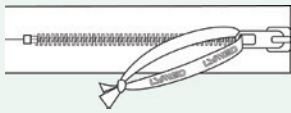

Kiinnitykset ja vedot (1/2)

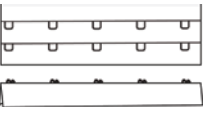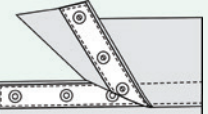	Koodi	
<p>LISÄVETOKETJU</p> <p>Pituus enintään 45 cm. Riittää hyvin esimerkiksi polvisukan täysimittaiseksi vetoketjuksi. Sisältää pehmeän vetoketjun vetimen. Vetoketju toimitetaan aina samanvärisenä kuin kangas.</p>	AZ	
<p>LISÄVETOKETJU, PITKÄ</p> <p>Pituus yli 45 cm, esimerkiksi täysipituinen vetoketju reisisukkaan. Sisältää pehmeän vetoketjun vetimen. Vetoketju toimitetaan aina samanvärisenä kuin kangas.</p>	AZ2	
<p>VETOKETJUN SISÄPEHMUSTE</p> <p>Pehmeä suoja vetoketjun alle ELA1-nauhasta. Hyvin pienikokoisiin tuotteisiin käytetään ELA2-nauhaa. Ehkäisee myös ihokarvojen jäämistä vetoketjun väliin.</p>	AZF	
<p>VETOKETJUN KANKAINEN SISÄPEHMUSTE</p> <p>ELA-nauhaa pehmeämpi kankainen suoja vetoketjun alle. Ehkäisee myös ihokarvojen jäämistä vetoketjun väliin. Oletusleveys 4 cm, tai muu leveys asiakkaan toiveet huomioiden.</p>	AZFF	
<p>VETOKETJUN VETOLENKKI</p> <p>Vetoketjun vetimeen kiinnitettävä vetolenkki helpottamaan vetoketjun sulkemista. Valittavista kaksi lenkinauhan pituutta, lyhyt 9 cm ja pitkä 15 cm. Oletuspituus lyhyt.</p>	AZL	
<p>APUHAKASET</p> <p>Yksittäiset hakaset vetoketjun alle helpottamaan vetoketjun kiinni vetämistä. Ilman erillistoivetta oletuksena 1 kpl polvisukkaan, 2 kpl reisisukkaan ja 2 - 3 kpl paitaan. Tilattavissa kankaasta poikkeavalla värillä. Hinnoitellaan 3 kpl erissä.</p>	AHZ	
<p>VETOLENKKI KIINNI TUOTTEESEEN</p> <p>Pukemista avustava vetolenkki, joka kiinnitetään tuotteeseen. Nauha ja pituus määritellään kaavoituksessa asiakkaan toiveet huomioiden.</p>	APH	
<p>LISÄHAKASKIINNITYS</p> <p>Tuotemalliin kuulumaton lisähakaskiinnitys tai lisähakasrivi mahdollisen peruskiinnityksen lisäksi.</p>	AH	
<p>LISÄNEPPARIKIINNITYS</p> <p>Tuotemalliin kuulumaton lisänepparikiinnitys tai lisänepparirivi mahdollisen peruskiinnityksen lisäksi.</p>	ASB	
<p>TARRAKIINNITYS</p> <p>Tuotemalliin kuuluvan kiinnityksen vaihto tarrakiinnitykseen tai lisätarrakiinnitys. Hinnoitellaan kappaleittain, jokaista alkanutta 25 cm pituutta kohden. Valmistaja määrittelee tarran leveyden ja ominaisuudet asiakkaan toiveet huomioiden. Tarrakiinnitys saatavilla vain väreissä beige, musta, valkoinen. Muunväriset tuotteet valmistetaan mustalla tarrakiinnityksellä.</p>	AVF	
<p>LISÄTARRA</p> <p>Pienet, yksittäiset tarrat. Käyttö esim. vetoketjun päällä helpottamaan sen sulkemista. Ei voi soveltaa tuotteen toiminnallisiin avaamis-, sulkemis- tai säätämistarkoituksiin. Hinnoitellaan 4 kpl erissä.</p>	AV	
<p>TARRAT TUOTTEIDEN YHDISTÄMISEEN</p> <p>Esim. paidan ja housujen yhdistämiseen. Hinta sisältää enintään 4 tarraa. Mukana suojatarrat.</p>	AVSE	

LYMED-TUOTETIETO

Mittatilaustuotteiden lisävalinnat

Kiinnitykset ja vedot (2/2)

SILIKONINAUHA

Lisäsilikoninauha tuotteen valumisen ehkäisemiseksi esim. hihoihin ja reisisukkiin. Voidaan käyttää reunanauhan tuplaamiseen tai tuotteen sisäpuolella kankaaseen ommeltuna. Nauhan valinta toiveen mukaan.

Koodi


ASI2



TARTUNTASILIKONI

Silikoniliuska tai -nauha tuotteen ulkopuolelle tartuntaa parantamaan, esim. sormenpäihin tai jalkapohjaan.

ASI

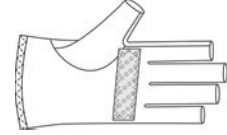

TOIMINNALLINEN NAUHALENKKI TAI -VETO

Tilaajan toiveiden mukaan toteutettava, toiminnalliseen käyttöön tarkoitettu nauhalenkki tai -veto tarrakiinnityksellä. Toteutetaan perusvalikoiman nauhoilla.

ALS1




Vuoraukset ja vahvistukset

SAUMAN VUORAUUS KANGASKAITALEELLA

Sauman vuoraus erillisellä, kapealla kangaskaitaleella. Hinnoitellaan kappaleittain jokaista erillistä ja alkanutta 30 cm pituutta kohden. Vuorauksen ompelu lisää tikkauksia suhteessa alkuperäiseen tuotemalliin. Ei toteutettavissa pienten lasten tai aikuisten sukkiin, joissa kapea päkiä.

ASRF

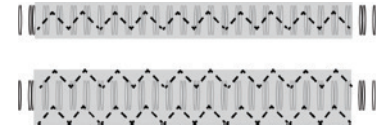

SAUMOJEN VAHVISTUSTIKKAUS

Vahvistustikkaus sauman päälle. Saumoihin, joihin kohdistuu poikkeuksellista rasitusta. Hinnoitellaan kappaleittain jokaista erillistä ja alkanutta 30 cm pituutta kohden. Koko tuotteen vahvistusta ei suositella. Vahvistus muuttaa hieman sauman ulkonäköä. Ei toteutettavissa pienten lasten tai aikuisten sukkiin, joissa kapea päkiä.

ASRZ



SUKKAOSA: SAUMOJEN VAHVISTUSTIKKAUS

Vahvistustikkaus neljään saumaan: kantapäähän, nilkkaan ja jalkateräsaumoihin. Vahvistus muuttaa hieman sauman ulkonäköä. Ei toteutettavissa pienten lasten tai aikuisten sukkiin, joissa kapea päkiä.

ASRZ1



VAPAAMUOTOINEN LISÄKANGAS/VUORAUUS

Tuotteen osittainen vuoraus toivotun mallisena. Käytetään tuomaan lisäpainetta, kestävyyttä tai paikalliseen suojaukseen. Vaatii lisätikkauksia suhteessa alkuperäiseen tuotemalliin.

Pieni osavuoraus noin 10 cm x 15 cm, joka ei ylitä tuotteen saumaa, esim. nilkka, kyynärtaive tai kantapää

AL1

Keskikokoinen osavuoraus alle 20 cm x 15 cm tai joka ulottuu kahdelle tuotteen kappaleelle.

AL2

Iso osavuoraus yli 20 cm x 15 cm tai joka ulottuu kolmelle tuotteen kappaleelle, esim. hartiavuoraus.

AL3

TUPLAKANGAS / VUORAUUS

Tuotteen koko kappale tuplamateriaalilla tuomaan lisätukea tai kestävyyttä. Koodia käytetään kun tuplaus on identtinen alkuperäisen kappaleen kanssa. Koko tuotekappaleen tuplaus ei tarvitse lisätikkauksia. Riippuen tuplakankaan koosta ja sijainnista, saattaa tuote jäməköityä huomattavasti, jolloin tuotteen pukeminen voi vaikeutua.

Pieni tuplakangas

ALD1

Keskikokoinen tuplakangas

ALD2

Iso tuplakangas

ALD3

LYMED-TUOTETIETO

Mittatilaustuotteiden lisävalinnat

Taskut

Koodi

TASKU

Tuotteen sisäänlaitettavia pehmiä, tyytettä tai mukana kulkevia pienlaitteistoja varten.

Pieni, noin 10 cm x 15 cm, joka ei ylitä tuotteen saamaa.

AP1

Keskikokoinen, noin 20 cm x 15 cm, tai joka ulottuu kahdelle tuotteen kappaleelle.

AP2

Iso, yli 20 cm x 15 cm, tai joka ulottuu kolmelle tuotteen kappaleelle.

AP3

TASKU NEOPREENILLA

Tasku sisältäen neopreenia luomaan lisäpainetta tai täyttämään koveria kohtia kehossa.

Pieni, noin 10 cm x 15 cm, joka ei ylitä tuotteen saamaa.

APN1

Keskikokoinen, noin 20 cm x 15 cm, tai joka ulottuu kahdelle tuotteen kappaleelle.

APN2

Iso, yli 20 cm x 15 cm, tai joka ulottuu kolmelle tuotteen kappaleelle.

APN3

RINTAPROTEESITASKU

Tasku rintaproteesia varten. Sivussa aukko proteesin asettamista varten.

APP



Sense-toiminnalliset vahvikkeet

Koodi

Lue lisää sivulta 38

KEVYT LANTION TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä.

ASPL



VAHVA LANTION TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä.


ASPS



SELÄN TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä.


ASVS

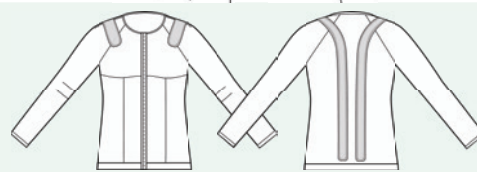

HARTIOIDEN TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä.

ASVC

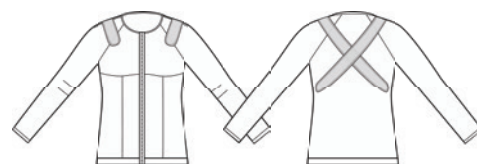

VOIMAKAS HARTIOIDEN TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä.

ASVU



MUU TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vahvasta kankaasta valmistettu vahvike tuotteen ulkopuolelle, joka toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaan. Ommellaan tuotteen saumoista poikkeavalla vahvemmalla saumatyyppillä. Hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

ASFM




Muita

Koodi

TUOTTEEN REUNAN LISÄMUOTOILU

Saatavilla paidan helmaan sekä hihojen, jalkaputkien tai reisi- ja polvisukkien yläreunaan. Reunan oletusmuotoilusta poikkeava, epäsymmetrinen, toiveiden mukainen muotoilu. Esim. hihan tai reisisukan ulkosyrjän korotus tai paidan helman pidennys.


AME

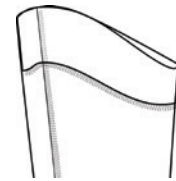

TYNKÄPUSSI

Hihan tai lahkeen pussimallinen muotoilu raajan tynkään, sen suojaamiseen ja muotoiluun. Voidaan käyttää yhdessä proteesin kanssa. Tyngän muoto määrittelee mallin: pyöreä pohja tai muotoonommellut saumat.

AAC

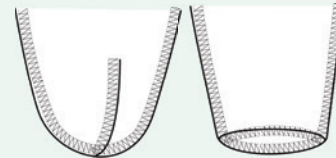

LIMITTÄINEN HALKIO

Avattava vaakasuuntainen halkio, jossa kankaan reunat menevät päällekkäin muodostaen avonaisen sulun. Voidaan käyttää esim. PEG-nappia varten. Valmistaja määrittelee koon ja toteutuksen suhteutettuna tilattuun tuotteeseen asiakkaan toiveet huomioiden.


AOS



AUKKO

Aukko asiakkaan määrittämässä koossa esim. avannetta tai PEG-nappia varten, hiusten poninhäntäaukkona hupussa tai kantapääaukkona sukassa. Aukon koko ja sijainti suhteessa tilattuun tuotteeseen voi vaikuttaa tuotteen antamaan paineeseen aukon kohdalla. Aukon reunat: ELA3 kanttinauha tai reunatikkaus hyvin pieniin aukkoihin. Voidaan lisätä tuotemuutoksena myös valmistuksen jälkeen, jolloin lähetyskulut asiakkaan omalla kustannuksella.


ASTO

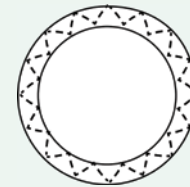

LÄPPÄ AUKOLLE

Kankainen läppä aukkoa peittämään. Tarrakiinnitys. Voidaan käyttää ASTO-koodin lisänä.

AFC

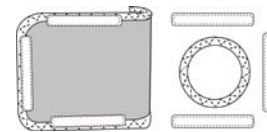

LISÄNEOPREENI

Lisäneopreenipala, joka yleensä identtinen taskuun tehdyn palan kanssa. Hinta noin kämmenen kokoiseen palaan.

AN



LISÄKUVAMERKKI

Tuotteeseen kuuluu 1 kpl ilmainen kuvamerkki. Useampi merkki kappaleperusteisesti hinnoiteltuna. Lue lisää sivulta 22.

DE

MONIVÄRITUOTE

Tuotteen valmistaminen kahdesta kangasväristä. Tuote voi koostua vain kahdesta eri kangasväristä. Valmistaja määrittelee värien asettelun tilaajan toiveet huomioiden.

AMC



LISÄVALINNAT VAKIOKOKOISIIN TUOTTEISIIN

- Kaikki lisävalinnat eivät ole saatavilla kaikkiin tuotevaihtoehtoihin.
- Lymed ottaa yhteyttä tilaajaan, jos lisävalintaa ei voida toteuttaa.
- Lisävalintoja suunniteltaessa tuotteen tilaajan ja painevaatehoidosta vastaavan ammattilaisen tulee yhdessä arvioida ratkaisujen soveltuvuus käyttäjän yksilölliseen tilanteeseen, käyttökontekstiin ja päivittäiseen toimintaan.

Vakiokokoiset paidat ja hihat

	Koodi	
PAIDAN AVARRETTU PÄÄNTIE Perusmallia avarampi pääntie enintään 3 cm keskeltä alemmas. Ilmoita avarrus senttimetreinä.	ANR	
HELMAN PIDENNYS Ilmoita pidennys senttimetreinä. Pidennyksen ympäryys on sama kuin alkuperäisessä helmassa.	AVLW	
HELMAN LYHENNYS Ilmoita lyhennys senttimetreinä.	AVSW	
PAIDAN HIHOJEN TAI HIHAPUTKEN PIDENNYS Paidan hihoihin tai erilliseen hihaan. Ilmoita pidennys senttimetreinä. Pidennyksen ympäryys on sama kuin alkuperäisessä hihan suussa.	ASLR	
PAIDAN HIHOJEN TAI HIHAPUTKEN LYHENNYS Paidan hihoihin tai erilliseen hihaan. Ilmoita lyhennys senttimetreinä.	ASSR	

Vakiokokoiset housut (1/2)

	Koodi	
AVONAINEN GENITAALIALUE Naisten housujen avonainen genitaalialue.	OS	
OLKAIMET Kiinteät ja säädettävät 3 cm leveät joustavat olkaimet housuihin.	ABS	
VYÖTÄRÖN KOROTUS Ilmoita korotus senttimetreinä. Pidennyksen ympäryys on sama kuin alkuperäisessä vyötäröstä.	AHW	

Vakiokokoiset housut (2/2)

Koodi

LAHKEEN LYHENNYS

Housunlahkeiden lyhennys. Ilmoita lyhennyksen määrä senttimetreissä.

ALLS

LAHKEEN PIDENNYS

Housunlahkeiden pidennys. Ilmoita pidennyksen määrä senttimetreinä. Pidennyksen ympärys on sama kuin alkuperäisen lahkeen suussa.

ALLL

MIESTEN KOMPRESSIOHOUSUJEN SAUMATON ETUKAPPALE

Miesten kompressiohousujen etukappale ilman anatomista muotoilua. Ei sisällä pussikappaletta.

AMFP




Vakiokokoiset käsineet

Koodi

SORMIEN PITUUDEN LYHENNYS

Lyhennys vain käsineisiin, joissa sormenpäät ovat auki. Saman mittainen lyhennys kaikkiin sormiin. Ilmoita lyhennyksen määrä senttimetreinä.


ALF

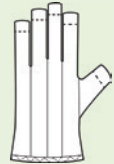

KÄSINEEN VARREN PIDENNYS

Käsineen varren pidennys enintään 5 cm käsineen vakiovarren lisäksi. Pidennys levenee kevyesti suhteessa käsineen ranteen kokoon. Ilmoita pidennyksen määrä senttimetreinä.


AGR

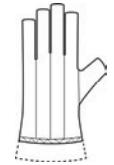

KÄSINEEN TASKU

Käsineen kämmenselän kattava tasku, johon voi lisätä oman täytteen.


AP

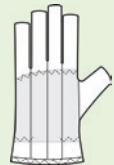

KÄSINEEN TASKU NEOPREENILLA

Käsineen kämmenselän kattava tasku poistettavalla neopreenitäytteellä. Taskuun voi vaihtaa oman täytteen.

APN

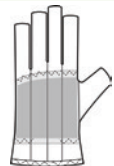

Vakiokokoisten kiinnitykset ja vedot

		Koodi	
LISÄVETOKETJU Perustuotteeseen kuulumaton vetoketju. Vetoketjun sijainti määriteltävä tilattaessa.	vasen	AZSL	
	oikea	AZSR	
	keskellä	AZSM	
	takana	AZSB	
VETOKETJUUN: APUHAKASET Yksittäiset apuhakaset vetoketjun alle helpottamaan vetoketjun kiinnivettä. Määrä 1-3 kpl riippuen tuotteesta.	1 kpl	AHZS	
	2 kpl	AHZS2	
	3 kpl	AHZS3	
SILIKONINAUHA Tuotteen paikallaan pysymisen parantamiseksi. Kaavoittaja määrittelee parhaimman kohdan tilatun tuotteen mukaan.	1 kpl	ASI2S	
	2 kpl	ASI2S2	
	3 kpl	ASI2S3	
KIINNITYKSEN POISTO Tuotteen valmistus ilman kiinnitystä. Ei koske rintaliivejä, tukivöitä tai päähineitä.		AHL	
KIINNITYKSEN VAIHTO VETOKETJUUN Kiinnityksen vaihtaminen vetoketjukiinnitykseen. Ei koske rintaliivejä, tukivöitä tai päähineitä.		AHLZ	
KIINNITYKSEN VAIHTO HAKASIIN Kiinnityksen vaihtaminen hakaskiinnitykseen. Ei koske rintaliivejä, tukivöitä tai päähineitä.		AHLH	

Vakiokokoiset rintaliivit

		Koodi	
RINTALIIVIN KIIENTEÄT OLKAIMET Kiinteät, säädettävät olkaimet malleihin, joissa oletuksena avattavat olkaimet.		ABB	
KOMPRESSORINTALIIVIN KÄDENTEIDEN AVARRUS Rintaliivin kädenteiden avarrus 2 cm suhteessa perusmalliin.		AAR	
VAHVAN TUEN LIIVI: RINTAPROTEESITASKU Aukko sivulla proteesin asettamista varten.	vasen	APPBL	
	oikea	APPBR	
	molemmat	APPBB	

Vakiokokoiset: Muut

	Koodi			
KUVAMERKKI	Kissa	DESP1	Dino	DESP8
	Koira	DESP2	Karhu	DESP9
	Kettu	DESP3	Kuoriainen	DESP10
	Jänis	DESP4	Leppäkerttu	DESP11
	Ankka	DESP5	Kilpikonna	DESP12
	Mansikka	DESP6	Valas	DESP13
	Lumihiutale	DESP7	Kukka	DESP14

	PAIKKA	REUNA	
PERUSMALLISTA POIKKEAVA REUNA	helma	ACBH	ELA1
	vyötärö	ACBW	ELA2
	yläreuna	ACBU	ELA3
	alareuna	ACBD	ELA4
	lahje	ACBL	SIL1
	paidanhiha	ACBS	SIL2
	käsinevarsi	ACBG	SIL4
	kämmenkäsine	ACBP	raakareuna
kädentie	ACBB	huolittelu	

TUKIVYÖN TAI SUSPENSORIN ERIKOISPITUUS

Tuotekuvastossa tarjottujen vyöpituuksien pidennys tai lyhennys - 40 cm / + 15 cm.
Tilatessa tukivyötä kahden koon välistä, valitaan perustuotteeksi lyhin sopiva tuotepituus.

AABLRL



SENSE-TOIMINNALLISET VAHVIKKEET

MILLOIN VALITA TOIMINNALLINEN VAHVIKE?

Vahvikkeita voidaan hyödyntää silloin, kun tavallisten painetuotteiden antama tuki ei riitä tai halutaan vaikuttaa tehokkaammin käyttäjän kehon asennon kokemukseen.

Toiminnallinen vahvike toimii parhaiten, kun halutaan vahvistaa kehotuntemusta tietyllä vartalon alueella tai muistuttaa käyttäjää asennon ylläpitämisestä. Huomioithan, että kokemus on aina yksilöllinen.

TOIMINNALLINEN VAHVIKE VAI TUPLAKANGAS?

Mikäli tuotteelta halutaan enemmän jäykistävää vaikutusta, voidaan Sense-tuotteisiin tilata lisävalintojen valikoimasta tuotteen kappale kokonaan tai osittain tuplakankaalla.

On huomioitavaa, että laajat vahvistukset nostavat koko tuotteen painetasoa, tekevät tuotteesta jäykemmän tuntuisen ja saattavat lisätä pukemisen haasteita.

ENEMMÄN EI OLE AINA PAREMPI


Tavoitellessa paikallista lisätuen tuntua, on vahvikkeen oltava paikallinen ja riittävän pienikokoinen suhteessa muuhun tuotteeseen.

Mikäli vuorauksia, vahvikkeita ja tuplakankaita lisätään tuotteeseen liikaa, nostaa se koko tuotteen painetasoa ja yleistä jämähyyttä, jolloin tunne paikallisesta, kohdistetusta vahvikkeesta häviää. Tällöin tuotteen pukeminen vaikeutuu ja tuntu saattaa muuttua jopa epämiellyttäväksi.



- Suosittelemme perusmallin tilaamista aina asiakkaan ensimmäiseksi Lymed-tuotteeksi ennen toiminnallisten vahvikkeiden kokeilemistä.
- Suosittelemme vahvikkeiden tilaamista ensisijaisesti pitkälahkeisiin ja pitkähihaisiin tuotteisiin.
- Vahvikkeiden antaman tuntuman voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi asiakkaan kehon malli ja pohjaksi tilatun tuotteen materiaali sekä painetaso.
- Vahvikkeet valmistetaan vahvasta materiaalista ja ommellaan tuotteen ulkopuolelle.
- Vahvikkeiden mallit ovat vakioituja ja niiden koko suhteutetaan tilattavaan mittatilaustuotteeseen.
- Toiminnallisissa vahvikkeissa käytetään tuotteen muista saumoista poikkeavaa jämähämpää saumatyyppiä.




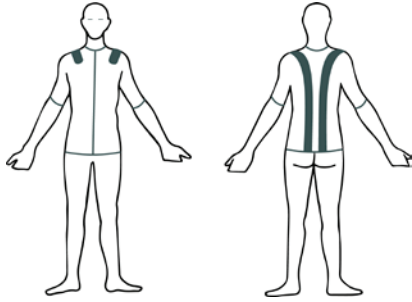

SELÄN TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Antaa tuen tuntua ylävartaloon ja hartioihin sekä auttaa hahmottamaan ylävartalon ryhtiä.


Suurin kokemuksellinen vaikutus selän suoruuteen ja hartioiden rentoutumiseen.

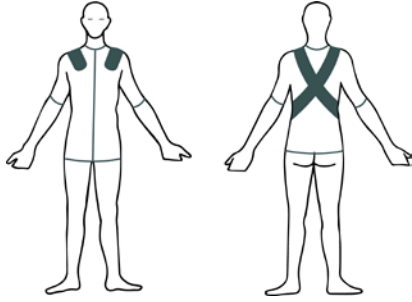

HARTIOIDEN TOIMINNALLINEN VAHVIKE


Antaa tuen tuntua ylävartaloon ja hartioihin sekä auttaa hahmottamaan ylävartalon ryhtiä.

Suurin kokemuksellinen vaikutus hartioiden rentoutumiseen ja taaksepäin ohjautumiseen.

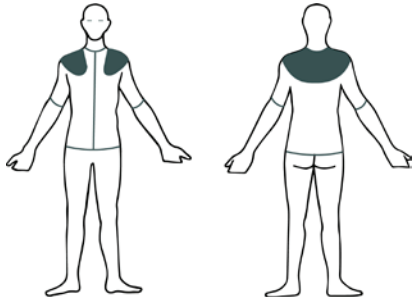


VOIMAKAS HARTIOIDEN TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Antaa erittäin voimakkaan tuen tunnun hartioille, olkapäihin ja yläselkään.

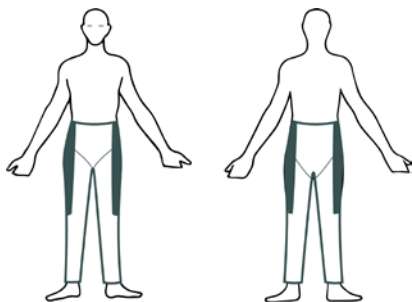

KEVYT LANTION TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Antaa tuen ja ryhdikkyuden tuntua keskivartaloon. Auttaa hahmottamaan lantion asentoa, mikäli tavallisten painehousujen antama tuki ei riitä.

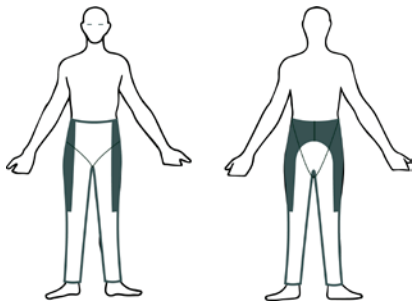

VAHVA LANTION TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Antaa vahvaa tuen ja ryhdikkyuden tuntua keskivartaloon. Auttaa hahmottamaan lantion asentoa, mikäli tavallisten painehousujen antama tuki ei riitä.

Toiminnallisten vahvikkeiden
tilauskoodit löydät
sivulta 32

MUU TOIMINNALLINEN VAHVIKE

Vapaavalintainen paikka ja muoto.




SKIN™

PAINEVAATTEET ARPIHOITON

MITTATILAUS

VAKIOKOKO

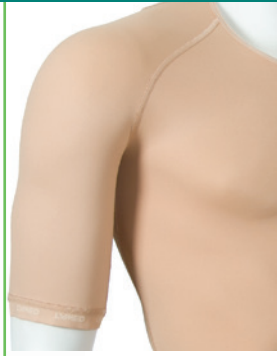

Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman kainalomuotoilua.



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR22423F5

PAITA

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihatton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	PR21411	PR21422	PR21423	PR21433
Miehet	PR22411	PR22422	PR22423	PR22433
Lapset	PR10411	PR10422	PR10423	PR10433

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa paidassa anatomiset kyynärtaive-muotoilut. Vahvan kankaan tuoteeseen valmistetaan kainaloalueen muotoilu keskivahvasta kankaasta. Keskivahvan kankaan tuoteessa ei ole kainalomuotoiluja. Naisten paidassa rintojen muotosaummat. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydettyäessä.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	2- riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella / ei kiinnitystä
Viimeistelyt:	Paidan alareuna SIL 1
	Pääntie ELA 3
	Hihansuut ELA 2
	Hihattoman kädensuut ELA 3



VATSATUKI

MITTATILAUS

Malli	Tuotenro
Naiset	PR21400
Miehet	PR22400
Lapset	PR10400

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Käytetään tuomaan lisäpainetta keskivartalolle.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	2- riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella / ei kiinnitystä
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1
	Alareuna SIL 1

Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR22400F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPR714F2

RINTALASTAREMMI KAPEA MALLI			VAKIOKOKO
Koko	Leveys* cm	Ymp.mitta** cm	Tuotenro
XS	4,0	50 - 62	STPR712F2
S	4,4	63 - 75	STPR713F2
M	4,8	76 - 88	STPR714F2
L	5,3	89 - 101	STPR715F2
XL	5,7	102 - 114	STPR716F2

Tuotetieto:

Kaksiosainen tuote, jossa tarrakiinnitys kyljissä ja olkapäillä. Tuote on tarkoitettu tuottamaan painetta rintalastan alueelle. Rintalastan alueella on lastatasku.

Malli on suunniteltu erityisesti naisille.

Etukappaleen leveys edestä kapeimmasta kohdasta on koosta riippuen 4-5,7 cm.

*Etukappaleen leveys tuotteen kapeimmasta kohdasta

**Ympärysmitta rinnan alta

Materiaali: Polyamidi-elastaanineulos

Väri: Musta

Painetaso: Säädettävä

Kiinnitys: Tarrakiinnitys



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPR724F2

RINTALASTAREMMI | LEVEÄ MALLI

VAKIOKOKO

Koko	Leveys* cm	Ymp.mitta** cm	Tuotenro
S	10	63 - 75	STPR723F2
M	10	76 - 88	STPR724F2
L	10	89 - 101	STPR725F2
XL	10	102 - 114	STPR726F2

Tuotetieto:

Kaksiosainen tuote, jossa tarrakiinnitys kyljissä ja olkapäillä. Tuote on tarkoitettu tuottamaan painetta rintalastan alueelle.

Rintalastan alueella on lastatasku, jossa on irrotettava tyyny lisäpaineen tuottamiseksi.

*Etukappaleen leveys tuotteen kapeimmasta kohdasta

**Ympärysmitta rinnan alta

Materiaali: Polyamidi-elastaanineulos
Tyyny: polyesteri-polyuretaani

Väri: Musta

Painetaso: Säädettävä


Kiinnitys: Tarrakiinnitys



Kuvan tuotteen
tilauskoodi: PR104033F7

BODY		MITTATILAUS		
Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihaton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	PR214011	PR214022	PR214023	PR214033
Lapset	PR104011	PR104022	PR104023	PR104033

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

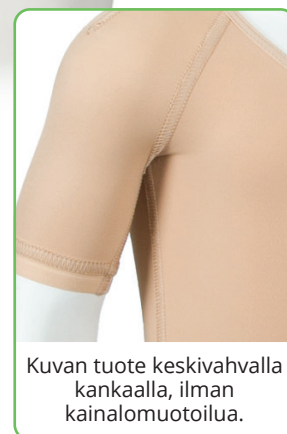

Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman kainalomuotoilua.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa bodyssa on anatomiset kyynärtaipeen muotoilut. Vahvasta kankaasta valmistetussa tuotteessa kainaloalueen muotoilut toteutetaan keskivahvasta kankaasta. Keskivahvan kankaan tuotteessa ei ole kainalomuotoiluja. Naisten bodyssa on rintojen muotosaummat. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydettyäessä. Lyhyet lahkeet tilattavissa lisävalintana.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Naiset: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella. Haarassa 2-riviset painonapit. Lyhyet lahkeet: ei haarakiinnitystä Lapset: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella. Haarassa 2-riviset painonapit. Lyhyet lahkeet: 1-riviset painonapit
Viimeistelyt:	Pääntie ja lahkeensuut ELA 3 Hihansuut ELA 2 Hihattoman kädensuut ELA 3 Lyhyet lahkeet ELA 2



Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
PR225249F4

Tuotetieto:

Pitkälahkeisessa housussa on anatominen muotoilu polvitaiteen alueella.
Sukallisissa lahkeissa on anatominen muotoilu nilkan ja polvitaiteen alueella.
Kun sukallinen lahje tilataan vahvasta materiaalista, muotoilut valmistetaan keskivahvasta materiaalista.
Miesten malleissa on muotoilu etumuksessa.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Vyötärö ELA 1 Lahkeensuut ELA 2

HOUSUT

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro			
	Lyhyet lahkeet	Lyhyt ja pitkä lahje	Lyhyt lahje ja lahje sukalla AUKI	Lyhyt lahje ja lahje sukalla KIINNI
Naiset	PR21522	PR21523	PR215248	PR215249
Miehet	PR22522	PR22523	PR225248	PR225249
Tytöt	PR11522	PR11523	PR115248	PR115249
Pojat	PR12522	PR12523	PR125248	PR125249

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Malli	Tuote / Tuotenro						
	Pitkät lahkeet	Pitkä lahje ja lahje sukalla AUKI	Pitkä lahje ja lahje sukalla KIINNI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI
Naiset	PR21533	PR215348	PR215349	PR21524FG8	PR21524FG9	PR21534FG8	PR21534FG9
Miehet	PR22533	PR225348	PR225349	PR22524FG8	PR22524FG9	PR22534FG8	PR22534FG9
Tytöt	PR11533	PR115348	PR115349	PR11524FG8	PR11524FG9	PR11534FG8	PR11534FG9
Pojat	PR12533	PR125348	PR125349	PR12524FG8	PR12524FG9	PR12534FG8	PR12534FG9

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

SUKKAHOUSUT

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro					
	Kärjet AUKI	Kärjet KIINNI	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät KIINNI	Varvassukilla, varpaanpäät AUKI	Varvassukilla, varpaanpäät KIINNI
Naiset	PR215448	PR215449	PR21544FG8	PR21544FG9	PR21544FG28	PR21544FG29
Miehet	PR225448	PR225449	PR22544FG8	PR22544FG9	PR22544FG28	PR22544FG29
Tytöt	PR115448	PR115449	PR11544FG8	PR11544FG9	PR11544FG28	PR11544FG29
Pojat	PR125448	PR125449	PR12544FG8	PR12544FG9	PR12544FG28	PR12544FG29

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR20603F6



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR20603F1

JALKAPUTKI			MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Nilkka-polvi	Polvi-reisi	Nilkka-reisi
Aikuiset	PR20601	PR20602	PR20603
Lapset	PR10601	PR10602	PR10603

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Jalkaputkessa anatominen muotoilu polvitaipen alueella. Kun tuote tilataan vahvasta kankaasta, polvitaipen muotoilu valmistetaan keskivahvasta kankaasta.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 4, alareuna ELA 2 Nilkka-polvi-mallissa yläreuna SIL 1



Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
PR20639F4 A20B



Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
PR20629F4 AZ



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
PR20619F4



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
PRA20T9F2

SUKKA

MITTATILAUS

Malli	Kärki / Varpaanpäät	Tuote / Tuotenro		
		Nilkkapituus	Polvipituus	Reisipituus
Aikuiset	Kiinni	PR20619	PR20629	PR20639
Aikuiset	Auki	PR20618	PR20628	PR20638
Aikuiset	Varvassukka, kiinni	PR20619FG	PR20629FG	PR20639FG
Aikuiset	Varvassukka, auki	PR20618FG	PR20628FG	PR20638FG
Lapset	Kiinni	PR10619	PR10629	PR10639
Lapset	Auki	PR10618	PR10628	PR10638
Lapset	Varvassukka, kiinni	PR10619FG	PR10629FG	PR10639FG
Lapset	Varvassukka, auki	PR10618FG	PR10628FG	PR10638FG

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Nilkkasukassa, polvisukassa ja reisipituuisessa sukassa on anatominen nilkan muotoilu. Reisipituuisessa sukassa on lisäksi anatominen polvitaiteen muotoilu. Kun sukka tilataan vahvasta materiaalista, muotoilut toteutetaan keskivahvasta materiaalista. Avokärkisessä sukassa kärki on kevyesti viistottu. Nilkkasukan varren pituus mitataan L/R61-ympärysmitasta ylöspäin. Huomioithan, että varren pituus voi olla enintään L/R67-mitan suuruinen

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Nilkkasukka: yläreuna SIL 1 / Polvisukka: yläreuna SIL 1 Reisisukka: yläreuna SIL 4 / Kärki auki: sukan suu ELA 2

VARVIKAS

MITTATILAUS

Malli	Varpaanpäät	Tuotenro
Aikuiset	Kiinni	PRA20T9
Aikuiset	Auki	PRA20T8
Lapset	Kiinni	PRA10T9
Lapset	Auki	PRA10T8

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Tuotetta voidaan käyttää yhdessä avokärkisen sukan kanssa tai erikseen.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Viimeistelyt:	Raakareuna



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR20303F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR2031038F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: PR2031138F1

HIHAPUTKI		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Ranne- kynärpää	Kynärpää- kainalo	Ranne- kainalo
Aikuiset	PR20301	PR20302	PR20303
Lapset	PR10301	PR10302	PR10303

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Ranne-kainalo-mallissa anatominen kynärtaive.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1 Alareuna ELA 2

HIHA-KÄMMENKÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Peukalo	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	PR2031019	PR2031039
Aikuiset	Auki	PR2031018	PR2031038
Lapset	Kiinni	PR1031019	PR1031039
Lapset	Auki	PR1031018	PR1031038

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kynärtaive. Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1 Alareuna ELA 2

HIHA-KÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Sormen- päät	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	PR2031119	PR2031139
Aikuiset	Auki	PR2031118	PR2031138
Lapset	Kiinni	PR1031119	PR1031139
Lapset	Auki	PR1031118	PR1031138

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kynärtaive. Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1

HIHAKIINNITYS MALLI 1

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 1 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S1
Lapset	A10S1


Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys rinnan alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Sopii erityisesti isorintaisille. Hihakiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha. Naisten hihassa rintaliivin olkaimen pidike.

Materiaali: ELA 1

Väri: Sama kuin hiha väri

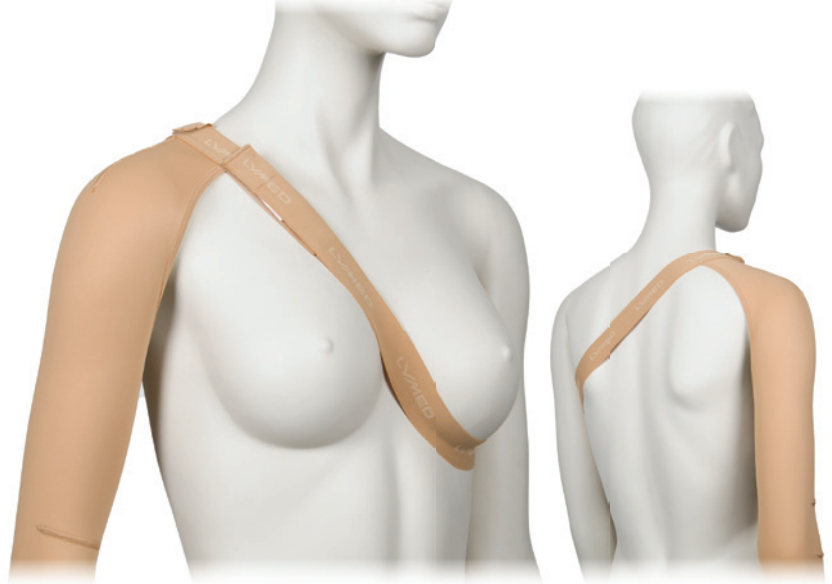

HIHAKIINNITYS MALLI 2

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 2 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S2
Lapset	A10S2


Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys kainalon alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Hihakiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha.

Materiaali: ELA 1

Väri: Sama kuin hiha väri

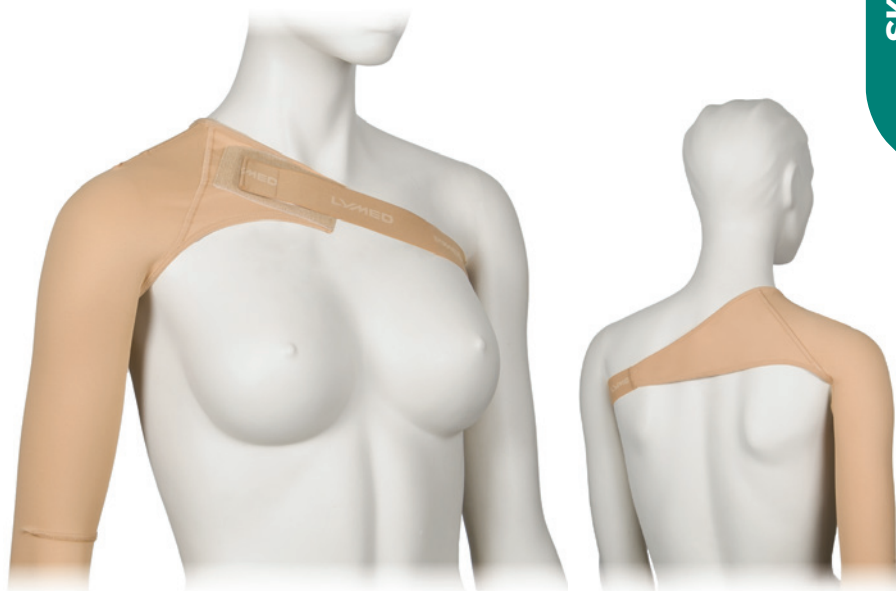

HIHAKIINNITYS MALLI 3

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 3 - Vastahiha	
Aikuiset	A20S3
Lapset	A10S3

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Hihakiinnitysmallissa vastahiha yhdistää kaksi kainalopituista hihaa. Malli soveltuu tilanteisiin, joissa hiha tai hihojen paikallaan pysyminen on haastavaa. Vastahihamalla voidaan käyttää eri kokoonpanoissa: yhdistämään kaksi hihaa tai tukemaan yhden hihaan paikallaan pysymistä.

Kiinnityksen yhteydessä tilataan kaksi hihaa. Jos tilattavat hihat ovat eri materiaaleista, kiinnitysosa valmistetaan oletuksena kevyemmän materiaalin mukaisesti.

Materiaali: Keskivahva tai vahva


Väri: Sama kuin hiha väri

Kiinnitys: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella

Pääntie ELA 3

Alareuna SIL 2

Hihaansuut ELA 2

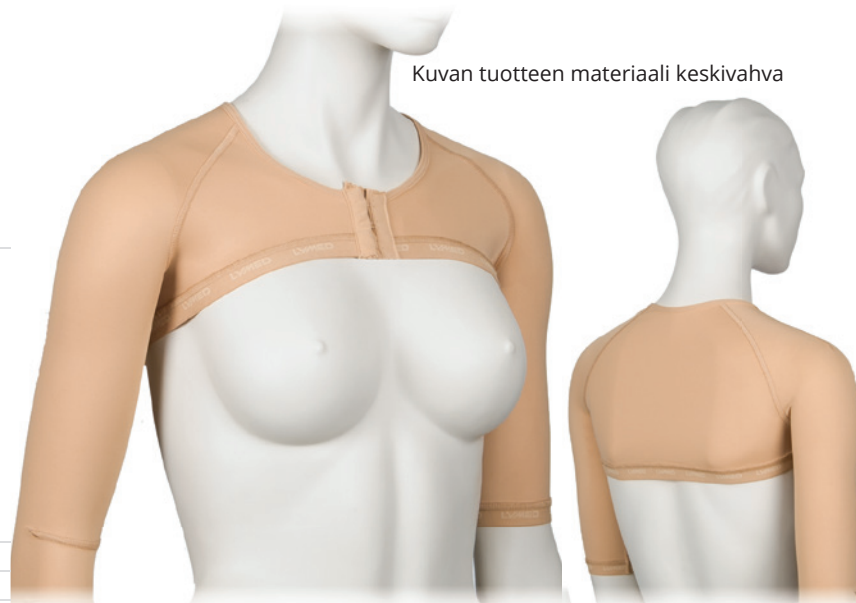

Kuvan tuotteen materiaali keskivahva

Katso myös paitamalli s.58



Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR203119F1 (mittatilaus)
STPR31194RF1 (vakiokoko)

Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR203118F1 (mittatilaus)
STPR31184RF1 (vakiokoko)

KÄSINE

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro	
	Sormenpäät kiinni	Sormenpäät auki
Aikuiset	PR203119	PR203118
Lapset	PR103119	PR103118

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella. Kämmenselän saumojen määrä voi vaihdella yksilöllisten mittojen ja painetasojen mukaan. Tilaa hiha-käsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3

KÄSINE

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
cm			Sormenpäät kiinni		Sormenpäät auki	
			Oikea	Vasen	Oikea	Vasen
XXS	14 - 16	Beige	STPR31191RF1	STPR31191LF1	STPR31181RF1	STPR31181LF1
XXS	14 - 16	Musta	STPR31191RF2	STPR31191LF2	STPR31181RF2	STPR31181LF2
XS	17 - 18	Beige	STPR31192RF1	STPR31192LF1	STPR31182RF1	STPR31182LF1
XS	17 - 18	Musta	STPR31192RF2	STPR31192LF2	STPR31182RF2	STPR31182LF2
S	19 - 20	Beige	STPR31193RF1	STPR31193LF1	STPR31183RF1	STPR31183LF1
S	19 - 20	Musta	STPR31193RF2	STPR31193LF2	STPR31183RF2	STPR31183LF2
M	21 - 22	Beige	STPR31194RF1	STPR31194LF1	STPR31184RF1	STPR31184LF1
M	21 - 22	Musta	STPR31194RF2	STPR31194LF2	STPR31184RF2	STPR31184LF2
L	23 - 24	Beige	STPR31195RF1	STPR31195LF1	STPR31185RF1	STPR31185LF1
L	23 - 24	Musta	STPR31195RF2	STPR31195LF2	STPR31185RF2	STPR31185LF2
XL	25 - 26	Beige	STPR31196RF1	STPR31196LF1	STPR31186RF1	STPR31186LF1
XL	25 - 26	Musta	STPR31196RF2	STPR31196LF2	STPR31186RF2	STPR31186LF2
XXL	27 - 28	Beige	STPR31197RF1	STPR31197LF1	STPR31187RF1	STPR31187LF1
XXL	27 - 28	Musta	STPR31197RF2	STPR31197LF2	STPR31187RF2	STPR31187LF2

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä.
*Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR203108F1 (mittatilaus)
STPR3104RF1 (vakio koko)

KÄMMENKÄSINE			MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Peukalonpää kiinni	Peukalonpää auki	
Aikuiset	PR203109	PR203108	
Lapset	PR103109	PR103108	

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.
Tilaa hiha-kämmenkäsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3 Kämmenen reuna ELA 2

KÄMMENKÄSINE			VAKIOKOKO	
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm		Peukalo auki	
			Oikea	Vasen
XXS	14 - 16	Beige	STPR3101RF1	STPR3101LF1
XXS	14 - 16	Musta	STPR3101RF2	STPR3101LF2
XS	17 - 18	Beige	STPR3102RF1	STPR3102LF1
XS	17 - 18	Musta	STPR3102RF2	STPR3102LF2
S	19 - 20	Beige	STPR3103RF1	STPR3103LF1
S	19 - 20	Musta	STPR3103RF2	STPR3103LF2
M	21 - 22	Beige	STPR3104RF1	STPR3104LF1
M	21 - 22	Musta	STPR3104RF2	STPR3104LF2
L	23 - 24	Beige	STPR3105RF1	STPR3105LF1
L	23 - 24	Musta	STPR3105RF2	STPR3105LF2
XL	25 - 26	Beige	STPR3106RF1	STPR3106LF1
XL	25 - 26	Musta	STPR3106RF2	STPR3106LF2
XXL	27 - 28	Beige	STPR3107RF1	STPR3107LF1
XXL	27 - 28	Musta	STPR3107RF2	STPR3107LF2

Tuotetieto:

*Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3 Kämmenen reuna ELA 2



RÄPYLÄREMMI

VAKIOKOKO

Malli	Väri	Tuote / Tuotenro
Yksi koko		
Aikuiset	Beige	STPR2037F1
Aikuiset	Musta	STPR2037F2
Lapset	Beige	STPR1037F1
Lapset	Musta	STPR1037F2

Tuotetieto:

Räpyläremmin avulla saadaan lisäpainetta sormien väliin. Räpyläremmi on tarroilla säädettävä ja sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen. Suunniteltu käytettäväksi käsineen päällä.

Materiaali: Joustavat tarra- ja elastaaninauhat

Värit: Beige, musta

Painetaso: Säädettävä

Kiinnitys: Tarrakiinnitys



Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
PR203128F1 (mittatilaus)
STPR334F1 (vakio koko)

SORMITUPPI		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
	Sormenpää kiinni	Sormenpää auki
Aikuiset	PR203129	PR203128
Lapset	PR103129	PR103128

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Sormituppi saatavilla avo- ja umpikärkisenä.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Ei kiinnitystä
Viimeistely:	Raakareuna

SORMITUPPI				VAKIOKOKO
Koko	Tuotteen pituus	Ymp.mitta*	Väri	Tuotenro
	cm	cm		Sormenpää auki
XS	5,0	4 - 5	Beige	STPR332F1
S	5,5	5 - 6	Beige	STPR333F1
M	6,5	6 - 7	Beige	STPR334F1
L	7,5	7 - 8	Beige	STPR335F1
XL	8,5	8 - 9	Beige	STPR336F1

Tuotetieto:

Voidaan käyttää molemman käden sormissa.

*Sormenympäryys PIP-nivelen kohdalta.

Materiaali:	Keskivahva
Väri:	Beige
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Kiinnitys:	Ei kiinnitystä
Viimeistely:	Raakareuna



Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR2011F1 (mittatilaus)
STPR114F1 (vakio koko)

Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR2012F1 (mittatilaus)
STPR124F1 (vakio koko)

PÄÄHINE		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Kiertää korvat	Peittää korvat	
Aikuiset	PR2011	PR2012	
Lapset	PR1011	PR1012	
Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.			

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys niskassa ja pääläella.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys niskassa ja pääläella
Viimeistelyt:	Reunat ELA 3

PÄÄHINE		VAKIOKOKO	
Koko	Ymp.mitta*	Tuote / Tuotenro	
	cm	Kiertää korvat	Peittää korvat
XXS	50 - 54	STPR111F1	STPR121F1
XS	55 - 58	STPR112F1	STPR122F1
S	59 - 62	STPR113F1	STPR123F1
M	63 - 66	STPR114F1	STPR124F1
L	67 - 70	STPR115F1	STPR125F1
XL	71 - 74	STPR116F1	STPR126F1

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys niskassa ja pääläella.
*Ympärysmitta leuka-lakipisteestä.

Materiaali:	Vahva
Väri:	Beige
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys niskassa ja pääläella
Viimeistelyt:	Reunat ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
PR2010F1

OTSAPANTA		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
Aikuiset	PR2010		
Lapset	PR1010		
Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.			

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys takana.

Materiaali:	Vahva Keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys
Viimeistelyt:	Reunat ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
PR20138F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
PR20139F1


HUPPU		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
	Kasvojen alue auki	Kasvojen alue kiinni
Aikuiset	PR20138	PR20139
Lapset	PR10138	PR10139

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kaksi eri mallia joista toisessa kasvojen alue kiinni. Kasvot kiinni-mallin kasvo-osa on tarkoitettu arven ja haavanhoitotuotteiden, sidosten tai kasvomaskin paikallaan pitämiseen. Kasvo-osaan voidaan tarvittaessa leikata reiät suun, nenän ja silmien alueelle. Materiaali ei purkaudu leikkaamisen jälkeen.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	1-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella Takaraivolta niskaan
Viimeistelyt:	Reunat ELA3

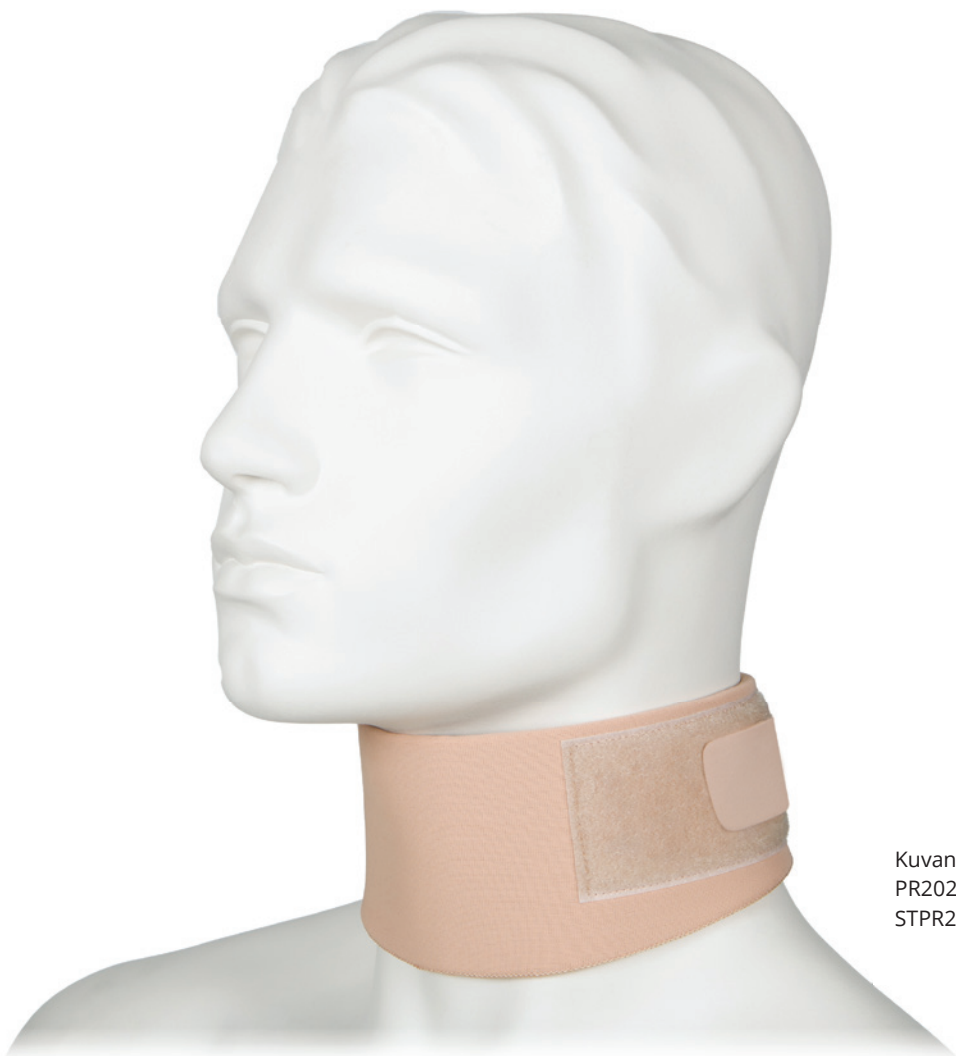

Kuvan tuotteen tilauskoodit:
PR202F1 (mittatilaus)
STPR24F1 (vakio koko)

PAINEKAULURI **MITTATILAUS**

Malli	Tuotenro
Aikuiset	PR202
Lapset	PR102

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kauluri 3 mm neopreenitäytteellä.
Takana tarrakiinnitys.

Materiaali:	Vahva, neopreeni
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys

PAINEKAULURI **VAKIOKOKO**

Koko	Malli	Ymp.mitta*	Korkeus		Tuotenro
		cm	Edestä	Takaa	
XXS	Lapset	20 - 24	4,5	3,0	STPR21F1
XS	Lapset	25 - 30	4,5	3,0	STPR22F1
S	Aikuiset	31 - 35	7,0	5,5	STPR23F1
M	Aikuiset	36 - 40	7,5	5,5	STPR24F1
L	Aikuiset	41 - 45	8,0	5,5	STPR25F1
XL	Aikuiset	46 - 50	9,0	6,0	STPR26F1

Tuotetieto:

Kauluri 3 mm neopreenitäytteellä. Takana tarrakiinnitys.
*Kaulan ympärysmitta.

Materiaali:	Vahva, neopreeni
Väri:	Beige
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys



COMPRESSIONTM

LÄÄKINNÄLLISET KOMPRESSIOVAATTEET

MITTATILAUS

VAKIOKOKO



Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman muotoiluja.



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO21433F7



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO21433F1 (mitattu päättyväksi rintojen alle)
Pieni kuva: Paita lisävalinnalla, kuppimuotoilu (MC)

PAITA		MITTATILAUS		
Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihaton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	CO21411	CO21422	CO21423	CO21433
Miehet	CO22411	CO22422	CO22423	CO22433
Lapset	CO10411	CO10422	CO10423	CO10433

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa paidassa anatomiset kyynärtaive-muotoilut. Vahvan kankaan tuotteeseen valmistetaan kainaloalueen muotoilut keskivahvasta kankaasta. Keskivahvan kankaan tuotteessa ei ole kainaloalueen muotoiluja. Naisten paidassa rintojen muotosaumatt. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydettyäessä.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella / ei kiinnitystä
	Paidan alareuna SIL 1
	Pääntie ELA 3
Viimeistelyt:	Hihansuut ELA 2
	Hihattoman kädentiet ELA 3

Saatavilla myös erillinen vatsatuki kankaasta: katso tuotetiedot Skin-tuoteryhmästä sivu 41



Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman muotoiluja.



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO214022F4

BODY				MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihaton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	CO214011	CO214022	CO214023	CO214033
Lapset	CO104011	CO104022	CO104023	CO104033

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa bodyssa on anatomiset kyynärtaiteen muotoilut. Vahvasta kankaasta valmistetussa tuotteessa kainaloalueen muotoilut toteutetaan keskivahvasta kankaasta. Keskivahvan kankaan tuotteessa ei ole kainaloalueen muotoiluja. Naisten bodyssa on rintojen muotosaumot. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydyttäessä. Lyhyet lahkeet tilattavissa lisävalintana.

Materiaali: Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)

Värit: Kaikki

Kompressi-
oluokka: Valittavissa

Kiinnitys: **Naiset:** 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Haarassa 2-riviset painonapit
Lyhyet lahkeet: ei haarakiinnitystä

Lapset: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Haarassa 2-riviset painonapit
Lyhyet lahkeet: 1-riviset painonapit

Pääntie ja lahkeensuut ELA 3

Hihansuut ELA 2

Viimeistelyt: Hihattoman kädentiet ELA 3

Lyhyet lahkeet ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO7464F3



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO7466F3

RINTALIIVIT		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
Kahdella kupilla	CO7464	
Yhdellä kupilla	CO7465	
Ilman kuppeja	CO7466	

Tuotetieto:

Tukeva kompressorintaliivi turvotuksen hallintaan erityisesti kylkien ja kainaloiden alueella. Paitamainen malli, jossa kiinnitys edessä rintojen välissä. Tilattavissa kahdella kupilla, yhdellä kupilla ja ilman kuppeja. Proteesitaskut tilattavissa erikseen.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki*
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	1-riviset hakaset / 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella ja kahdella apuhakasella
Viimeistelyt:	Pääntie ELA3, Kädentiet ELA 3, Alareunan nauha valittavissa

*Säädettävät olkaimet saatavilla vain beigenä, mustana ja valkoisena 3 cm leveydessä

RINTALIIVIN JA RINTALIIVITOPIN PERUSVALIKOIMA

OLKAIMET



Kiinteä kankainen

Avattava,
säädettävä

Kiinteä,
säädettävä

PÄÄNTIE TAKANA



Korkea

Avara

PÄÄNTIE EDESSÄ



Keskikorkea

Matala

KAINALO



Korkea

Avara



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
CO7474F3

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
CO7476F3

RINTALIIVITOPPI		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
Kahdella kupilla	CO7474	
Yhdellä kupilla	CO7475	
Ilman kuppeja	CO7476	

Tuotetieto:

Tukeva kompressorintaliivi turvotuksen hallintaan erityisesti kylkien ja kainaloiden alueella. Paitamainen malli, jossa kiinnitys edessä rintojen välissä. Tilattavissa kahdella kupilla, yhdellä kupilla ja ilman kuppeja. Proteesitaskut tilattavissa erikseen.

Materiaali: Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit: Kaikki*
Kompressioluokka: Valittavissa

Kiinnitys: 1-riviset hakaset / 2-riviset hakaset /
vetoketju sisäpehmusteella ja
kolmella apuhakasella

Viimeistelyt: Pääntie ELA 3
Kädentiet ELA 3
Alareuna valittavissa

*Säädettävät olkaimet saatavilla vain beigenä, mustana ja valkoisena 3 cm leveydessä



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STCO754F3H

KOMPRESSIORINTALIIVIT

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Tukeva kompressiorintaliivi turvotuksen hallintaan erityisesti kylkien ja kainaloiden alueella. Paitamainen malli, jossa kiinnitys edessä rintojen välissä. Tilattavissa kahdella kupilla, yhdellä kupilla ja ilman kuppeja, sekä proteesitaskuilla.

**Ympärysmitta rintojen alta.*

Materiaali:	Vahva Proteesitaskussa: Keskivahva
Värit:	Musta, valkoinen
Kompressioluokka:	Ccl 2
Kiinnitys:	1-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Viimeistelyt:	Alareuna ELA 1 Muut reunat ELA 3



KOMPRESSIORINTALIIVIT | HAKASILLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro						
			cm	Kahdella kupilla	Ilman kuppeja	Oikealla kupilla	Vasemmalla kupilla	Kahdella proteesitaskulla	Proteesitasku oik. puolella
XS	68 - 76	Musta	STCO752F2H	STCO762F2H	STCO762RF2H	STCO762LF2H	STCO752PPF2H	STCO752PRF2H	STCO752PLF2H
XS	68 - 76	Valkoinen	STCO752F3H	STCO762F3H	STCO762RF3H	STCO762LF3H	STCO752PPF3H	STCO752PRF3H	STCO752PLF3H
S	76 - 84	Musta	STCO753F2H	STCO763F2H	STCO763RF2H	STCO763LF2H	STCO753PPF2H	STCO753PRF2H	STCO753PLF2H
S	76 - 84	Valkoinen	STCO753F3H	STCO763F3H	STCO763RF3H	STCO763LF3H	STCO753PPF3H	STCO753PRF3H	STCO753PLF3H
M	84 - 89	Musta	STCO754F2H	STCO764F2H	STCO764RF2H	STCO764LF2H	STCO754PPF2H	STCO754PRF2H	STCO754PLF2H
M	84 - 89	Valkoinen	STCO754F3H	STCO764F3H	STCO764RF3H	STCO764LF3H	STCO754PPF3H	STCO754PRF3H	STCO754PLF3H
L	89 - 94	Musta	STCO755F2H	STCO765F2H	STCO765RF2H	STCO765LF2H	STCO755PPF2H	STCO755PRF2H	STCO755PLF2H
L	89 - 94	Valkoinen	STCO755F3H	STCO765F3H	STCO765RF3H	STCO765LF3H	STCO755PPF3H	STCO755PRF3H	STCO755PLF3H
XL	94 - 104	Musta	STCO756F2H	STCO766F2H	STCO766RF2H	STCO766LF2H	STCO756PPF2H	STCO756PRF2H	STCO756PLF2H
XL	94 - 104	Valkoinen	STCO756F3H	STCO766F3H	STCO766RF3H	STCO766LF3H	STCO756PPF3H	STCO756PRF3H	STCO756PLF3H
XXL	104 - 114	Musta	STCO757F2H	STCO767F2H	STCO767RF2H	STCO767LF2H	STCO757PPF2H	STCO757PRF2H	STCO757PLF2H
XXL	104 - 114	Valkoinen	STCO757F3H	STCO767F3H	STCO767RF3H	STCO767LF3H	STCO757PPF3H	STCO757PRF3H	STCO757PLF3H
XXXL	114 - 127	Musta	STCO758F2H	STCO768F2H	STCO768RF2H	STCO768LF2H	STCO758PPF2H	STCO758PRF2H	STCO758PLF2H
XXXL	114 - 127	Valkoinen	STCO758F3H	STCO768F3H	STCO768RF3H	STCO768LF3H	STCO758PPF3H	STCO758PRF3H	STCO758PLF3H

KOMPRESSIORINTALIIVIT | VETOKETJULLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro						
			cm	Kahdella kupilla	Ilman kuppeja	Oikealla kupilla	Vasemmalla kupilla	Kahdella proteesitaskulla	Proteesitasku oik. puolella
XS	68 - 76	Musta	STCO752F2Z	STCO762F2Z	STCO762RF2Z	STCO762LF2Z	STCO752PPF2Z	STCO752PRF2Z	STCO752PLF2Z
XS	68 - 76	Valkoinen	STCO752F3Z	STCO762F3Z	STCO762RF3Z	STCO762LF3Z	STCO752PPF3Z	STCO752PRF3Z	STCO752PLF3Z
S	76 - 84	Musta	STCO753F2Z	STCO763F2Z	STCO763RF2Z	STCO763LF2Z	STCO753PPF2Z	STCO753PRF2Z	STCO753PLF2Z
S	76 - 84	Valkoinen	STCO753F3Z	STCO763F3Z	STCO763RF3Z	STCO763LF3Z	STCO753PPF3Z	STCO753PRF3Z	STCO753PLF3Z
M	84 - 89	Musta	STCO754F2Z	STCO764F2Z	STCO764RF2Z	STCO764LF2Z	STCO754PPF2Z	STCO754PRF2Z	STCO754PLF2Z
M	84 - 89	Valkoinen	STCO754F3Z	STCO764F3Z	STCO764RF3Z	STCO764LF3Z	STCO754PPF3Z	STCO754PRF3Z	STCO754PLF3Z
L	89 - 94	Musta	STCO755F2Z	STCO765F2Z	STCO765RF2Z	STCO765LF2Z	STCO755PPF2Z	STCO755PRF2Z	STCO755PLF2Z
L	89 - 94	Valkoinen	STCO755F3Z	STCO765F3Z	STCO765RF3Z	STCO765LF3Z	STCO755PPF3Z	STCO755PRF3Z	STCO755PLF3Z
XL	94 - 104	Musta	STCO756F2Z	STCO766F2Z	STCO766RF2Z	STCO766LF2Z	STCO756PPF2Z	STCO756PRF2Z	STCO756PLF2Z
XL	94 - 104	Valkoinen	STCO756F3Z	STCO766F3Z	STCO766RF3Z	STCO766LF3Z	STCO756PPF3Z	STCO756PRF3Z	STCO756PLF3Z
XXL	104 - 114	Musta	STCO757F2Z	STCO767F2Z	STCO767RF2Z	STCO767LF2Z	STCO757PPF2Z	STCO757PRF2Z	STCO757PLF2Z
XXL	104 - 114	Valkoinen	STCO757F3Z	STCO767F3Z	STCO767RF3Z	STCO767LF3Z	STCO757PPF3Z	STCO757PRF3Z	STCO757PLF3Z
XXXL	114 - 127	Musta	STCO758F2Z	STCO768F2Z	STCO768RF2Z	STCO768LF2Z	STCO758PPF2Z	STCO758PRF2Z	STCO758PLF2Z
XXXL	114 - 127	Valkoinen	STCO758F3Z	STCO768F3Z	STCO768RF3Z	STCO768LF3Z	STCO758PPF3Z	STCO758PRF3Z	STCO758PLF3Z



Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
CO22533F1

HOUSUT & SUKKAHOUSUT

MITTATILAUS

Tuotetieto:

Pitkälahkeisessa housussa on anatominen muotoilu polvitaiteen alueella.
Sukallisissa lahkeissa on anatominen muotoilu nilkan ja polvitaiteen alueella.
Kun sukallinen lahje tilataan vahvasta materiaalista kompressioluokissa 1-2, muotoilut valmistetaan keskivahvasta materiaalista.
Miesten malleissa on muotoilu etumuksessa.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Vyötärö ELA 1 Lahkeensuut ELA 2

HOUSUT					MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro				
	Lyhyet lahkeet	Lyhyt ja pitkä lahje	Lyhyt lahje ja lahje sukalla AUKI	Lyhyt lahje ja lahje sukalla KIINNI	Pitkät lahkeet
Naiset	CO21522	CO21523	CO215248	CO215249	CO21533
Miehet	CO22522	CO22523	CO225248	CO225249	CO22533
Tytöt	CO11522	CO11523	CO115248	CO115249	CO11533
Pojat	CO12522	CO12523	CO125248	CO125249	CO12533

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Malli	Tuote / Tuotenro					
	Pitkä lahje ja lahje sukalla AUKI	Pitkä lahje ja lahje sukalla KIINNI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI
Naiset	CO215348	CO215349	CO21524FG8	CO21524FG9	CO21534FG8	CO21534FG9
Miehet	CO225348	CO225349	CO22524FG8	CO22524FG9	CO22534FG8	CO22534FG9
Tytöt	CO115348	CO115349	CO11524FG8	CO11524FG9	CO11534FG8	CO11534FG9
Pojat	CO125348	CO125349	CO12524FG8	CO12524FG9	CO12534FG8	CO12534FG9

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

SUKKAHOUSUT						MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro					
	Kärjet AUKI	Kärjet KIINNI	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät KIINNI	Varvassukilla, varpaanpäät AUKI	Varvassukilla, varpaanpäät KIINNI
Naiset	CO215448	CO215449	CO21544FG8	CO21544FG9	CO21544FG28	CO21544FG29
Miehet	CO225448	CO225449	CO22544FG8	CO22544FG9	CO22544FG28	CO22544FG29
Tytöt	CO115448	CO115449	CO11544FG8	CO11544FG9	CO11544FG28	CO11544FG29
Pojat	CO125448	CO125449	CO12544FG8	CO12544FG9	CO12544FG28	CO12544FG29

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STCO21514F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STCO21514HWF1

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Normaali- ja korkeavyötäröisiä malleja on saatavilla eri lahjepituuksilla. Saatavilla myös lisäpainevaihtoehtoja (FS, FNS, NI) genitaalialueelle.

Suosittelut lisävalinta: olkaimet.

**Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta ja reiden ylimmästä kohdasta.*

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Kompressioluokka:	Ccl 2
Viimeistelyt:	Vyötärö SIL 1, Lahkeensuut ELA 2

Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
STCO21514FNSF1 ABS

Kuva: normaali vyötärö,
lisäpaineläppä FNS-malli, olkaimet



NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT NORMAALI VYÖTÄRÖ						VAKIOKOKO
Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512F1	STCO21522F1	STCO21532F1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512F2	STCO21522F2	STCO21532F2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513F1	STCO21523F1	STCO21533F1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513F2	STCO21523F2	STCO21533F2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514F1	STCO21524F1	STCO21534F1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514F2	STCO21524F2	STCO21534F2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515F1	STCO21525F1	STCO21535F1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515F2	STCO21525F2	STCO21535F2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516F1	STCO21526F1	STCO21536F1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516F2	STCO21526F2	STCO21536F2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517F1	STCO21527F1	STCO21537F1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517F2	STCO21527F2	STCO21537F2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518F1	STCO21528F1	STCO21538F1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518F2	STCO21528F2	STCO21538F2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519F1	STCO21529F1	STCO21539F1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519F2	STCO21529F2	STCO21539F2

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT NORMAALI VYÖTÄRÖ						VAKIOKOKO
Lisäpaineläppä kankaasta, tarrasaätö						
Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512FSF1	STCO21522FSF1	STCO21532FSF1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512FSF2	STCO21522FSF2	STCO21532FSF2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513FSF1	STCO21523FSF1	STCO21533FSF1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513FSF2	STCO21523FSF2	STCO21533FSF2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514FSF1	STCO21524FSF1	STCO21534FSF1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514FSF2	STCO21524FSF2	STCO21534FSF2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515FSF1	STCO21525FSF1	STCO21535FSF1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515FSF2	STCO21525FSF2	STCO21535FSF2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516FSF1	STCO21526FSF1	STCO21536FSF1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516FSF2	STCO21526FSF2	STCO21536FSF2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517FSF1	STCO21527FSF1	STCO21537FSF1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517FSF2	STCO21527FSF2	STCO21537FSF2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518FSF1	STCO21528FSF1	STCO21538FSF1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518FSF2	STCO21528FSF2	STCO21538FSF2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519FSF1	STCO21529FSF1	STCO21539FSF1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519FSF2	STCO21529FSF2	STCO21539FSF2

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ

Lisäpaineläppä neopreenivahvikkeella, tarrasäästö

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512FNSF1	STCO21522FNSF1	STCO21532FNSF1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512FNSF2	STCO21522FNSF2	STCO21532FNSF2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513FNSF1	STCO21523FNSF1	STCO21533FNSF1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513FNSF2	STCO21523FNSF2	STCO21533FNSF2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514FNSF1	STCO21524FNSF1	STCO21534FNSF1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514FNSF2	STCO21524FNSF2	STCO21534FNSF2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515FNSF1	STCO21525FNSF1	STCO21535FNSF1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515FNSF2	STCO21525FNSF2	STCO21535FNSF2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516FNSF1	STCO21526FNSF1	STCO21536FNSF1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516FNSF2	STCO21526FNSF2	STCO21536FNSF2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517FNSF1	STCO21527FNSF1	STCO21537FNSF1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517FNSF2	STCO21527FNSF2	STCO21537FNSF2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518FNSF1	STCO21528FNSF1	STCO21538FNSF1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518FNSF2	STCO21528FNSF2	STCO21538FNSF2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519FNSF1	STCO21529FNSF1	STCO21539FNSF1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519FNSF2	STCO21529FNSF2	STCO21539FNSF2

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ

Kiinteä neopreenitasku genitaalialueelle

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512NIF1	STCO21522NIF1	STCO21532NIF1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512NIF2	STCO21522NIF2	STCO21532NIF2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513NIF1	STCO21523NIF1	STCO21533NIF1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513NIF2	STCO21523NIF2	STCO21533NIF2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514NIF1	STCO21524NIF1	STCO21534NIF1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514NIF2	STCO21524NIF2	STCO21534NIF2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515NIF1	STCO21525NIF1	STCO21535NIF1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515NIF2	STCO21525NIF2	STCO21535NIF2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516NIF1	STCO21526NIF1	STCO21536NIF1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516NIF2	STCO21526NIF2	STCO21536NIF2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517NIF1	STCO21527NIF1	STCO21537NIF1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517NIF2	STCO21527NIF2	STCO21537NIF2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518NIF1	STCO21528NIF1	STCO21538NIF1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518NIF2	STCO21528NIF2	STCO21538NIF2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519NIF1	STCO21529NIF1	STCO21539NIF1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519NIF2	STCO21529NIF2	STCO21539NIF2

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT | KORKEA VYÖTÄRÖ

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512HWF1	STCO21522HWF1	STCO21532HWF1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512HWF2	STCO21522HWF2	STCO21532HWF2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513HWF1	STCO21523HWF1	STCO21533HWF1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513HWF2	STCO21523HWF2	STCO21533HWF2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514HWF1	STCO21524HWF1	STCO21534HWF1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514HWF2	STCO21524HWF2	STCO21534HWF2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515HWF1	STCO21525HWF1	STCO21535HWF1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515HWF2	STCO21525HWF2	STCO21535HWF2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516HWF1	STCO21526HWF1	STCO21536HWF1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516HWF2	STCO21526HWF2	STCO21536HWF2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517HWF1	STCO21527HWF1	STCO21537HWF1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517HWF2	STCO21527HWF2	STCO21537HWF2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518HWF1	STCO21528HWF1	STCO21538HWF1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518HWF2	STCO21528HWF2	STCO21538HWF2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519HWF1	STCO21529HWF1	STCO21539HWF1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519HWF2	STCO21529HWF2	STCO21539HWF2

NAISTEN KOMPRESSIOHOUSUT | KORKEA VYÖTÄRÖ

Kiinteä neopreenitasku genitaalialueelle

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCO21512HWNIF1	STCO21522HWNIF1	STCO21532HWNIF1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCO21512HWNIF2	STCO21522HWNIF2	STCO21532HWNIF2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCO21513HWNIF1	STCO21523HWNIF1	STCO21533HWNIF1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCO21513HWNIF2	STCO21523HWNIF2	STCO21533HWNIF2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCO21514HWNIF1	STCO21524HWNIF1	STCO21534HWNIF1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCO21514HWNIF2	STCO21524HWNIF2	STCO21534HWNIF2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCO21515HWNIF1	STCO21525HWNIF1	STCO21535HWNIF1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCO21515HWNIF2	STCO21525HWNIF2	STCO21535HWNIF2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCO21516HWNIF1	STCO21526HWNIF1	STCO21536HWNIF1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCO21516HWNIF2	STCO21526HWNIF2	STCO21536HWNIF2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCO21517HWNIF1	STCO21527HWNIF1	STCO21537HWNIF1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCO21517HWNIF2	STCO21527HWNIF2	STCO21537HWNIF2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCO21518HWNIF1	STCO21528HWNIF1	STCO21538HWNIF1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCO21518HWNIF2	STCO21528HWNIF2	STCO21538HWNIF2
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STCO21519HWNIF1	STCO21529HWNIF1	STCO21539HWNIF1
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STCO21519HWNIF2	STCO21529HWNIF2	STCO21539HWNIF2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STCO22534F1

Tuotetieto:

Miesten kompressiohousu eri lahjepituuksilla.
Muotosauma etumuksessa.

Suositteltu lisävalinta: olkaimet.

**Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta ja reiden ylimmästä kohdasta.*

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Kompressioluokka:	Ccl 2
Viimeistelyt:	Vyötärö SIL 1, Lahkeensuut ELA 2

**MIESTEN KOMPRESSIOHOUSUT |
NORMAALI VYÖTÄRÖ**

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenumro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	84 - 89	55,0 - 57,5	Beige	STCO22512F1	STCO22522F1	STCO22532F1
XS	84 - 89	55,0 - 57,5	Musta	STCO22512F2	STCO22522F2	STCO22532F2
S	90 - 95	58,0 - 60,5	Beige	STCO22513F1	STCO22523F1	STCO22533F1
S	90 - 95	58,0 - 60,5	Musta	STCO22513F2	STCO22523F2	STCO22533F2
M	96 - 101	61,0 - 63,5	Beige	STCO22514F1	STCO22524F1	STCO22534F1
M	96 - 101	61,0 - 63,5	Musta	STCO22514F2	STCO22524F2	STCO22534F2
L	102 - 107	64,0 - 66,5	Beige	STCO22515F1	STCO22525F1	STCO22535F1
L	102 - 107	64,0 - 66,5	Musta	STCO22515F2	STCO22525F2	STCO22535F2
XL	108 - 114	67,0 - 69,5	Beige	STCO22516F1	STCO22526F1	STCO22536F1
XL	108 - 114	67,0 - 69,5	Musta	STCO22516F2	STCO22526F2	STCO22536F2
XXL	115 - 121	70,0 - 72,5	Beige	STCO22517F1	STCO22527F1	STCO22537F1
XXL	115 - 121	70,0 - 72,5	Musta	STCO22517F2	STCO22527F2	STCO22537F2

Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
STCO22534FSF1 ABS



Tuotetieto:

Housun etukappaleessa on aukko muotoilun sijaista, sekä avettava lisäpaineleppä tarrakiinnityksellä kannattelemaan genitaaleja.

Suosittelut lisävalinta: olkaimet.
*Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta ja reiden ylimmästä kohdasta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Kompressioluokka:	Ccl 2
Viimeistelyt:	Vyötärö SIL 1, Lahkeensuut ELA 2

MIESTEN KOMPRESSIOHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ

Lisäpaineleppä kankaasta, tarrakiinnitys

VAKIOKOKO

Malli	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	84 - 89	55,0 - 57,5	Beige	STCO22512FSF1	STCO22522FSF1	STCO22532FSF1
XS	84 - 89	55,0 - 57,5	Musta	STCO22512FSF2	STCO22522FSF2	STCO22532FSF2
S	90 - 95	58,0 - 60,5	Beige	STCO22513FSF1	STCO22523FSF1	STCO22533FSF1
S	90 - 95	58,0 - 60,5	Musta	STCO22513FSF2	STCO22523FSF2	STCO22533FSF2
M	96 - 101	61,0 - 63,5	Beige	STCO22514FSF1	STCO22524FSF1	STCO22534FSF1
M	96 - 101	61,0 - 63,5	Musta	STCO22514FSF2	STCO22524FSF2	STCO22534FSF2
L	102 - 107	64,0 - 66,5	Beige	STCO22515FSF1	STCO22525FSF1	STCO22535FSF1
L	102 - 107	64,0 - 66,5	Musta	STCO22515FSF2	STCO22525FSF2	STCO22535FSF2
XL	108 - 114	67,0 - 69,5	Beige	STCO22516FSF1	STCO22526FSF1	STCO22536FSF1
XL	108 - 114	67,0 - 69,5	Musta	STCO22516FSF2	STCO22526FSF2	STCO22536FSF2
XXL	115 - 121	70,0 - 72,5	Beige	STCO22517FSF1	STCO22527FSF1	STCO22537FSF1
XXL	115 - 121	70,0 - 72,5	Musta	STCO22517FSF2	STCO22527FSF2	STCO22537FSF2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STCO22504F2

SUSPENSORI				VAKIOKOKO
Koko	Tilavuusarvio dl	Korkeus cm	Pituus cm	Tuotenro
S	6	18	120	STCO22503F2
M	8	18	120	STCO22504F2
L	12	18	120	STCO22505F2
XL	14	18	120	STCO22506F2

Tuotetieto:

Suspensori miesten genitaalialueen turvotuksen hoitoon. Suspensorissa säädettävä tarrakiinnitys ja säädettävät remmit.

Materiaali:	Polyamidi-elastaanineulos, tarrapintainen tukivyönauha
Väri:	Musta
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys
Viimeistelyt:	Etumuksen reuna ELA 3, Remmit; tarrapintainen remmi

PENISPUTKI		MITTATILAUS
Malli	Kärki	Tuotenro
Aikuiset	Kiinni	CO22809
Aikuiset	Auki	CO22808
Lapset	Kiinni	CO12809
Lapset	Auki	CO12808

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Putken tyvessä anatominen muotoilu. Suosittelemme tarrakiinnitystä pukemista helpottamaan.

Jos peniksen ympärysmitta on yli 20 cm, tuote hinnoitellaan tapauskohtaisesti.


Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys erikseen tilattavissa*
Viimeistely:	Raakareuna



* Tarran värit: beige, musta tai valkoinen, joka valitaan tuotannossa.

Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO22808F1

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STCOM21534F2

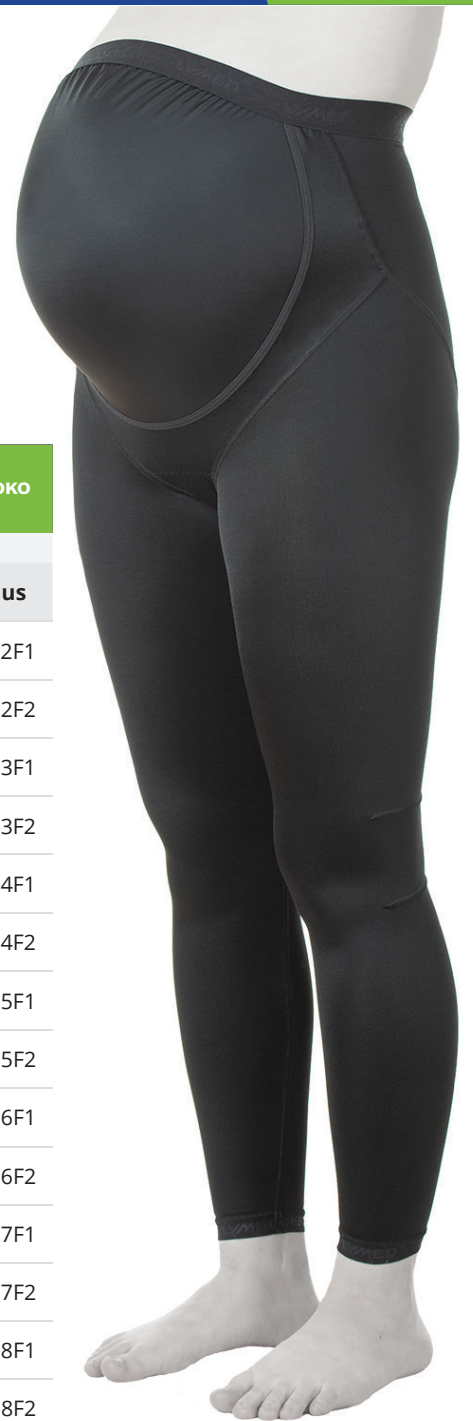

RASKAUSHOUSUT						
Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio (cm)	Reisi (cm)		Polvipituus	Pohjepituus	Nilkkapituus
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Beige	STCOM21512F1	STCOM21522F1	STCOM21532F1
XS	86 - 90	50,0 - 52,5	Musta	STCOM21512F2	STCOM21522F2	STCOM21532F2
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Beige	STCOM21513F1	STCOM21523F1	STCOM21533F1
S	91 - 95	53,0 - 56,0	Musta	STCOM21513F2	STCOM21523F2	STCOM21533F2
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Beige	STCOM21514F1	STCOM21524F1	STCOM21534F1
M	96 - 101	56,5 - 59,0	Musta	STCOM21514F2	STCOM21524F2	STCOM21534F2
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Beige	STCOM21515F1	STCOM21525F1	STCOM21535F1
L	102 - 110	59,5 - 62,0	Musta	STCOM21515F2	STCOM21525F2	STCOM21535F2
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Beige	STCOM21516F1	STCOM21526F1	STCOM21536F1
XL	111 - 121	62,5 - 65,0	Musta	STCOM21516F2	STCOM21526F2	STCOM21536F2
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Beige	STCOM21517F1	STCOM21527F1	STCOM21537F1
XXL	122 - 132	65,5 - 68,0	Musta	STCOM21517F2	STCOM21527F2	STCOM21537F2
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Beige	STCOM21518F1	STCOM21528F1	STCOM21538F1
XXXL	133 - 138	68,5 - 71,5	Musta	STCOM21518F2	STCOM21528F2	STCOM21538F2

Tuotetieto:

Raskausmallisessa tuotteessa on joustavampi vatsaosaa kasvavalle vatsalle. Vatsaosaa mukautuu useimpien odottajien vatsan mitoilta raskauden keskivaiheesta raskauden loppuvaiheeseen asti.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Vatsaosaa: Kevyt
Kompressioluokka:	Beige, musta
Viimeistelyt:	Ccl 2
	Vyötärö SIL 1
	Lahkeensuut ELA 2

Vinkki!
Voidaan käyttää yhdessä raskaustukivyön tai rintaliivien kanssa.





Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO20603F6



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO20603F1

JALKAPUTKI			MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Nilkka-polvi	Polvi-reisi	Nilkka-reisi
Aikuiset	CO20601	CO20602	CO20603
Lapset	CO10601	CO10602	CO10603

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Jalkaputkessa on anatominen, muotoilu polvitaiteen alueella. Kun tuote tilataan vahvasta kankaasta kompressioluokassa CCL 1-2, polvitaiteen muotoilu valmistetaan keskivahvasta kankaasta.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 4, alareuna ELA 2
	Nilkka-polvi-mallissa yläreuna SIL 1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
CO20619F4

Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
CO20639F4 A20B

Kuvan tuotteen ja lisävalinnan tilauskoodi:
CO20629F4 AZ



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
COA20T9F2

SUKKA MITTATILAUS

Malli	Kärki / Varpaanpäät	Tuote / Tuotenro		
		Nilkkapituus	Polvipituus	Reisipituus
Aikuiset	Kiinni	CO20619	CO20629	CO20639
Aikuiset	Auki	CO20618	CO20628	CO20638
Aikuiset	Varvassukka, kiinni	CO20619FG	CO20629FG	CO20639FG
Aikuiset	Varvassukka, auki	CO20618FG	CO20628FG	CO20638FG
Lapset	Kiinni	CO10619	CO10629	CO10639
Lapset	Auki	CO10618	CO10628	CO10638
Lapset	Varvassukka, kiinni	CO10619FG	CO10629FG	CO10639FG
Lapset	Varvassukka, auki	CO10618FG	CO10628FG	CO10638FG

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Sukissa anatomiset muotoilut nilkassa ja polvitaipessa. Tilattaessa tuote vahvalla kankaalla kompressiolla ccl 1-2, valmistetaan nilkan ja polvitaipen muotoilut keskivahvasta kankaasta.

Avokärkisissä sukissa kärki on kevyesti viistottu.

Nilkkasukkan varren pituus mitataan L/R61-ympärysmittasta ylöspäin. Huomioithan, että varren pituus voi olla enintään L/R67-mitan suuruinen

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Nilkkasukka: yläreuna SIL 1, polvisukka: yläreuna SIL 1, reisisukka: yläreuna SIL 4, kärki auki: sukan suu ELA 2.

VARVIKAS MITTATILAUS

Malli	Varpaanpäät	Tuotenro
Aikuiset	Kiinni	COA20T9
Aikuiset	Auki	COA20T8
Lapset	Kiinni	COA10T9
Lapset	Auki	COA10T8

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Käytetään jalkaterän ja varpaiden alueen hoitoon. Voidaan käyttää itsenäisenä tuotteena tai yhdessä avokärkisen sukan kanssa.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Viimeistelyt:	Raakareuna



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO20303F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO2031038F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO2031138F1

HIHAPUTKI		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Ranne- kynärpää	Kynärpää- kainalo	Ranne- kainalo
Aikuiset	CO20301	CO20302	CO20303
Lapset	CO10301	CO10302	CO10303

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Ranne-kainalo-mallissa anatominen kynärtaive.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1 Alareuna ELA 2

HIHA-KÄMMENKÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Peukalo	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	CO2031019	CO2031039
Aikuiset	Auki	CO2031018	CO2031038
Lapset	Kiinni	CO1031019	CO1031039
Lapset	Auki	CO1031018	CO1031038

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kynärtaive. Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1 Alareuna ELA 2

HIHA-KÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Sormen- päät	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	CO2031119	CO2031139
Aikuiset	Auki	CO2031118	CO2031138
Lapset	Kiinni	CO1031119	CO1031139
Lapset	Auki	CO1031118	CO1031138

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kynärtaive. Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 1

HIHAKIINNITYS MALLI 1

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 1 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S1
Lapset	A10S1


Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys rinnan alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Sopii erityisesti isorintaisille. Kiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha. Naisten hihassa rintaliivin olkaimen pidike.

Materiaali: ELA 1

Väri: Sama kuin hihan väri

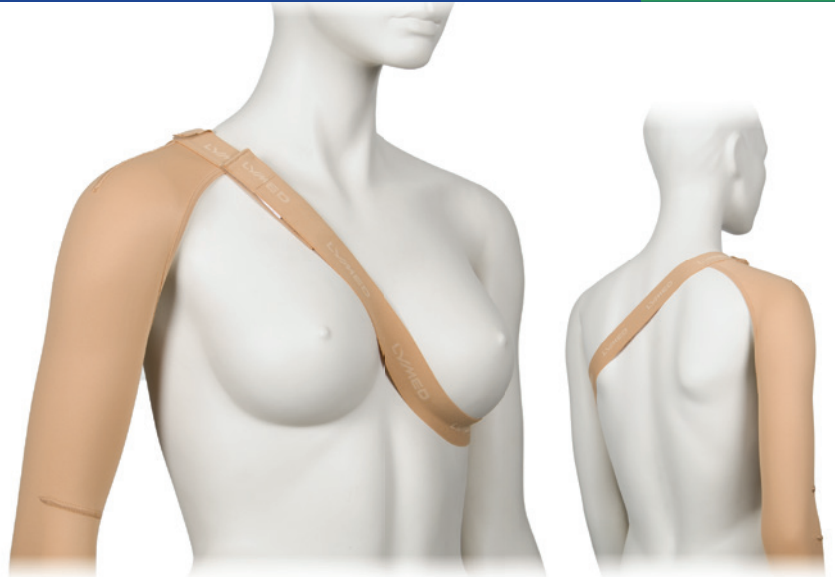

HIHAKIINNITYS MALLI 2

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 2 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S2
Lapset	A10S2


Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys kainalon alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Kiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha.

Materiaali: ELA 1

Väri: Sama kuin hihan väri

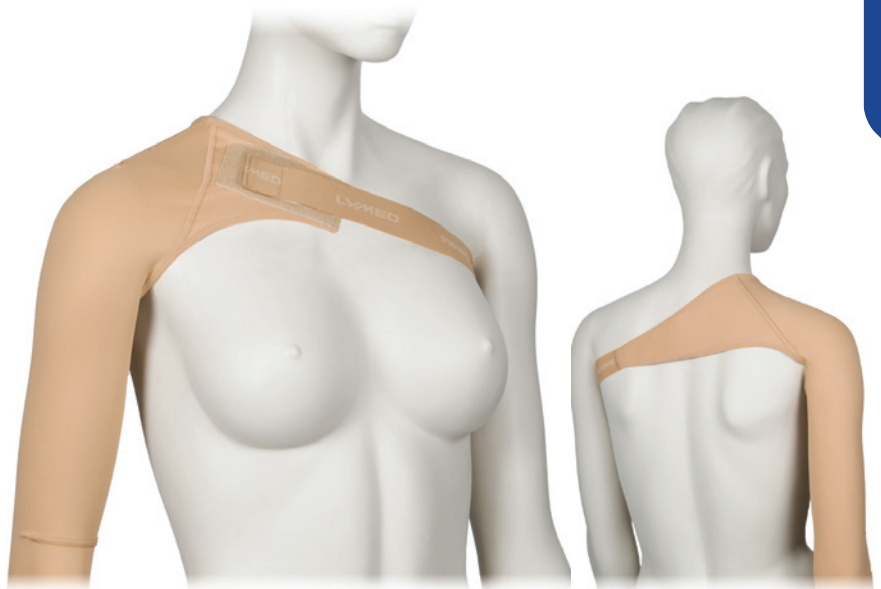

HIHAKIINNITYS MALLI 3

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 3 - Vastahiha	
Aikuiset	A20S3
Lapset	A10S3

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Hihakiinnitysmallissa vastahiha yhdistää kaksi kainalopituista hihaa. Malli soveltuu tilanteisiin, joissa hihan tai hihojen paikallaan pysyminen on haastavaa. Vastahihamallia voidaan käyttää eri kokoonpanoissa: yhdistämään kaksi hihaa tai tukemaan yhden hihan paikallaan pysymistä. Kiinnityksen yhteydessä tilataan kaksi hihaa. Jos tilattavat hihat ovat eri materiaaleista, kiinnitysosa valmistetaan oletuksena kevyemmän materiaalin mukaisesti.


Materiaali: Keskivahva tai vahva

Väri: Sama kuin hihan väri

Kiinnitys: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Pääntie ELA 3

Viimeistelyt: Alareuna SIL 2

Hihansuut ELA 2

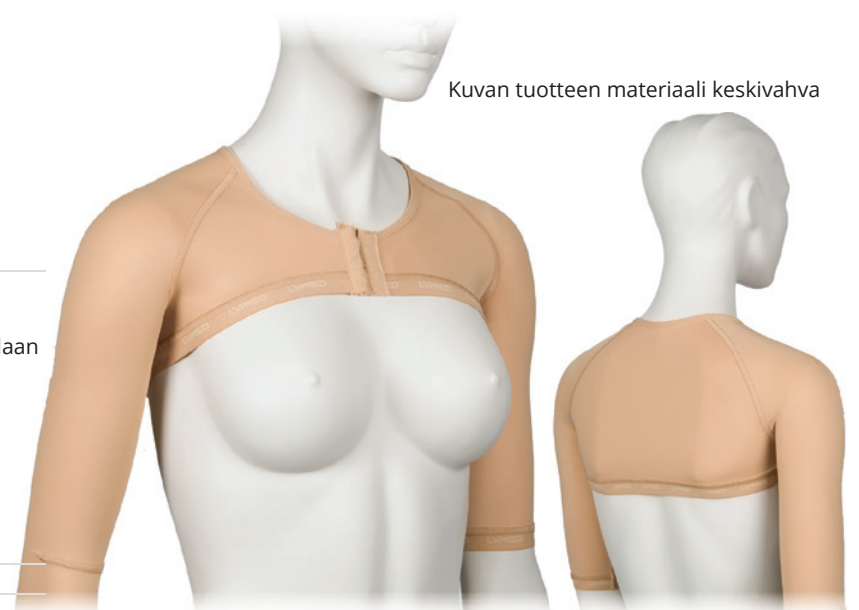

Kuvan tuotteen materiaali keskivahva

Katso myös paitamalli s.58

KÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Sormenpäät kiinni	Sormenpäät auki	
Aikuiset	CO203119	CO203118	
Lapset	CO103119	CO103118	

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella. Kämmenselän saumojen määrä voi vaihdella yksilöllisten mittojen ja kompressioluokan mukaan.

Tilaa hiha-käsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali:	Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)
Värit:	Kaikki
Kompressioluokka:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodit:
CO203119F1 (mittatilaus)
STCO31194RF1 (vakiokoko)

KÄSINE			VAKIOKOKO			
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
	cm		Sormenpäät kiinni		Sormenpäät auki	
			Oikea	Vasen	Oikea	Vasen
XXS	14 - 16	Beige	STCO31191RF1	STCO31191LF1	STCO31181RF1	STCO31181LF1
XXS	14 - 16	Musta	STCO31191RF2	STCO31191LF2	STCO31181RF2	STCO31181LF2
XS	17 - 18	Beige	STCO31192RF1	STCO31192LF1	STCO31182RF1	STCO31182LF1
XS	17 - 18	Musta	STCO31192RF2	STCO31192LF2	STCO31182RF2	STCO31182LF2
S	19 - 20	Beige	STCO31193RF1	STCO31193LF1	STCO31183RF1	STCO31183LF1
S	19 - 20	Musta	STCO31193RF2	STCO31193LF2	STCO31183RF2	STCO31183LF2
M	21 - 22	Beige	STCO31194RF1	STCO31194LF1	STCO31184RF1	STCO31184LF1
M	21 - 22	Musta	STCO31194RF2	STCO31194LF2	STCO31184RF2	STCO31184LF2
L	23 - 24	Beige	STCO31195RF1	STCO31195LF1	STCO31185RF1	STCO31185LF1
L	23 - 24	Musta	STCO31195RF2	STCO31195LF2	STCO31185RF2	STCO31185LF2
XL	25 - 26	Beige	STCO31196RF1	STCO31196LF1	STCO31186RF1	STCO31186LF1
XL	25 - 26	Musta	STCO31196RF2	STCO31196LF2	STCO31186RF2	STCO31186LF2
XXL	27 - 28	Beige	STCO31197RF1	STCO31197LF1	STCO31187RF1	STCO31187LF1
XXL	27 - 28	Musta	STCO31197RF2	STCO31197LF2	STCO31187RF2	STCO31187LF2

Kuvan tuotteen tilauskoodit:
CO203118F1 (mittatilaus)
STCO31184RF1 (vakiokoko)

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä.
*Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige, musta
Kompressioluokka:	Ccl 2
	Käsineen suu ELA 3
Viimeistelyt:	Avoimissa sormenpäässä osittainen huollittelu



Kuvan tuotteen tilauskoodit:
CO203108F1 (mittatilaus)
STCO3104RF1 (vakiokoko)

KÄMMENKÄSINE		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenumero	
	Peukalonpää kiinni	Peukalonpää auki
Aikuiset	CO203109	CO203108
Lapset	CO103109	CO103108

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.

Tilaa hiha-kämmenkäsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali: Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)

Värit: Kaikki

Kompressioluokka: Valittavissa

Kiinnitys: Erikseen tilattavissa

Viimeistelyt: Käsineen suu ELA 3

Kämmenen reuna ELA 2

KÄMMENKÄSINE			VAKIOKOKO	
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenumero	
	cm		Oikea	Vasen
XXS	14 - 16	Beige	STCO3101RF1	STCO3101LF1
XXS	14 - 16	Musta	STCO3101RF2	STCO3101LF2
XS	17 - 18	Beige	STCO3102RF1	STCO3102LF1
XS	17 - 18	Musta	STCO3102RF2	STCO3102LF2
S	19 - 20	Beige	STCO3103RF1	STCO3103LF1
S	19 - 20	Musta	STCO3103RF2	STCO3103LF2
M	21 - 22	Beige	STCO3104RF1	STCO3104LF1
M	21 - 22	Musta	STCO3104RF2	STCO3104LF2
L	23 - 24	Beige	STCO3105RF1	STCO3105LF1
L	23 - 24	Musta	STCO3105RF2	STCO3105LF2
XL	25 - 26	Beige	STCO3106RF1	STCO3106LF1
XL	25 - 26	Musta	STCO3106RF2	STCO3106LF2
XXL	27 - 28	Beige	STCO3107RF1	STCO3107LF1
XXL	27 - 28	Musta	STCO3107RF2	STCO3107LF2

Tuotetieto:

*Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.

Materiaali: Vahva

Värit: Beige, musta

Kompressioluokka: Ccl 2

Viimeistelyt: Käsineen suu ELA 3

Kämmenen reuna ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO2011F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO2012F1

PÄÄHINE		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
	Kiertää korvat	Peittää korvat
Aikuiset	CO2011	CO2012
Lapset	CO1011	CO1012

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys niskassa ja päällealla.

Materiaali: Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)

Värit: Kaikki

Kompressioluokka: Säädettävä

Kiinnitys: Tarrakiinnitys niskassa ja päällealla

Kompressioluokka: Kaikki saatavilla

Viimeistelyt: Reunat ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO20138F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: CO20139F1

HUPPU		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
	Kasvot auki	Kasvot kiinni
Aikuiset	CO20138	CO20139
Lapset	CO10138	CO10139

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kaksi eri mallia joista toisessa kasvojen alue kiinni. Kasvot kiinni -mallin kasvo-osa on tarkoitettu arven ja haavanhoitotuotteiden, sidosten tai kasvomaskin paikallaan pitämiseen. Kasvo-osaan voidaan tarvittaessa leikata reiät suun, nenän ja silmien alueelle. Materiaali ei purkaudu leikkaamisen jälkeen.

Materiaali: Vahva (Ccl 1-4) tai keskivahva (Ccl 1-3)

Värit: Kaikki

Kompressioluokka: Kaikki saatavilla

1-riviset hakaset /

Kiinnitys: vetoketju sisäpehmusteella

Takaraivolta niskaan

Viimeistelyt: Reunat ELA 3

SENSE™

NEUROLOGISET PAINEVAATTEET

MITTATILAUS

VAKIOKOKO





Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
SEE10422F5

PAREESIPAITA		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	SEE21422	SEE21423	SEE21433
Miehet	SEE22422	SEE22423	SEE22433
Lapset	SEE10422	SEE10423	SEE10433

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Tuote on tarkoitettu Erbin ja serratuspareesin yhteydessä käytettäväksi. Säädettävä, joustava tarranauhaveto sekä neopreenivahvike lapaluun ja olan alueella. Vedot on rakennettu elastaaninauhasta. Saatavilla lisävalintana molemminpuolinen scapulatuki. Pitkähiihaisessa paidassa anatomiset kynnärtaipeet. Tuotteessa on kainaloalueen muotoilut kevyestä kankaasta. Naisten paidassa on rintojen muotosaumot. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloitusetta erikseen pyydettyäessä.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella Alareuna SIL 1
Viimeistelyt:	Pääntie ELA 3 Hihansuut ELA 2


PAREESIBODY		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Lapset	SEE104022	SEE104023	SEE104033

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Tuote on tarkoitettu Erbin ja serratuspareesin yhteydessä käytettäväksi. Säädettävä, joustava tarranauhaveto sekä neopreenivahvike lapaluun ja olan alueella. Vedot on rakennettu elastaaninauhasta. Saatavana molemminpuolisella scapulatuella ja lyhyillä lahkeilla. Haarassa säädettävä neppari kiinnitys. Pitkähiihaisessa bodyssa anatomiset kynnärtaipeet. Tuotteessa on kainaloalueen muotoilut kevyestä kankaasta.

Materiaali:	Vahva tai keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella. Haarassa säädettävät 2-riviset painonapit Lyhyet lahkeet: haarassa 1-riviset painonapit
Viimeistelyt:	Pääntie ja lahkeen suut ELA 3 Hihansuut ELA 2 Lyhyet lahkeet: ELA 2

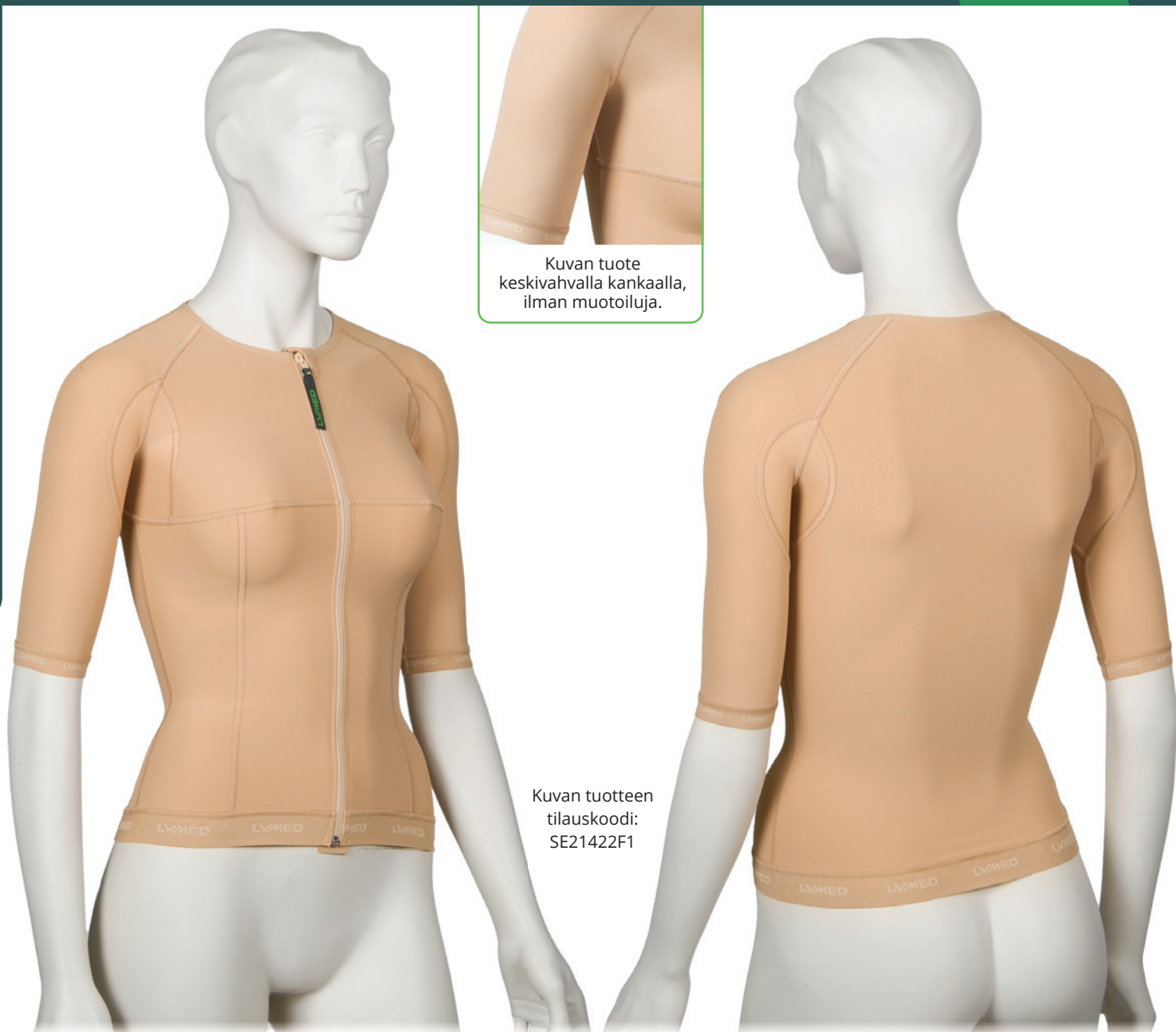

Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman muotoiluja.

Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE21422F1

PAITA		MITTATILAUS		
Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihaton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	SE21411	SE21422	SE21423	SE21433
Miehet	SE22411	SE22422	SE22423	SE22433
Lapset	SE10411	SE10422	SE10423	SE10433

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa paidassa anatomiset kyynärtaive-muotoilut. Vahvan kankaan tuotteeseen valmistetaan kainaloalueen muotoilut kevyestä kankaasta. Keskivahvan ja kevyen kankaan tuotteessa ei ole kainalomuotoiluja. Naisten paidassa rintojen muotosaumot. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydettyäessä.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)

Värit: Kaikki

Painetaso: Valittavissa

Kiinnitys: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella / ei kiinnitystä

Paidan alareuna SIL 1

Pääntie ELA 3

Viimeistelyt: Hihansuut ELA 2

Hihattoman kädentiet ELA 3

Saatavilla myös erillinen vatsatuki kankaasta: katso tuotetiedot Skin-tuoteryhmästä sivu 41



Kuvan tuote keskivahvalla kankaalla, ilman muotoiluja.

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
SE1045333F6

HAALARI

MITTATILAUS

Malli Tuote / Tuotenro

Pitkät hihat ja lahkeet

Lapset SE10453333

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Haalarissa anatomiset kyynär- ja polvitaiepeet. Vahvan kankaan tuotteessa kainalomuotoilut kevyestä kankaasta. Keskivahvan ja kevyen kankaan tuotteessa ei ole kainalomuotoiluja.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)

Värit: Kaikki

Painetaso: Valittavissa

Kiinnitys: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Pääntie ELA 3

Viimeistelyt: Lahkeensuut ELA 2
Hihansuut ELA 2



Kuvan tuotteen ja
lisävalinnan tilauskoodi:
SE104011F5 SEA10L

BODY		MITTATILAUS		
Malli	Tuote / Tuotenro			
	Hihaton	Lyhyet hihat	Pitkä ja lyhyt hiha	Pitkät hihat
Naiset	SE214011	SE214022	SE214023	SE214033
Lapset	SE104011	SE104022	SE104023	SE104033

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Pitkähihaisessa bodyssa on anatomiset kyynärtaipeen muotoilut ja vahvan kankaan tuotteessa kainalomuotoilut kevyestä kankaasta. Keskivahvan ja kevyen kankaan tuotteessa ei ole kainalomuotoiluja. Naisten bodyssa on rintojen muotosaummat. Naisten malli on valmistettavissa ilman rintojen muotosaumoja veloituksetta erikseen pyydyttäessä. Lyhyet lahkeet tilattavissa lisävalintana.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Naiset: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella. Haarassa 2-riviset painonapit. Lyhyet lahkeet: ei haarakiinnitystä. Lapset: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella. Haarassa 2-riviset painonapit. Lyhyet lahkeet: 1-riviset painonapit.
Viimeistelyt:	Pääntie ja lahkeensuut ELA 3 Hihansuut ELA 2 Hihattoman kädentiet ELA 3 Lyhyet lahkeet ELA 2



Kuvan tuotteen
tilauskoodi: STSE404F7

**SÄÄDETTÄVÄ
TUKIBODY**

VAKIOKOKO

Koko Tuotenro Värikoodi

Lyhyet hihat


Koko	Tuotenro	Värikoodi
1	STSE401	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
2	STSE402	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
3	STSE403	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
4	STSE404	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
5	STSE405	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
6	STSE406	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
7	STSE407	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7

Koot	Mitat (cm)					
	B30	B11	B17	B2	B9	B12
1	80 - 86	24	30	43	40	42
2	84 - 90	25	31	47	43	45
3	88 - 96	26	33	51	46	48
4	94 - 102	27	35	55	49	52
5	100 - 108	28,5	37	59	52	56
6	107 - 115	30	39	63	55	60
7	114 - 122	31,5	41	67	58	64

Tuotetieto:

Tuotetta voidaan käyttää erityisesti apuvälineenä fysio- ja toimintaterapiassa. Säädettävä tarrakiinnitys selässä. Vatsan alueen kevyempi kangas tuo mukautuvuutta istuvuuteen. Kainaloissa anatomiset muotoilut keskivahvasta kankaasta. Haarassa säädettävä nepparikiinnitys.

Materiaali:	Vahva Vatsan alue: Keskivahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Takana tarrakiinnitys ja haarassa 3-rivinen nepparikiinnitys.
Viimeistelyt:	Pääntie ja lahkeensuut ELA 3, Hihansuut ELA 2

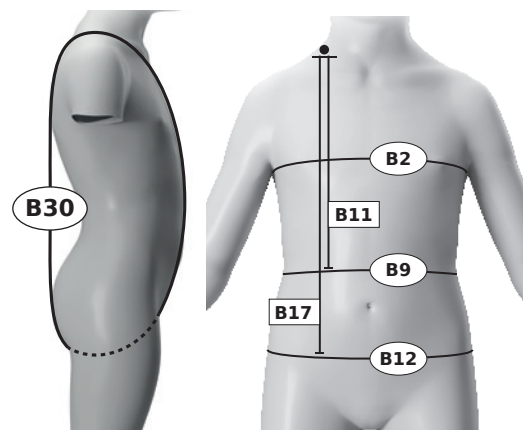



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
SE22522F4

Tuotetieto:

Pitkälahkeisessa housussa on anatominen muotoilu polvitaiteen alueella. Sukallisissa lahkeissa on anatominen muotoilu nilkan ja polvitaiteen alueella. Kun sukallinen lahje tilataan vahvasta materiaalista, muotoilut valmistetaan keskivahvasta materiaalista. Miesten malleissa on muotoilu etumuksessa.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Vyötärö ELA 1 Lahkeensuut ELA 2

HOUSUT

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro			
	Lyhyet lahkeet	Lyhyt ja pitkä lahje	Lyhyt lahje ja lahje sukalla AUKI	Lyhyt lahje ja lahje sukalla KIINNI
Naiset	SE21522	SE21523	SE215248	SE215249
Miehet	SE22522	SE22523	SE225248	SE225249
Tytöt	SE11522	SE11523	SE115248	SE115249
Pojat	SE12522	SE12523	SE125248	SE125249

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Malli	Tuote / Tuotenro						
	Pitkät lahkeet	Pitkä lahje ja lahje sukalla AUKI	Pitkä lahje ja lahje sukalla KIINNI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Lyhyt lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät AUKI	Pitkä lahje ja lahje varvassukalla, varpaanpäät KIINNI
Naiset	SE21533	SE215348	SE215349	SE21524FG8	SE21524FG9	SE21534FG8	SE21534FG9
Miehet	SE22533	SE225348	SE225349	SE22524FG8	SE22524FG9	SE22534FG8	SE22534FG9
Tytöt	SE11533	SE115348	SE115349	SE11524FG8	SE11524FG9	SE11534FG8	SE11534FG9
Pojat	SE12533	SE125348	SE125349	SE12524FG8	SE12524FG9	SE12534FG8	SE12534FG9

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

SUKKAHOUSUT

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro					
	Kärjet auki	Kärjet kiinni	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät auki	Toinen puoli varvassukalla, varpaanpäät kiinni	Varvassukilla, varpaanpäät auki	Varvassukilla, varpaanpäät kiinni
Naiset	SE215448	SE215449	SE21544FG8	SE21544FG9	SE21544FG28	SE21544FG29
Miehet	SE225448	SE225449	SE22544FG8	SE22544FG9	SE22544FG28	SE22544FG29
Tytöt	SE115448	SE115449	SE11544FG8	SE11544FG9	SE11544FG28	SE11544FG29
Pojat	SE125448	SE125449	SE12544FG8	SE12544FG9	SE12544FG28	SE12544FG29

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE20603F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE10639F5



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE10629F6

JALKAPUTKI		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Nilkka-polvi	Polvi-reisi	Nilkka-reisi
Aikuiset	SE20601	SE20602	SE20603
Lapset	SE10601	SE10602	SE10603

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Jalkaputkessa anatominen muotoilu polvitaipeen alueella. Kun tuote tilataan vahvasta kankaasta, polvitaipeen muotoilu valmistetaan keskivahvasta kankaasta.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 4, alareuna ELA 2 Nilkka-polvi-mallissa yläreuna SIL 1

SUKKA		MITTATILAUS		
Malli	Kärki / Varpaanpäät	Tuote / Tuotenro		
		Nilkkapituus	Polvi-pituus	Reisi-pituus
Aikuiset	Kiinni	SE20619	SE20629	SE20639
Aikuiset	Auki	SE20618	SE20628	SE20638
Aikuiset	Varvassukka, kiinni	SE20619FG	SE20629FG	SE20639FG
Aikuiset	Varvassukka, auki	SE20618FG	SE20628FG	SE20638FG
Lapset	Kiinni	SE10619	SE10629	SE10639
Lapset	Auki	SE10618	SE10628	SE10638
Lapset	Varvassukka, kiinni	SE10619FG	SE10629FG	SE10639FG
Lapset	Varvassukka, auki	SE10618FG	SE10628FG	SE10638FG

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Sukissa on anatomiset nilkan ja polvitaipeen muotoilut. Kun sukka tilataan vahvasta materiaalista, anatomiset muotoilut valmistetaan keskivahvasta materiaalista. Avokärkisessä sukassa kärki on kevyesti viistottu. Nilkkasukan varren pituus mitataan L/R61-ympärysmittasta ylöspäin. Huomioithan, että varren pituus voi olla enintään L/R67-mitan suuruinen.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Nilkkasukka: yläreuna SIL 1 Polvisukka: yläreuna SIL 1 Reisisukka: yläreuna SIL 4



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE20303F1

HIHAPUTKI		MITTATILAUS	
Malli	Tuote / Tuotenro		
	Ranne- kynärpää	Kynärpää- kainalo	Ranne- kainalo
Aikuiset	SE20301	SE20302	SE20303
Lapset	SE10301	SE10302	SE10303

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Ranne-kainalo-mallissa anatominen kyynärtaive.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)

Värit: Kaikki

Painetaso: Valittavissa

Kiinnitys: Erikseen tilattavissa

Viimeistelyt: Yläreuna SIL 1
Alareuna ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE2031038F1

HIHA-KÄMMENKÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Peukalo	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	SE2031019	SE2031039
Aikuiset	Auki	SE2031018	SE2031038
Lapset	Kiinni	SE1031019	SE1031039
Lapset	Auki	SE1031018	SE1031038

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kyynärtaive. Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)

Värit: Kaikki

Painetaso: Valittavissa

Kiinnitys: Erikseen tilattavissa

Viimeistelyt: Yläreuna SIL 1
Alareuna ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: SE2031138F1

HIHA-KÄSINE		MITTATILAUS	
Malli	Sormen- päät	Tuote / Tuotenro	
		Kynärpää- pituus	Kainalo- pituus
Aikuiset	Kiinni	SE2031119	SE2031139
Aikuiset	Auki	SE2031118	SE2031138
Lapset	Kiinni	SE1031119	SE1031139
Lapset	Auki	SE1031118	SE1031138

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Kainalopituudessa anatominen kyynärtaive. Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)

Värit: Kaikki

Painetaso: Valittavissa

Kiinnitys: Erikseen tilattavissa

Viimeistelyt: Yläreuna SIL 1

HIHAKIINNITYS MALLI 1

MITTATILAUS


Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 1 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S1
Lapset	A10S1

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys rinnan alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Sopii erityisesti isorintaisille. Kiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha. Naisten hihassa rintaliivin olkaimen pidike.

Materiaali: ELA 1
Väri: Sama kuin hihan väri

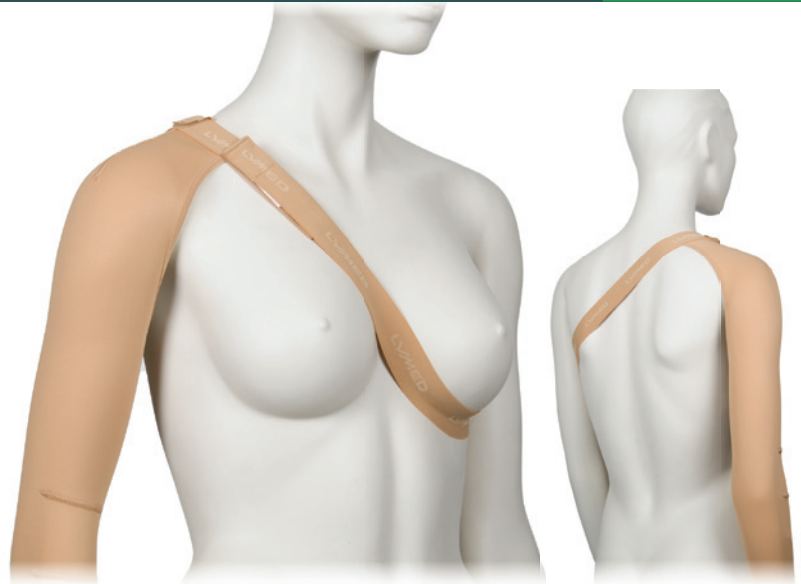

HIHAKIINNITYS MALLI 2

MITTATILAUS


Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 2 - Remmikiinnitys	
Aikuiset	A20S2
Lapset	A10S2

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Remmikiinnitys kainalon alta pitämään hihaa ylhäällä. Remmissä tarrakiinnitys. Kiinnityksen yhteydessä tilattava kainalopituinen hiha.

Materiaali: ELA 1
Väri: Sama kuin hihan väri

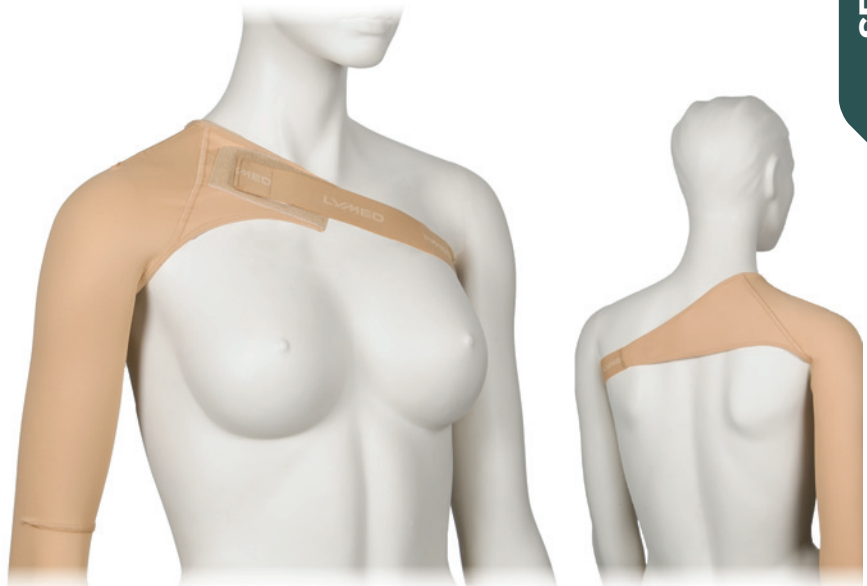

HIHAKIINNITYS MALLI 3

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro
Malli 3 - Vastahiha	
Aikuiset	A20S3
Lapset	A10S3


Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Hihakiinnitysmallissa vastahiha yhdistää kaksi kainalopituista hihaa. Malli soveltuu tilanteisiin, joissa hihan tai hihojen paikallaan pysyminen on haastavaa. Vastahihamallia voidaan käyttää eri kokoonpanoissa: yhdistämään kaksi hihaa tai tukemaan yhden hihan paikallaan pysymistä. Kiinnityksen yhteydessä tilataan kaksi hihaa. Jos tilattavat hihat ovat eri materiaaleista, kiinnitysosa valmistetaan oletuksena kevyemmän materiaalin mukaisesti.

Materiaali: Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieta paine)
Väri: Sama kuin hihan väri
Kiinnitys: 2-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella
Pääntie ELA 3
Viimeistelyt: Alareuna SIL 2
Hihansuut ELA 2

Kuvan tuotteen materiaali keskivahva

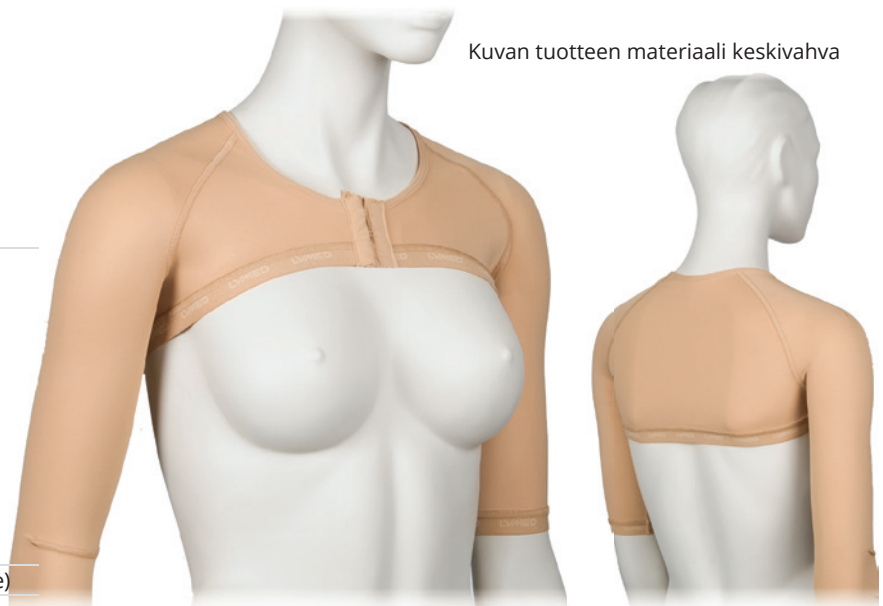

Katso myös paitamalli s.58



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
SE203119F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
SE203118F1

KÄSINE

MITTATILAUS

Malli	Tuote / Tuotenro	
	Sormenpäät kiinni	Sormenpäät auki
Aikuiset	SE203119	SE203118
Lapset	SE103119	SE103118

Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä ja peukalonhangan alueella. Kämmenselän saumojen määrä voi vaihdella yksilöllisten mittojen ja painetasojen mukaan. Tilaa hiha-käsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
SE203108F1

KÄMMENKÄSINE		MITTATILAUS
Malli	Tuote / Tuotenro	
	Peukalonpää kiinni	Peukalonpää auki
Aikuiset	SE203109	SE203108
Lapset	SE103109	SE103108
Lasten mallit valmistetaan alle 10-vuotiaille.		

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus peukalonhangan alueella.
Tilaa hiha-käsine, kun varren pituus on suurempi kuin kämmenen pituus.

Materiaali:	Vahva, keskivahva, kevyt (vain mieto paine)
Värit:	Kaikki
Painetaso:	Valittavissa
Kiinnitys:	Erikseen tilattavissa
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3 Kämmenen reuna ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STSE3115LF7

**KÄSINE
LASTATASKULLA**

VAKIOKOKO

Koko	Tuote / Tuotenumero		Värikoodi
	Oikea käsi	Vasen käsi	
1	STSE3111R	STSE3111L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
2	STSE3112R	STSE3112L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
3	STSE3113R	STSE3113L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
4	STSE3114R	STSE3114L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
5	STSE3115R	STSE3115L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
6	STSE3116R	STSE3116L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
7	STSE3117R	STSE3117L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
8	STSE3118R	STSE3118L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
9	STSE3119R	STSE3119L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
10	STSE31110R	STSE31110L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7

**KÄMMENKÄSINE
LASTATASKULLA**

VAKIOKOKO


Koko	Tuote / Tuotenumero		Värikoodi
	Oikea käsi	Vasen käsi	
1	STSE3101R	STSE3101L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
2	STSE3102R	STSE3102L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
3	STSE3103R	STSE3103L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
4	STSE3104R	STSE3104L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
5	STSE3105R	STSE3105L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
6	STSE3106R	STSE3106L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
7	STSE3107R	STSE3107L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
8	STSE3108R	STSE3108L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
9	STSE3109R	STSE3109L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7
10	STSE31010R	STSE31010L	F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7

Tuotetieto:

Sense-käsineessä ja -kämmentäsiineessä on vetoketjukiinnitys sekä lastatasku, johon voi tarvittaessa laittaa oman lisätuen. Tuote sopii käytettäväksi mm. erilaisten tonuspuutostilojen tai hemiplegian yhteydessä. Käsineessä sormenpäät auki. Kämmentäsiineessä peukalonpää auki.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Kaikki
Painetaso:	14 - 20 mmHg
Kiinnitys:	Vetoketju
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3

Koot	Mitat (cm)			
	MCP	L11	L16	L15
1	11	10,5	14	6
2	12	11	14,5	6
3	13	11,5	15,5	8,5
4	14	12	16	8,5
5	15	12,5	16,5	9
6	16	13,5	17	9
7	17	14,5	17,5	10
8	18	16	18,5	11
9	19	16,5	20	11
10	20	17,5	23	12

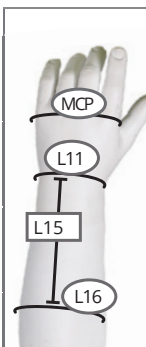

**Päähine
ja huppu
saatavilla:**

**Katso Skin-
tuoteryhmä
sivut 54-55**



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STSE3133RF1

CI-KÄSINE		VAKIOKOKO	
Koko	Ymp.mitta*	Tuote / Tuotenro	
	cm	Oikea	Vasen
1	12,0 - 13,5	STSE3131RF1	STSE3131LF1
2	13,5 - 15,0	STSE3132RF1	STSE3132LF1
3	15,0 - 16,5	STSE3133RF1	STSE3133LF1
4	16,5 - 18,0	STSE3134RF1	STSE3134LF1
5	18,0 - 19,5	STSE3135RF1	STSE3135LF1

Tuotetieto:

CI-käsine käytettäväksi terveessä kädessä pakotetun käytön liiketerapiassa.


*Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Beige
Painetaso:	Paineeton
Viimeistelyt:	Käsineen suu ELA 3

INTERIM & LIGHT™

KEVYT- JA ENSIPAINOVAATTEET

VAKIOKOKO

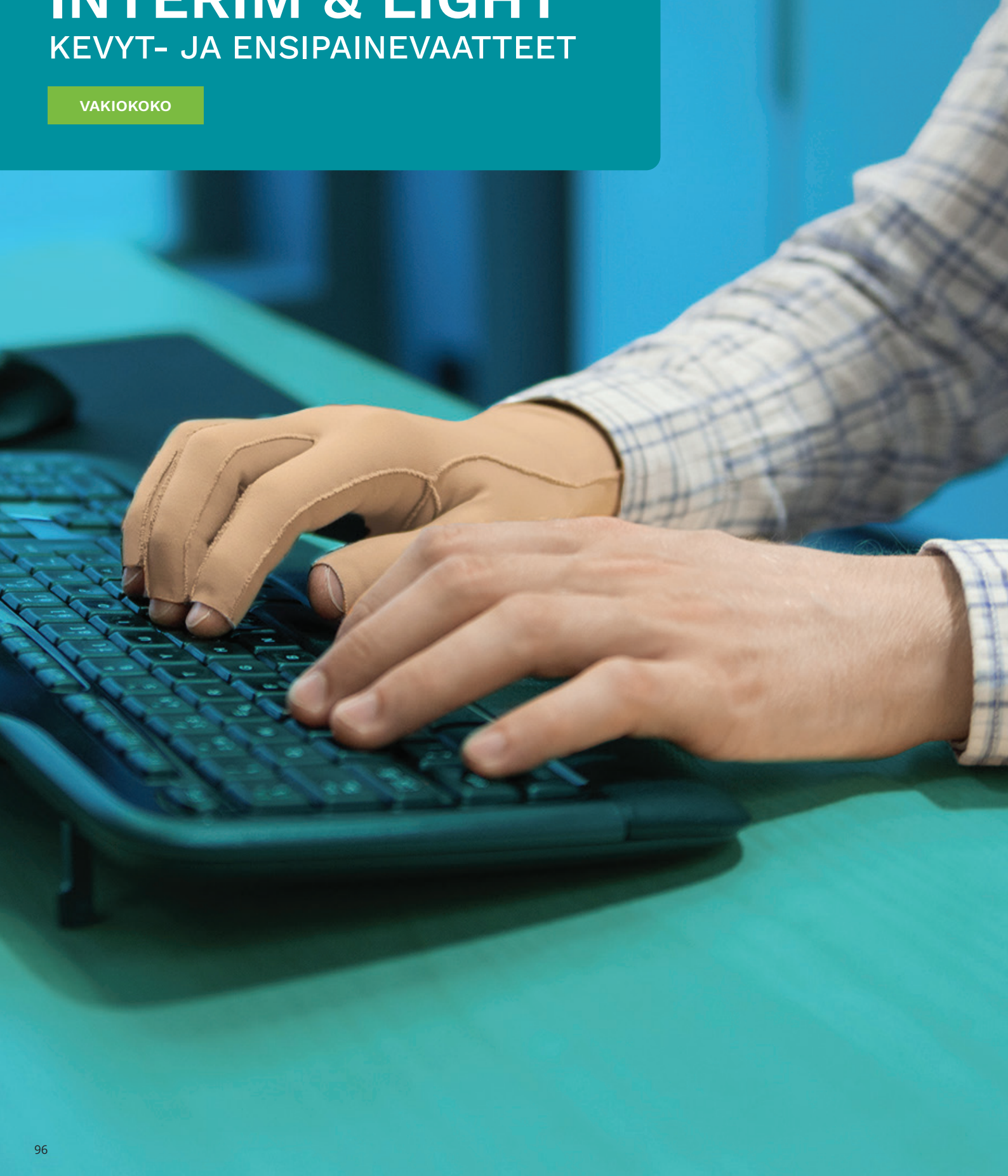



Tuotetieto:

Paita lyhyillä tai pitkillä hihoilla, reilusti lantiolle yltävä malli.

**Rintakehän ympärysmitta kainaloiden alta, rintojen yläpuolelta.*

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketjukiinnitys sisäpehmusteella
Viimeistelyt:	Pääntie ELA 3, alareuna SIL 1, hihansuut ELA 2

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN224226F1H

MIESTEN PAITA - HAKASILLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm		Lyhyet hihat	Pitkät hihat
1	81 - 84	Beige	STIN224221F1H	STIN224331F1H
1	81 - 84	Musta	STIN224221F2H	STIN224331F2H
2	85 - 88	Beige	STIN224222F1H	STIN224332F1H
2	85 - 88	Musta	STIN224222F2H	STIN224332F2H
3	89 - 92	Beige	STIN224223F1H	STIN224333F1H
3	89 - 92	Musta	STIN224223F2H	STIN224333F2H
4	93 - 96	Beige	STIN224224F1H	STIN224334F1H
4	93 - 96	Musta	STIN224224F2H	STIN224334F2H
5	97 - 100	Beige	STIN224225F1H	STIN224335F1H
5	97 - 100	Musta	STIN224225F2H	STIN224335F2H
6	101 - 104	Beige	STIN224226F1H	STIN224336F1H
6	101 - 104	Musta	STIN224226F2H	STIN224336F2H
7	105 - 108	Beige	STIN224227F1H	STIN224337F1H
7	105 - 108	Musta	STIN224227F2H	STIN224337F2H
8	109 - 112	Beige	STIN224228F1H	STIN224338F1H
8	109 - 112	Musta	STIN224228F2H	STIN224338F2H
9	113 - 116	Beige	STIN224229F1H	STIN224339F1H
9	113 - 116	Musta	STIN224229F2H	STIN224339F2H
10	117 - 120	Beige	STIN2242210F1H	STIN2243310F1H
10	117 - 120	Musta	STIN2242210F2H	STIN2243310F2H

MIESTEN PAITA - VETOKETJULLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm		Lyhyet hihat	Pitkät hihat
1	81 - 84	Beige	STIN224221F1Z	STIN224331F1Z
1	81 - 84	Musta	STIN224221F2Z	STIN224331F2Z
2	85 - 88	Beige	STIN224222F1Z	STIN224332F1Z
2	85 - 88	Musta	STIN224222F2Z	STIN224332F2Z
3	89 - 92	Beige	STIN224223F1Z	STIN224333F1Z
3	89 - 92	Musta	STIN224223F2Z	STIN224333F2Z
4	93 - 96	Beige	STIN224224F1Z	STIN224334F1Z
4	93 - 96	Musta	STIN224224F2Z	STIN224334F2Z
5	97 - 100	Beige	STIN224225F1Z	STIN224335F1Z
5	97 - 100	Musta	STIN224225F2Z	STIN224335F2Z
6	101 - 104	Beige	STIN224226F1Z	STIN224336F1Z
6	101 - 104	Musta	STIN224226F2Z	STIN224336F2Z
7	105 - 108	Beige	STIN224227F1Z	STIN224337F1Z
7	105 - 108	Musta	STIN224227F2Z	STIN224337F2Z
8	109 - 112	Beige	STIN224228F1Z	STIN224338F1Z
8	109 - 112	Musta	STIN224228F2Z	STIN224338F2Z
9	113 - 116	Beige	STIN224229F1Z	STIN224339F1Z
9	113 - 116	Musta	STIN224229F2Z	STIN224339F2Z
10	117 - 120	Beige	STIN2242210F1Z	STIN2243310F1Z
10	117 - 120	Musta	STIN2242210F2Z	STIN2243310F2Z


Tuotetieto:

Paita lyhyillä tai pitkällä hihoilla, reilusti lantiolle yltävä malli. Naisten paidassa muotosaumattomassa edessä.

**Rintakehän ympärysmitta kainaloiden alta, rintojen yläpuolelta.*

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketjukiinnitys sisäpehmusteella
Viimeistelyt:	Pääntie ELA 3, alareuna SIL 1, hihansuut ELA 2

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN214226F1H

NAISTEN PAITA - HAKASILLA
VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
			Lyhyet hihat	Pitkät hihat
	cm			
1	76 - 80	Beige	STIN214221F1H	STIN214331F1H
1	76 - 80	Musta	STIN214221F2H	STIN214331F2H
2	81 - 84	Beige	STIN214222F1H	STIN214332F1H
2	81 - 84	Musta	STIN214222F2H	STIN214332F2H
3	85 - 88	Beige	STIN214223F1H	STIN214333F1H
3	85 - 88	Musta	STIN214223F2H	STIN214333F2H
4	89 - 92	Beige	STIN214224F1H	STIN214334F1H
4	89 - 92	Musta	STIN214224F2H	STIN214334F2H
5	93 - 96	Beige	STIN214225F1H	STIN214335F1H
5	93 - 96	Musta	STIN214225F2H	STIN214335F2H
6	97 - 100	Beige	STIN214226F1H	STIN214336F1H
6	97 - 100	Musta	STIN214226F2H	STIN214336F2H
7	101 - 104	Beige	STIN214227F1H	STIN214337F1H
7	101 - 104	Musta	STIN214227F2H	STIN214337F2H
8	105 - 108	Beige	STIN214228F1H	STIN214338F1H
8	105 - 108	Musta	STIN214228F2H	STIN214338F2H
9	109 - 112	Beige	STIN214229F1H	STIN214339F1H
9	109 - 112	Musta	STIN214229F2H	STIN214339F2H
10	113 - 116	Beige	STIN2142210F1H	STIN2143310F1H
10	113 - 116	Musta	STIN2142210F2H	STIN2143310F2H
11	117 - 119	Beige	STIN2142211F1H	STIN2143311F1H
11	117 - 119	Musta	STIN2142211F2H	STIN2143311F2H

NAISTEN PAITA - VETOKETJULLA
VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
			Lyhyet hihat	Pitkät hihat
	cm			
1	76 - 80	Beige	STIN214221F1Z	STIN214331F1Z
1	76 - 80	Musta	STIN214221F2Z	STIN214331F2Z
2	81 - 84	Beige	STIN214222F1Z	STIN214332F1Z
2	81 - 84	Musta	STIN214222F2Z	STIN214332F2Z
3	85 - 88	Beige	STIN214223F1Z	STIN214333F1Z
3	85 - 88	Musta	STIN214223F2Z	STIN214333F2Z
4	89 - 92	Beige	STIN214224F1Z	STIN214334F1Z
4	89 - 92	Musta	STIN214224F2Z	STIN214334F2Z
5	93 - 96	Beige	STIN214225F1Z	STIN214335F1Z
5	93 - 96	Musta	STIN214225F2Z	STIN214335F2Z
6	97 - 100	Beige	STIN214226F1Z	STIN214336F1Z
6	97 - 100	Musta	STIN214226F2Z	STIN214336F2Z
7	101 - 104	Beige	STIN214227F1Z	STIN214337F1Z
7	101 - 104	Musta	STIN214227F2Z	STIN214337F2Z
8	105 - 108	Beige	STIN214228F1Z	STIN214338F1Z
8	105 - 108	Musta	STIN214228F2Z	STIN214338F2Z
9	109 - 112	Beige	STIN214229F1Z	STIN214339F1Z
9	109 - 112	Musta	STIN214229F2Z	STIN214339F2Z
10	113 - 116	Beige	STIN2142210F1Z	STIN2143310F1Z
10	113 - 116	Musta	STIN2142210F2Z	STIN2143310F2Z
11	117 - 119	Beige	STIN2142211F1Z	STIN2143311F1Z
11	117 - 119	Musta	STIN2142211F2Z	STIN2143311F2Z



Tuotetieto:

Paita lyhyillä tai pitkillä hihoilla, reilusti lantiolle yltävä malli.

**Rintakehän ympärysmitta kainaloiden alta, rintojen yläpuolelta.*

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Kiinnitys:	2-riviset hakaset / vetoketjukiinnitys sisäpehmusteella
Viimeistelyt:	Pääntie ELA 3, alareuna SIL 1, hihansuut ELA 3

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN104226F1H

LASTEN PAITA - HAKASILLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm			Lyhyet hihat	Pitkät hihat
1	43 - 45	Beige	STIN104221FH	STIN104331F1H	
1	43 - 45	Musta	STIN104221F2H	STIN104331F2H	
2	46 - 49	Beige	STIN104222F1H	STIN104332F1H	
2	46 - 49	Musta	STIN104222F2H	STIN104332F2H	
3	50 - 54	Beige	STIN104223F1H	STIN104333F1H	
3	50 - 54	Musta	STIN104223F2H	STIN104333F2H	
4	55 - 59	Beige	STIN104224F1H	STIN104334F1H	
4	55 - 59	Musta	STIN104224F2H	STIN104334F2H	
5	60 - 63	Beige	STIN104225F1H	STIN104335F1H	
5	60 - 63	Musta	STIN104225F2H	STIN104335F2H	
6	64 - 67	Beige	STIN104226F1H	STIN104336F1H	
6	64 - 67	Musta	STIN104226F2H	STIN104336F2H	
7	68 - 71	Beige	STIN104227F1H	STIN104337F1H	
7	68 - 71	Musta	STIN104227F2H	STIN104337F2H	
8	72 - 75	Beige	STIN104228F1H	STIN104338F1H	
8	72 - 75	Musta	STIN104228F2H	STIN104338F2H	
9	76 - 79	Beige	STIN104229F1H	STIN104339F1H	
9	76 - 79	Musta	STIN104229F2H	STIN104339F2H	
10	80 - 83	Beige	STIN1042210F1H	STIN1043310F1H	
10	80 - 83	Musta	STIN1042210F2H	STIN1043310F2H	

LASTEN PAITA - VETOKETJULLA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm			Lyhyet hihat	Pitkät hihat
1	43 - 45	Beige	STIN104221F1Z	STIN104331F1Z	
1	43 - 45	Musta	STIN104221F2Z	STIN104331F2Z	
2	46 - 49	Beige	STIN104222F1Z	STIN104332F1Z	
2	46 - 49	Musta	STIN104222F2Z	STIN104332F2Z	
3	50 - 54	Beige	STIN104223F1Z	STIN104333F1Z	
3	50 - 54	Musta	STIN104223F2Z	STIN104333F2Z	
4	55 - 59	Beige	STIN104224F1Z	STIN104334F1Z	
4	55 - 59	Musta	STIN104224F2Z	STIN104334F2Z	
5	60 - 63	Beige	STIN104225F1Z	STIN104335F1Z	
5	60 - 63	Musta	STIN104225F2Z	STIN104335F2Z	
6	64 - 67	Beige	STIN104226F1Z	STIN104336F1Z	
6	64 - 67	Musta	STIN104226F2Z	STIN104336F2Z	
7	68 - 71	Beige	STIN104227F1Z	STIN104337F1Z	
7	68 - 71	Musta	STIN104227F2Z	STIN104337F2Z	
8	72 - 75	Beige	STIN104228F1Z	STIN104338F1Z	
8	72 - 75	Musta	STIN104228F2Z	STIN104338F2Z	
9	76 - 79	Beige	STIN104229F1Z	STIN104339F1Z	
9	76 - 79	Musta	STIN104229F2Z	STIN104339F2Z	
10	80 - 83	Beige	STIN1042210F1Z	STIN1043310F1Z	
10	80 - 83	Musta	STIN1042210F2Z	STIN1043310F2Z	



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN225336F1

Tuotetieto:

Normaali vyötärönkorkeus.
Miesten housuissa muotosauma etumuksessa.
**Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.*

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Viimeistelyt:	Vyötärö ELA 1, lahkeensuut ELA 2 Lasten housujen lahkeensuut ELA3

MIESTEN HOUSUT				VAKIOKOKO
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm		Lyhyet lahkeet	Pitkät lahkeet
1	87 - 92	Beige	STIN225221F1	STIN225331F1
1	87 - 92	Musta	STIN225221F2	STIN225331F2
2	93 - 96	Beige	STIN225222F1	STIN225332F1
2	93 - 96	Musta	STIN225222F2	STIN225332F2
3	97 - 100	Beige	STIN225223F1	STIN225333F1
3	97 - 100	Musta	STIN225223F2	STIN225333F2
4	101 - 104	Beige	STIN225224F1	STIN225334F1
4	101 - 104	Musta	STIN225224F2	STIN225334F2
5	105 - 108	Beige	STIN225225F1	STIN225335F1
5	105 - 108	Musta	STIN225225F2	STIN225335F2
6	109 - 112	Beige	STIN225226F1	STIN225336F1
6	109 - 112	Musta	STIN225226F2	STIN225336F2
7	113 - 116	Beige	STIN225227F1	STIN225337F1
7	113 - 116	Musta	STIN225227F2	STIN225337F2
8	117 - 120	Beige	STIN225228F1	STIN225338F1
8	117 - 120	Musta	STIN225228F2	STIN225338F2
9	121 - 124	Beige	STIN225229F1	STIN225339F1
9	121 - 124	Musta	STIN225229F2	STIN225339F2
10	125 - 128	Beige	STIN2252210F1	STIN2253310F1
10	125 - 128	Musta	STIN2252210F2	STIN2253310F2

NAISTEN HOUSUT				VAKIOKOKO
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro	
	cm		Lyhyet lahkeet	Pitkät lahkeet
1	87 - 91	Beige	STIN215221F1	STIN215331F1
1	87 - 91	Musta	STIN215221F2	STIN215331F2
2	92 - 95	Beige	STIN215222F1	STIN215332F1
2	92 - 95	Musta	STIN215222F2	STIN215332F2
3	96 - 99	Beige	STIN215223F1	STIN215333F1
3	96 - 99	Musta	STIN215223F2	STIN215333F2
4	100 - 103	Beige	STIN215224F1	STIN215334F1
4	100 - 103	Musta	STIN215224F2	STIN215334F2
5	104 - 107	Beige	STIN215225F1	STIN215335F1
5	104 - 107	Musta	STIN215225F2	STIN215335F2
6	108 - 111	Beige	STIN215226F1	STIN215336F1
6	108 - 111	Musta	STIN215226F2	STIN215336F2
7	112 - 115	Beige	STIN215227F1	STIN215337F1
7	112 - 115	Musta	STIN215227F2	STIN215337F2
8	116 - 119	Beige	STIN215228F1	STIN215338F1
8	116 - 119	Musta	STIN215228F2	STIN215338F2
9	120 - 123	Beige	STIN215229F1	STIN215339F1
9	120 - 123	Musta	STIN215229F2	STIN215339F2
10	124 - 127	Beige	STIN2152210F1	STIN2153310F1
10	124 - 127	Musta	STIN2152210F2	STIN2153310F2



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN215336F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN105336F1

LASTEN HOUSUT

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta* cm	Väri	Tuote / Tuotenro	
			Lyhyet lahkeet	Pitkät lahkeet
1	47 - 50	Beige	STIN105221F1	STIN105331F1
1	47 - 50	Musta	STIN105221F2	STIN105331F2
2	51 - 54	Beige	STIN105222F1	STIN105332F1
2	51 - 54	Musta	STIN105222F2	STIN105332F2
3	55 - 58	Beige	STIN105223F1	STIN105333F1
3	55 - 58	Musta	STIN105223F2	STIN105333F2
4	59 - 61	Beige	STIN105224F1	STIN105334F1
4	59 - 61	Musta	STIN105224F2	STIN105334F2
5	62 - 66	Beige	STIN105225F1	STIN105335F1
5	62 - 66	Musta	STIN105225F2	STIN105335F2
6	67 - 70	Beige	STIN105226F1	STIN105336F1
6	67 - 70	Musta	STIN105226F2	STIN105336F2
7	71 - 74	Beige	STIN105227F1	STIN105337F1
7	71 - 74	Musta	STIN105227F2	STIN105337F2
8	75 - 78	Beige	STIN105228F1	STIN105338F1
8	75 - 78	Musta	STIN105228F2	STIN105338F2
9	79 - 82	Beige	STIN105229F1	STIN105339F1
9	79 - 82	Musta	STIN105229F2	STIN105339F2
10	83 - 86	Beige	STIN1052210F1	STIN1053310F1
10	83 - 86	Musta	STIN1052210F2	STIN1053310F2



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STIN2031194RF1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STIN2031184RF1

KÄSINE

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Anatominen leikkaus sormien välissä.
**Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta.*

Materiaali: Kevyt

Värit: Beige, musta

Painetaso: 10 - 18 mmHg

Viimeistelyt: Käsineen suussa ELA 3

AIKUISTEN KÄSINE						VAKIOKOKO
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
	cm		Sormenpäät kiinni oikea	Sormenpäät kiinni vasen	Sormenpäät auki oikea	Sormenpäät auki vasen
1	13 - 14	Beige	STIN2031191RF1	STIN2031191LF1	STIN2031181RF1	STIN2031181LF1
1	13 - 14	Musta	STIN2031191RF2	STIN2031191LF2	STIN2031181RF2	STIN2031181LF2
2	15 - 16	Beige	STIN2031192RF1	STIN2031192LF1	STIN2031182RF1	STIN2031182LF1
2	15 - 16	Musta	STIN2031192RF2	STIN2031192LF2	STIN2031182RF2	STIN2031182LF2
3	17 - 18	Beige	STIN2031193RF1	STIN2031193LF1	STIN2031183RF1	STIN2031183LF1
3	17 - 18	Musta	STIN2031193RF2	STIN2031193LF2	STIN2031183RF2	STIN2031183LF2
4	19 - 20	Beige	STIN2031194RF1	STIN2031194LF1	STIN2031184RF1	STIN2031184LF1
4	19 - 20	Musta	STIN2031194RF2	STIN2031194LF2	STIN2031184RF2	STIN2031184LF2
5	21 - 22	Beige	STIN2031195RF1	STIN2031195LF1	STIN2031185RF1	STIN2031185LF1
5	21 - 22	Musta	STIN2031195RF2	STIN2031195LF2	STIN2031185RF2	STIN2031185LF2
6	23 - 24	Beige	STIN2031196RF1	STIN2031196LF1	STIN2031186RF1	STIN2031186LF1
6	23 - 24	Musta	STIN2031196RF2	STIN2031196LF2	STIN2031186RF2	STIN2031186LF2
7	25 - 26	Beige	STIN2031197RF1	STIN2031197LF1	STIN2031187RF1	STIN2031187LF1
7	25 - 26	Musta	STIN2031197RF2	STIN2031197LF2	STIN2031187RF2	STIN2031187LF2
8	27 - 28	Beige	STIN2031198RF1	STIN2031198LF1	STIN2031188RF1	STIN2031188LF1
8	27 - 28	Musta	STIN2031198RF2	STIN2031198LF2	STIN2031188RF2	STIN2031188LF2

LASTEN KÄSINE						VAKIOKOKO
Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
	cm		Sormenpäät kiinni oikea	Sormenpäät kiinni vasen	Sormenpäät auki oikea	Sormenpäät auki vasen
1	10 - 11	Beige	STIN1031191RF1	STIN1031191LF1	STIN1031181RF1	STIN1031181LF1
1	10 - 11	Musta	STIN1031191RF2	STIN1031191LF2	STIN1031181RF2	STIN1031181LF2
2	12 - 13	Beige	STIN1031192RF1	STIN1031192LF1	STIN1031182RF1	STIN1031182LF1
2	12 - 13	Musta	STIN1031192RF2	STIN1031192LF2	STIN1031182RF2	STIN1031182LF2

AIKUISTEN HIHA VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuotenro
cm			
1	18 - 20	Beige	STIN20301F1
1	18 - 20	Musta	STIN20301F2
2	20 - 22	Beige	STIN20302F1
2	20 - 22	Musta	STIN20302F2
3	22 - 24	Beige	STIN20303F1
3	22 - 24	Musta	STIN20303F2
4	24 - 26	Beige	STIN20304F1
4	24 - 26	Musta	STIN20304F2
5	26 - 28	Beige	STIN20305F1
5	26 - 28	Musta	STIN20305F2
6	28 - 30	Beige	STIN20306F1
6	28 - 30	Musta	STIN20306F2
7	30 - 32	Beige	STIN20307F1
7	30 - 32	Musta	STIN20307F2
8	32 - 34	Beige	STIN20308F1
8	32 - 34	Musta	STIN20308F2
9	34 - 36	Beige	STIN20309F1
9	34 - 36	Musta	STIN20309F2
10	36 - 38	Beige	STIN203010F1
10	36 - 38	Musta	STIN203010F2
11	38 - 40	Beige	STIN203011F1
11	38 - 40	Musta	STIN203011F2

Tuotetieto:

Hihan pituus koossa 6: 43,5 cm.

Ranne-kainalo mittainen hiha.

*Ympärysmitta olkavarren leveimmältä kohdalta.

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 2 Alareuna ELA 2

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN20305F1

LASTEN HIHA VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuotenro
cm			
1	10 - 12	Beige	STIN10301F1
1	10 - 12	Musta	STIN10301F2
2	12 - 14	Beige	STIN10302F1
2	12 - 14	Musta	STIN10302F2
3	14 - 16	Beige	STIN10303F1
3	14 - 16	Musta	STIN10303F2
4	16 - 18	Beige	STIN10304F1
4	16 - 18	Musta	STIN10304F2
5	18 - 20	Beige	STIN10305F1
5	18 - 20	Musta	STIN10305F2

Tuotetieto:

Hihan pituus koossa 3: 26,5 cm

Ranne-kainalo mittainen hiha.

*Ympärysmitta olkavarren leveimmältä kohdalta.

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 2 Alareuna ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STIN20692F1

Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
STIN20682F1

AIKUISTEN SUKKA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta* cm	Kengänkoko EU	Väri	Tuote / Tuotenro Kärki kiinni
1	28 - 32	35 - 38	Beige	STIN20691F1
1	28 - 32	35 - 38	Musta	STIN20691F2
2	33 - 37	38 - 40	Beige	STIN20692F1
2	33 - 37	38 - 40	Musta	STIN20692F2
3	38 - 42	40 - 43	Beige	STIN20693F1
3	38 - 42	40 - 43	Musta	STIN20693F2
4	43 - 46	43 - 46	Beige	STIN20694F1
4	43 - 46	43 - 46	Musta	STIN20694F2
cm			Kärki auki	
1	28 - 32		Beige	STIN20681F1
1	28 - 32		Musta	STIN20681F2
2	33 - 37		Beige	STIN20682F1
2	33 - 37		Musta	STIN20682F2
3	38 - 42		Beige	STIN20683F1
3	38 - 42		Musta	STIN20683F2
4	43 - 46		Beige	STIN20684F1
4	43 - 46		Musta	STIN20684F2

Tuotetieto:

Polvisukka, joka sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan.
*Ympärysmitta pohkeen leveimmästä kohdasta.

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 2 Kärki auki: sukan suu ELA 2

LASTEN SUKKA

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta* cm	Kengänkoko EU	Väri	Tuote / Tuotenro Kärki kiinni
1	16 - 19	23 - 26	Beige	STIN10691F1
1	16 - 19	23 - 26	Musta	STIN10691F2
2	20 - 23	26 - 31	Beige	STIN10692F1
2	20 - 23	26 - 31	Musta	STIN10692F2
3	24 - 27	31 - 36	Beige	STIN10693F1
3	24 - 27	31 - 36	Musta	STIN10693F2
cm			Kärki auki	
1	16 - 19		Beige	STIN10681F1
1	16 - 19		Musta	STIN10681F2
2	20 - 23		Beige	STIN10682F1
2	20 - 23		Musta	STIN10682F2
3	24 - 27		Beige	STIN10683F1
3	24 - 27		Musta	STIN10683F2

Tuotetieto:

Polvisukka, joka sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan.
*Ympärysmitta pohkeen leveimmästä kohdasta.

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Viimeistelyt:	Yläreuna SIL 2 Kärki auki: sukan suu ELA 3

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys niskassa.

*Päänympäryys

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys niskassa
Viimeistelyt:	Reunat huoliteltu



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN1383F1

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STIN1393F1



PÄÄHINE

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuotenro
cm			
1	47 - 50	Beige	STIN1381F1
1	47 - 50	Musta	STIN1381F2
2	51 - 53	Beige	STIN1382F1
2	51 - 53	Musta	STIN1382F2
3	54 - 56	Beige	STIN1383F1
3	54 - 56	Musta	STIN1383F2
4	57 - 59	Beige	STIN1384F1
4	57 - 59	Musta	STIN1384F2
5	60 - 62	Beige	STIN1385F1
5	60 - 62	Musta	STIN1385F2

HUPPU

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuotenro
cm			
1	47 - 50	Beige	STIN1391F1
1	47 - 50	Musta	STIN1391F2
2	51 - 53	Beige	STIN1392F1
2	51 - 53	Musta	STIN1392F2
3	54 - 56	Beige	STIN1393F1
3	54 - 56	Musta	STIN1393F2
4	57 - 59	Beige	STIN1394F1
4	57 - 59	Musta	STIN1394F2
5	60 - 62	Beige	STIN1395F1
5	60 - 62	Musta	STIN1395F2

Tuotetieto:

Kasvojen alue kiinni. Kasvo-osa on tarkoitettu arven ja haavanhoitotuotteiden, sidosten tai kasvomaskin paikallaan pitämiseen. Kasvo-osaan voidaan tarvittaessa leikata reiät suun, nenän ja silmien alueelle. Materiaali ei purkautu leikkaamisen jälkeen.

*Päänympäryys

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	10 - 18 mmHg
Kiinnitys:	1-riviset hakaset takaraivoilta niskaan
Viimeistelyt:	Reunat huoliteltu



POST-OPERATION™

POST-OPERATIIVISET TUKIVAATTEET

VAKIOKOKO




Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21535HWF2C

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21525HWF2C

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21515HWF2C

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21505HWF2C

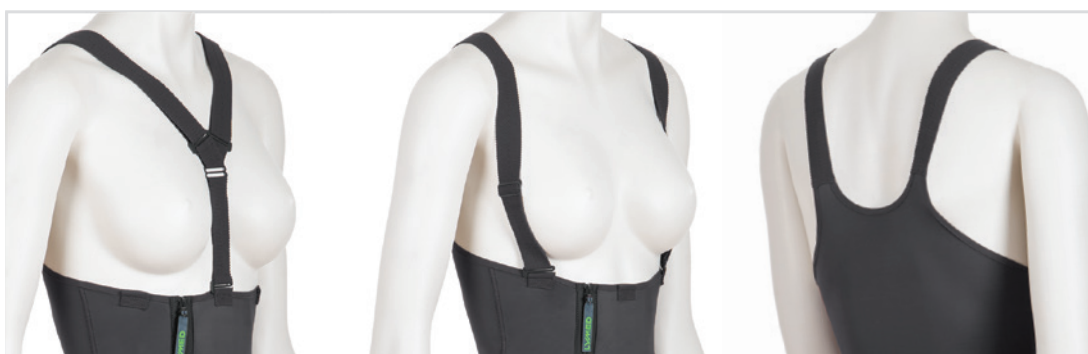

Olkaimia voidaan käyttää kahdella eri tavalla

TUKIHOUSUT | KORKEA VYÖTÄRÖ

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Naisten tukihousut keski- ja alavartalon operaatioiden yhteydessä käytettäväksi.

Sopii myös synnytyksen jälkeiseen käyttöön.

Housuissa on korkea vyötärö ja tuplakangas vatsan alueella.

Joustavat ja säädettävät, edestä avattavat olkaimet.

Mukana lisäosa, jolla olkaimet voidaan muuttaa Y-malliseksi.

**Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta ja reiden ylimmästä kohdasta.*

Materiaali:	Keskivahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Kiinnitys:	Vetoketju sisäpehmusteella sekä apuhakasilla lantion sivussa, kiinteät olkaimet
Viimeistelyt:	Vyötärö ELA 3 Lahkeensuut ELA 2

TUKIHOUSUT | KORKEA VYÖTÄRÖ | GENITAALIALUE KIINNI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuoteno			
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus	Lyhyet lahkeet
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532HWF1C	STPOP21522HWF1C	STPOP21512HWF1C	STPOP21502HWF1C
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532HWF2C	STPOP21522HWF2C	STPOP21512HWF2C	STPOP21502HWF2C
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533HWF1C	STPOP21523HWF1C	STPOP21513HWF1C	STPOP21503HWF1C
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533HWF2C	STPOP21523HWF2C	STPOP21513HWF2C	STPOP21503HWF2C
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534HWF1C	STPOP21524HWF1C	STPOP21514HWF1C	STPOP21504HWF1C
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534HWF2C	STPOP21524HWF2C	STPOP21514HWF2C	STPOP21504HWF2C
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535HWF1C	STPOP21525HWF1C	STPOP21515HWF1C	STPOP21505HWF1C
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535HWF2C	STPOP21525HWF2C	STPOP21515HWF2C	STPOP21505HWF2C
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536HWF1C	STPOP21526HWF1C	STPOP21516HWF1C	STPOP21506HWF1C
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536HWF2C	STPOP21526HWF2C	STPOP21516HWF2C	STPOP21506HWF2C
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537HWF1C	STPOP21527HWF1C	STPOP21517HWF1C	STPOP21507HWF1C
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537HWF2C	STPOP21527HWF2C	STPOP21517HWF2C	STPOP21507HWF2C
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538HWF1C	STPOP21528HWF1C	STPOP21518HWF1C	STPOP21508HWF1C
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538HWF2C	STPOP21528HWF2C	STPOP21518HWF2C	STPOP21508HWF2C
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539HWF1C	STPOP21529HWF1C	STPOP21519HWF1C	STPOP21509HWF1C
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539HWF2C	STPOP21529HWF2C	STPOP21519HWF2C	STPOP21509HWF2C

TUKIHOUSUT | KORKEA VYÖTÄRÖ | GENITAALIALUE AUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuoteno			
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus	Lyhyet lahkeet
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532HWF1O	STPOP21522HWF1O	STPOP21512HWF1O	STPOP21502HWF1O
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532HWF2O	STPOP21522HWF2O	STPOP21512HWF2O	STPOP21502HWF2O
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533HWF1O	STPOP21523HWF1O	STPOP21513HWF1O	STPOP21503HWF1O
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533HWF2O	STPOP21523HWF2O	STPOP21513HWF2O	STPOP21503HWF2O
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534HWF1O	STPOP21524HWF1O	STPOP21514HWF1O	STPOP21504HWF1O
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534HWF2O	STPOP21524HWF2O	STPOP21514HWF2O	STPOP21504HWF2O
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535HWF1O	STPOP21525HWF1O	STPOP21515HWF1O	STPOP21505HWF1O
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535HWF2O	STPOP21525HWF2O	STPOP21515HWF2O	STPOP21505HWF2O
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536HWF1O	STPOP21526HWF1O	STPOP21516HWF1O	STPOP21506HWF1O
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536HWF2O	STPOP21526HWF2O	STPOP21516HWF2O	STPOP21506HWF2O
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537HWF1O	STPOP21527HWF1O	STPOP21517HWF1O	STPOP21507HWF1O
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537HWF2O	STPOP21527HWF2O	STPOP21517HWF2O	STPOP21507HWF2O
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538HWF1O	STPOP21528HWF1O	STPOP21518HWF1O	STPOP21508HWF1O
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538HWF2O	STPOP21528HWF2O	STPOP21518HWF2O	STPOP21508HWF2O
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539HWF1O	STPOP21529HWF1O	STPOP21519HWF1O	STPOP21509HWF1O
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539HWF2O	STPOP21529HWF2O	STPOP21519HWF2O	STPOP21509HWF2O

TUKIHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Naisten tukihousut keski- ja alavartalon operaatioiden yhteydessä käytettäväksi.
Housuissa on normaali vyötärö.
Tilattavissa genitaalialue avoimena tai suljettuna.
Vetoketju oikealla.

**Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta ja reiden ylimmästä kohdasta.*

Materiaali:	Keskivahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Kiinnitys:	Vetoketju sisäpehmusteella sekä apuhakasilla lantion sivussa / ei kiinnitystä
Viimeistelyt:	Vyötärö SIL 1 Lahkeensuut ELA 2



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21535F2ZC



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21525F2ZC



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP21515F2ZC

TUKIHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ | ILMAN VETOKETJUA | GENITAALIALUE KIINNI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuottenro		
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532F1C	STPOP21522F1C	STPOP21512F1C
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532F2C	STPOP21522F2C	STPOP21512F2C
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533F1C	STPOP21523F1C	STPOP21513F1C
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533F2C	STPOP21523F2C	STPOP21513F2C
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534F1C	STPOP21524F1C	STPOP21514F1C
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534F2C	STPOP21524F2C	STPOP21514F2C
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535F1C	STPOP21525F1C	STPOP21515F1C
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535F2C	STPOP21525F2C	STPOP21515F2C
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536F1C	STPOP21526F1C	STPOP21516F1C
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536F2C	STPOP21526F2C	STPOP21516F2C
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537F1C	STPOP21527F1C	STPOP21517F1C
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537F2C	STPOP21527F2C	STPOP21517F2C
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538F1C	STPOP21528F1C	STPOP21518F1C
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538F2C	STPOP21528F2C	STPOP21518F2C
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539F1C	STPOP21529F1C	STPOP21519F1C
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539F2C	STPOP21529F2C	STPOP21519F2C

TUKIHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ | ILMAN VETOKETJUA | GENITAALIALUE AUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuottenro		
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532F1O	STPOP21522F1O	STPOP21512F1O
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532F2O	STPOP21522F2O	STPOP21512F2O
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533F1O	STPOP21523F1O	STPOP21513F1O
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533F2O	STPOP21523F2O	STPOP21513F2O
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534F1O	STPOP21524F1O	STPOP21514F1O
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534F2O	STPOP21524F2O	STPOP21514F2O
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535F1O	STPOP21525F1O	STPOP21515F1O
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535F2O	STPOP21525F2O	STPOP21515F2O
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536F1O	STPOP21526F1O	STPOP21516F1O
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536F2O	STPOP21526F2O	STPOP21516F2O
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537F1O	STPOP21527F1O	STPOP21517F1O
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537F2O	STPOP21527F2O	STPOP21517F2O
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538F1O	STPOP21528F1O	STPOP21518F1O
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538F2O	STPOP21528F2O	STPOP21518F2O
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539F1O	STPOP21529F1O	STPOP21519F1O
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539F2O	STPOP21529F2O	STPOP21519F2O

TUKIHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ | VETOKETJULLA | GENITAALIALUE KIINNI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532F1ZC	STPOP21522F1ZC	STPOP21512F1ZC
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532F2ZC	STPOP21522F2ZC	STPOP21512F2ZC
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533F1ZC	STPOP21523F1ZC	STPOP21513F1ZC
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533F2ZC	STPOP21523F2ZC	STPOP21513F2ZC
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534F1ZC	STPOP21524F1ZC	STPOP21514F1ZC
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534F2ZC	STPOP21524F2ZC	STPOP21514F2ZC
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535F1ZC	STPOP21525F1ZC	STPOP21515F1ZC
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535F2ZC	STPOP21525F2ZC	STPOP21515F2ZC
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536F1ZC	STPOP21526F1ZC	STPOP21516F1ZC
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536F2ZC	STPOP21526F2ZC	STPOP21516F2ZC
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537F1ZC	STPOP21527F1ZC	STPOP21517F1ZC
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537F2ZC	STPOP21527F2ZC	STPOP21517F2ZC
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538F1ZC	STPOP21528F1ZC	STPOP21518F1ZC
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538F2ZC	STPOP21528F2ZC	STPOP21518F2ZC
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539F1ZC	STPOP21529F1ZC	STPOP21519F1ZC
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539F2ZC	STPOP21529F2ZC	STPOP21519F2ZC

TUKIHOUSUT | NORMAALI VYÖTÄRÖ | VETOKETJULLA | GENITAALIALUE AUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*		Väri	Tuote / Tuotenro		
	Lantio cm	Reisi cm		Nilkkapituus	Pohjepituus	Polvipituus
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Beige	STPOP21532F1ZO	STPOP21522F1ZO	STPOP21512F1ZO
XS	86 - 90	50,0 - 53,0	Musta	STPOP21532F2ZO	STPOP21522F2ZO	STPOP21512F2ZO
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Beige	STPOP21533F1ZO	STPOP21523F1ZO	STPOP21513F1ZO
S	91 - 95	53,5 - 56,0	Musta	STPOP21533F2ZO	STPOP21523F2ZO	STPOP21513F2ZO
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Beige	STPOP21534F1ZO	STPOP21524F1ZO	STPOP21514F1ZO
M	96 - 101	56,5 - 59,5	Musta	STPOP21534F2ZO	STPOP21524F2ZO	STPOP21514F2ZO
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Beige	STPOP21535F1ZO	STPOP21525F1ZO	STPOP21515F1ZO
L	102 - 110	60,0 - 62,5	Musta	STPOP21535F2ZO	STPOP21525F2ZO	STPOP21515F2ZO
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Beige	STPOP21536F1ZO	STPOP21526F1ZO	STPOP21516F1ZO
XL	111 - 121	63,0 - 66,0	Musta	STPOP21536F2ZO	STPOP21526F2ZO	STPOP21516F2ZO
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Beige	STPOP21537F1ZO	STPOP21527F1ZO	STPOP21517F1ZO
XXL	122 - 132	66,5 - 69,0	Musta	STPOP21537F2ZO	STPOP21527F2ZO	STPOP21517F2ZO
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Beige	STPOP21538F1ZO	STPOP21528F1ZO	STPOP21518F1ZO
XXXL	133 - 138	69,5 - 71,5	Musta	STPOP21538F2ZO	STPOP21528F2ZO	STPOP21518F2ZO
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Beige	STPOP21539F1ZO	STPOP21529F1ZO	STPOP21519F1ZO
XXXXL	139 - 144	72,0 - 74,5	Musta	STPOP21539F2ZO	STPOP21529F2ZO	STPOP21519F2ZO



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP2134F1

NAISTEN TUKIHIHAT

VAKIOKOKO


Koko	Ymp.mitta 1*	Ymp.mitta 2**	Väri	Tuotenro
	cm	cm		
XS	76 - 84	24,0 - 26,0	Beige	STPOP2132F1
XS	76 - 84	24,0 - 26,0	Musta	STPOP2132F2
S	85 - 92	26,5 - 28,5	Beige	STPOP2133F1
S	85 - 92	26,5 - 28,5	Musta	STPOP2133F2
M	93 - 100	29,0 - 31,0	Beige	STPOP2134F1
M	93 - 100	29,0 - 31,0	Musta	STPOP2134F2
L	101 - 107	31,5 - 33,5	Beige	STPOP2135F1
L	101 - 107	31,5 - 33,5	Musta	STPOP2135F2
XL	108 - 114	34,0 - 36,0	Beige	STPOP2136F1
XL	108 - 114	34,0 - 36,0	Musta	STPOP2136F2
XXL	115 - 124	36,5 - 38,5	Beige	STPOP2137F1
XXL	115 - 124	36,5 - 38,5	Musta	STPOP2137F2

Tuotetieto:

Naisten tukihihat käsivarsien leikkausten yhteydessä käytettäväksi. Anatomiset kynnärtaipeet.

*Ympärysmitta 1 rinnanympärys kainaloiden alta, rintojen yläpuolelta.

**Ympärysmitta 2 olkavarren leveimmältä kohdalta.

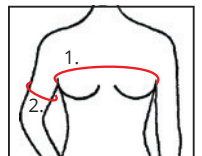

Materiaali:	Hihat: keskivahva Miehusta: kevyt
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg hihoissa Ei painetta paitaosassa
Kiinnitys:	2-riviset hakaset Alareuna ELA 1
Viimeistelyt:	Hihansuut ELA 2 Pääntie ELA 3



Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
STPOP2244F2

POST-OPERATION™

MIESTEN TUKIPAITA

VAKIOKOKO

Koko	Rintakehän ympärys kainalon kohdalta	Vyötärön ympärys	Paidan pituus olalta helmaan	Väri	Tuotenro
	cm	cm	cm		
XXXS	75 - 79	69 - 72	53,5	Beige	STPOP2240F1
XXXS	75 - 79	69 - 72	53,5	Musta	STPOP2240F2
XXS	80 - 84	72 - 75	54,5	Beige	STPOP2241F1
XXS	80 - 84	72 - 75	54,5	Musta	STPOP2241F2
XS	85 - 89	75 - 78	55,5	Beige	STPOP2242F1
XS	85 - 89	75 - 78	55,5	Musta	STPOP2242F2
S	90 - 95	79 - 84	56,5	Beige	STPOP2243F1
S	90 - 95	79 - 84	56,5	Musta	STPOP2243F2
M	96 - 101	84 - 90	59,5	Beige	STPOP2244F1
M	96 - 101	84 - 90	59,5	Musta	STPOP2244F2
L	102 - 107	90 - 96	62,5	Beige	STPOP2245F1
L	102 - 107	90 - 96	62,5	Musta	STPOP2245F2
XL	108 - 113	96 - 102	65,5	Beige	STPOP2246F1
XL	108 - 113	96 - 102	65,5	Musta	STPOP2246F2
XXL	114 - 119	102 - 108	68,5	Beige	STPOP2247F1
XXL	114 - 119	102 - 108	68,5	Musta	STPOP2247F2
XXXL	120 - 125	108 - 114	71,5	Beige	STPOP2248F1
XXXL	120 - 125	108 - 114	71,5	Musta	STPOP2248F2

Tuotetieto:

Miesten tukipaita ylävartalon leikkausten jälkihoidon yhteydessä käytettäväksi.

Materiaali:	Keskivahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Kiinnitys:	2-riviset hakaset
Viimeistelyt:	Alareuna SIL 1 Kädentiet ja päantie ELA 3



Kuvan tuotteen
tilauskoodi:
STPOP2271VF2

MIESTEN LYHYT TUKIPAITA

VAKIOKOKO

Koko	Rintakehän ympäryksen kainalon kohdalta	Ympäryksen paidan päättymiskohdasta	Paidan pituus olalta helmaan*	Väri	Tuotenro
	cm	cm	cm		
XXXS	75 - 79	69 - 72	35,5	Beige	STPOP2270VF1
XXXS	75 - 79	69 - 72	35,5	Musta	STPOP2270VF2
XXS	80 - 84	72 - 75	36	Beige	STPOP2271VF1
XXS	80 - 84	72 - 75	36	Musta	STPOP2271VF2
XS	85 - 89	75 - 78	36,5	Beige	STPOP2272VF1
XS	85 - 89	75 - 78	36,5	Musta	STPOP2272VF2
S	90 - 95	79 - 84	37	Beige	STPOP2273VF1
S	90 - 95	79 - 84	37	Musta	STPOP2273VF2
M	96 - 101	84 - 90	39,5	Beige	STPOP2274VF1
M	96 - 101	84 - 90	39,5	Musta	STPOP2274VF2
L	102 - 107	90 - 96	42	Beige	STPOP2275VF1
L	102 - 107	90 - 96	42	Musta	STPOP2275VF2
XL	108 - 113	96 - 102	44,5	Beige	STPOP2276VF1
XL	108 - 113	96 - 102	44,5	Musta	STPOP2276VF2
XXL	114 - 119	102 - 108	47	Beige	STPOP2277VF1
XXL	114 - 119	102 - 108	47	Musta	STPOP2277VF2
XXXL	120 - 125	108 - 114	49,5	Beige	STPOP2278VF1
XXXL	120 - 125	108 - 114	49,5	Musta	STPOP2278VF2

Tuotetieto:

Miesten tukipaita ylävartalon leikkausten jälkihoidon yhteydessä käytettäväksi. Tarrakiinnitteiset, säädettävät olkaimet.

*Olan säätö vaikuttaa paidan pituuteen

Materiaali:	Keskivahva
Värit:	Beige, musta
Painetaso:	23 - 30 mmHg
Kiinnitys:	2-riviset hakaset, säädettävä tarrakiinnitys olkaimissa
Viimeistelyt:	Alareuna SIL 1 Kädentiet ja pääntie ELA 3

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP714F3



SIDOSLIIVIT | KEVYT TUKI

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Keuyen tuen liivi on tarkoitettu käytettäväksi leikkauksen jälkeen sidosten paikallaan pitämiseksi.
Säädettävät, edestä avattavat 3 cm leveät olkaimet mahdollistavat sidosten tarkastamisen ja vaihdon liiviä riisumatta.
Takana säädettävä tarrakiinnitys helpottaa pukemista.
Saatavana kahdella kupilla sekä yhdellä tai kahdella proteesitaskulla.

**Ympärysmitta rintojen alta.*

Materiaali:	Kevyt
Värit:	Musta, valkoinen
Painetaso:	Ei painetta
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys
Viimeistelyt:	Alareuna ELA 1 Muut reunat ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP714F3

SIDOSLIIVIT | KEVYT TUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
	cm		Kahdella kupilla	Proteesitasku oik. puolella	Proteesitasku vas. puolella	Kahdella proteesitaskulla
XS	70 - 75	Musta	STPOP712F2	STPOP712PRF2	STPOP712PLF2	STPOP712PPF2
XS	70 - 75	Valkoinen	STPOP712F3	STPOP712PRF3	STPOP712PLF3	STPOP712PPF3
S	73 - 78	Musta	STPOP713F2	STPOP713PRF2	STPOP713PLF2	STPOP713PPF2
S	73 - 78	Valkoinen	STPOP713F3	STPOP713PRF3	STPOP713PLF3	STPOP713PPF3
M	76 - 83	Musta	STPOP714F2	STPOP714PRF2	STPOP714PLF2	STPOP714PPF2
M	76 - 83	Valkoinen	STPOP714F3	STPOP714PRF3	STPOP714PLF3	STPOP714PPF3
L	81 - 88	Musta	STPOP715F2	STPOP715PRF2	STPOP715PLF2	STPOP715PPF2
L	81 - 88	Valkoinen	STPOP715F3	STPOP715PRF3	STPOP715PLF3	STPOP715PPF3
XL	86 - 93	Musta	STPOP716F2	STPOP716PRF2	STPOP716PLF2	STPOP716PPF2
XL	86 - 93	Valkoinen	STPOP716F3	STPOP716PRF3	STPOP716PLF3	STPOP716PPF3
XXL	91 - 98	Musta	STPOP717F2	STPOP717PRF2	STPOP717PLF2	STPOP717PPF2
XXL	91 - 98	Valkoinen	STPOP717F3	STPOP717PRF3	STPOP717PLF3	STPOP717PPF3

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP724F3



SIDOSLIIVIT | KESKIVAHVA TUKI

VAKIOKOKO

Tuotetieto:

Keskivahvan tuen liivi on tarkoitettu käytettäväksi leikkauksen jälkeen sidosten paikallaan pitämiseksi.

Materiaali on vahvempi kuin kevyen tuen liivissä.

Säädettävät, edestä avattavat 3 cm leveät olkaimet mahdollistavat sidosten tarkastamisen ja vaihdon liiviä riisumatta.

Takana säädettävä tarrakiinnitys helpottaa pukemista.

Saatavana myös yhdellä tai kahdella proteesitaskulla.

**Ympärysmitta rintojen alta.*

Materiaali:	Keskivahva
Värit:	Musta, valkoinen
Painetaso:	Ei painetta
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys
Viimeistelyt:	Alareuna ELA 1 Muut reunat ELA 3



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP724F3

SIDOSLIIVIT | KESKIVAHVA TUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Väri	Tuote / Tuotenro			
	cm		Kahdella kupilla	Proteesitasku oik. puolella	Proteesitasku vas. puolella	Kahdella proteesitaskulla
XS	70 - 75	Musta	STPOP722F2	STPOP722PRF2	STPOP722PLF2	STPOP722PPF2
XS	70 - 75	Valkoinen	STPOP722F3	STPOP722PRF3	STPOP722PLF3	STPOP722PPF3
S	73 - 78	Musta	STPOP723F2	STPOP723PRF2	STPOP723PLF2	STPOP723PPF2
S	73 - 78	Valkoinen	STPOP723F3	STPOP723PRF3	STPOP723PLF3	STPOP723PPF3
M	76 - 83	Musta	STPOP724F2	STPOP724PRF2	STPOP724PLF2	STPOP724PPF2
M	76 - 83	Valkoinen	STPOP724F3	STPOP724PRF3	STPOP724PLF3	STPOP724PPF3
L	81 - 88	Musta	STPOP725F2	STPOP725PRF2	STPOP725PLF2	STPOP725PPF2
L	81 - 88	Valkoinen	STPOP725F3	STPOP725PRF3	STPOP725PLF3	STPOP725PPF3
XL	86 - 93	Musta	STPOP726F2	STPOP726PRF2	STPOP726PLF2	STPOP726PPF2
XL	86 - 93	Valkoinen	STPOP726F3	STPOP726PRF3	STPOP726PLF3	STPOP726PPF3
XXL	91 - 98	Musta	STPOP727F2	STPOP727PRF2	STPOP727PLF2	STPOP727PPF2
XXL	91 - 98	Valkoinen	STPOP727F3	STPOP727PRF3	STPOP727PLF3	STPOP727PPF3



Tuotetieto:

Vahvan tuen liivit rintojen tukemiseen leikkauksen jälkeen.
Voidaan käyttää myös sidosliivinä.
Kiinnitys edessä rintojen välissä sekä tukea antava selkäkappale.
3 cm leveät, säädettävät ja avattavat olkaimet.

**Ympärysmitta rintojen alta.*

Materiaali:	Vahva
Värit:	Musta, valkoinen
Painetaso:	Ei painetta
Kiinnitys:	1-riviset hakaset / vetoketju sisäpehmusteella ja apuhakasilla
Viimeistelyt:	Alareuna ELA 1 Muut reunat ELA 3

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP7380DF3H

RINTALIIVIT | VAHVA TUKI | LYHYT MALLI

VAKIOKOKO

Ymp.mitta*	Tuotenro (koodi + kuppikoko + väri + kiinnitys)			
cm	Koodi	Kuppikoko	Väri musta / valkoinen	Kiinnitys hakaset / vetoketju
65 - 69	STPOP7365	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
70 - 74	STPOP7370	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
75 - 79	STPOP7375	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
80 - 84	STPOP7380	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
85 - 89	STPOP7385	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
90 - 94	STPOP7390	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
95 - 99	STPOP7395	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
100 - 104	STPOP73100	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z



Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP7480DF3Z

Tuotetieto:

Vahvan tuen liivit rintojen tukemiseen leikkauksen jälkeen.
Pitkä malli on lyhyttä mallia pidempi ja sopii erityisesti isorintaisille.

Voidaan käyttää myös sidosliivinä.

Kiinnitys apuhakasilla edessä rintojen välissä sekä tukea antava selkäkappale.

3 cm leveät, säädettävät ja avattavat olkaimet.

*Ympärysmitta rintojen alta.

Materiaali:	Vahva
Värit:	Musta, valkoinen
Painetaso:	Ei painetta
Kiinnitys:	Vetoketju sisäpehmusteella ja apuhakasilla / 1-riviset hakaset
Viimeistelyt:	Alareuna ELA 1 Muut reunat ELA 3

RINTALIIVIT | VAHVA TUKI | PITKÄ MALLI

VAKIOKOKO

Ymp.mitta*	Tuotenro (koodi + kuppikoko + väri + kiinnitys)			
cm	Koodi	Kuppikoko	Väri musta / valkoinen	Kiinnitys hakaset / vetoketju
65 - 69	STPOP7465	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
70 - 74	STPOP7470	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
75 - 79	STPOP7475	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
80 - 84	STPOP7480	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
85 - 89	STPOP7485	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
90 - 94	STPOP7490	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
95 - 99	STPOP7495	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z
100 - 104	STPOP74100	A / B / C / D / E / F / G	F2 / F3	H / Z



TUKIREMMI S-MALLI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta* cm	Tuotenumero
XS	60 - 75	STPOP752F3
S	70 - 90	STPOP753F3
M	85 - 105	STPOP754F3

Tuotetieto:

S-mallinen tukiremmi rintojen tukemiseen rintarekonstruktioiden jälkihoitoon. Käytetään rintaliivien päällä leikkauksen jälkeen, kun rintaliivien tuki ei yksin riitä. Voidaan käyttää yhdessä vahvan tuen rintaliivin kanssa (katso edellinen aukeama).

Erillinen tukiremmi mahdollistaa liivien ja tukiremmien käytön erikseen.

Sivuissa kangasta, edessä ja takana säädettävä tarrakiinnitys. Tuotteen korkeus edestä 8 cm.

*Ymp.mitta rintojen yläpuolelta

Materiaali:	Vahva, joustava 8 cm leveä nauha
Väri:	Valkoinen
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys
Viimeistelyt:	Ylä- ja alareuna ELA 3

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP753F3



KEVYT TUKIVYÖ

VAKIOKOKO

<i>Tuotepituus</i> cm	<i>Korkeus</i> cm	<i>Tuotenro</i>
100	18	STPOP4042100F2
120	18	STPOP4042120F2
140	18	STPOP4042140F2

Tuotetieto:

Säädettävä kevyt tukivyö, jossa kaksiosainen tarrakiinnitys.
Tarra kiinnittyy tuotteeseen koko tuotteen matkalta.
Läpikuultava ja hengittävä materiaali.
Valitse ympärysmittaa lähinnä oleva tukivyön pituus.

Materiaali:	Tarrapintainen tukivyönauha
Väri:	Musta
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STPOP4042100F2



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP403180F1



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP403380F1

VAHVA TUKIVYÖ		VAKIOKOKO
Tuotepituus	Korkeus	Tuotenro
cm	cm	
80	16	STPOP403180F1
100	16	STPOP4031100F1
120	16	STPOP4031120F1
140	16	STPOP4031140F1
80	26	STPOP403380F1
100	26	STPOP4033100F1
120	26	STPOP4033120F1
140	26	STPOP4033140F1

Tuotetieto:

Vahva ja joustava tukivyö.
Koko tukivyön levyinen, säädettävä tarrakiinnitys.
Sopii käytettäväksi myös esimerkiksi selkätukena ja kevyenä tyrävyönä.
Valitse ympärysmittaa lähinnä oleva tukivyön pituus.
Matalinta korkeutta varten valitse ympärysmittaa lyhyempi tukivyö.

Materiaali:	Vahva tukivyönauha polyamidi 86 %, elastaani 9 %, polypropeeni 5 %
Väri:	Beige
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys

Kuvan tuotteen tilauskoodi: STM4041110F1

RASKAUSTUKIVYÖ		VAKIOKOKO
Tuotepituus	Korkeus	Tuotenro
cm	cm	
110	10	STM4041110F1

Tuotetieto:

Vahva, joustava tukivyö kasvavan vatsan tukemiseen.

Materiaali:	Vahva tukivyönauha polyamidi 86 %, elastaani 9 %, polypropeeni 5 %
Väri:	Beige
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys





Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP1114F1

Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP1124F1

KASVOTUKI

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Tuote / Tuotenro	
	cm	Kiertää korvat	Peittää korvat
S	58 - 62	STPOP1113F1	STPOP1123F1
M	62 - 66	STPOP1114F1	STPOP1124F1
L	66 - 72	STPOP1115F1	STPOP1125F1
XL	72 - 76	STPOP1116F1	STPOP1126F1

Tuotetieto:

Tarrakiinnitys niskassa ja päällella.

*Ympärysmitta leuka-lakipisteestä.

Materiaali:	Keskivahva
Väri:	Beige
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys niskassa ja päällella
Viimeistelyt:	Remmi ELA 1 Reunat ELA 3

VAHVA KASVOTUKI

VAKIOKOKO

Koko	Väri	Tuotenro
Yksi koko	Beige	STPOP115F1
Yksi koko	Valkoinen	STPOP115F3

Tuotetieto:

Koostuu useasta eri remmistä, joissa kaikissa on säädettävä tarrakiinnitys.

Materiaali:	Vahva, joustava 8 cm leveä nauha
Värit:	Beige, valkoinen
Painetaso:	Säädettävä
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP115F1

**POST-OPERATIIVINEN
PÄÄHINE**

VAKIOKOKO

Koko	Ymp.mitta*	Tuotenro
cm		
S	50 - 54	STPOP1393F2
M	54 - 58	STPOP1394F2

Tuotetieto:

Päähine sidosten paikallaan pitämiseksi.

*Pään ympäryys

Materiaali:	Kevyt
Väri:	Musta
Painetaso:	Paineeton
Kiinnitys:	Tarrakiinnitys leuan alapuolella



Kuvan tuotteen tilauskoodi:
STPOP1394F2

SKIN™	40
COMPRESSION™	57
SENSE™	82
INTERIM & LIGHT™	96
POST-OPERATION™	107

LYMED®

Valmistaja:

Lymed Oy

Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere

Puh: **+358 20 779 2233**

Email: **info@lymed.fi**

Jakelijamme Suomessa ja ulkomailla löydät osoitteesta www.lymed.fi

Lymed Oy | 1/2026 | Ajankohtaisin kuvastomme aina saatavilla osoitteessa www.lymed.fi

