

MITTAUKSEEN VARUSTAUTUMINEN

- Ohut mittanauha, jossa on koukku päässä (paras tarkkuus)
- Kynä ihomerkkauksia varten
- Viivoitin käsineen mittoja varten

MITTAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

- Pidä huoli, että mitattava seisoo mittaustilanteessa rauhallisesti, kädet rennosti sivulla.
- Pyritään, että kaikki mitat otetaan asiakkaan seisossa. Istuma-asennossa otetut mitat ilmoitetaan tilauslomakkeen lisätietokentässä. Pyri välttämään keskivartalon alueen mittojen ottamista istuma-asennossa. Äärimmäisessä poikkeustilanteessa asiakas voidaan mitata makuuasennossa ja tästä on ilmoitettava lisätietokentässä.

HUOMIOITAVAA

- Huomioi, että mikäli mitattava on hyvin muodokas (esim. obeesi, lihaksikas) tai hänellä on anatomisia poikkeavuuksia, on lisämittoja otettava tarvittavista kohdista.
- Suosittelemme valokuvan lähettämistä tilauksen yhteydessä valmistuksen tueksi. Otathan valokuvan niin, että asiakkaan anonymiteetti säilyy.



MITTAAMINEN

- Merkitse kynällä iholle mitattavien pisteiden paikat, jotta mittaaminen sujuu helpommin ja nopeammin. Voit myös käyttää useita mittanauhoja tai kuminauhoja mittaamisen apuna.
- Samanniminen mittapiste eri tilauslomakkeilla on aina sama anatominen paikka kehossa.
- Käsinettä mitattaessa ota pituusmitat viivottimella. Joustamatonta langanpätäkää voidaan käyttää pienten sormien tai varpaiden ympärysmittojen mittaamiseen. Aseta lanka esimerkiksi sormen ympäri ja mittaa ympärysmittaan mennyt langan pituus.
- Vaippaa käyttävät asiakkaat mitataan vaippa yllä. Ilmoitathan tämän tilauslomakkeella.
- Naiset suositellaan mitattavaksi rintaliivit yllä.




Ihonmyötäinen



Liian kireä



Liian löysä

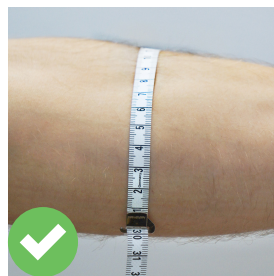


Mitta suorassa



Mitta vinossa

- Mittanauha asetetaan aina ihonmyötäisesti, joko tarkasti pysty- tai vaakasuunnassa.
- Huolehdi, että nauha ei ole kaartunut tai kierteellä.
- Käytä Lymed-mittanauhan päässä olevaa koukkuja hyväksesi mittauksessa. Koukun avulla saadaan tarkkoja mittoja ilman, että mittanauhaa tarvitsee pidellä kaksin käsin.




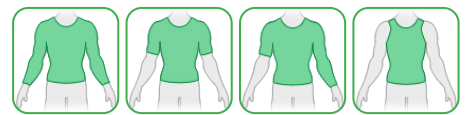


- A** Merkitse A-pisteet olkalinjan ja kaulan leikkauspisteisiin, joissa epäkäslihakset kiinnittyvät kaulan lihaksiin.
- B1** Kaulan ympärysmitta A-pisteiden kohdalta.
- B2** Rintakehän ympärysmitta kainaloiden kohdalta. Varmista, että mittanauha on vaakatasossa myös selän puolelta.
- B3** Pituusmitta A-pisteestä mittaamaan B2.
- B9** Vyötärön ympärysmitta. Vyötärön paikan voi tarvittaessa määrittää taivuttamalla kehoa kevyesti sivulle. Aikuiset: yleensä keskivartalon kapein kohta. Lapset: ellei selkeää vyötärön kohtaa löydy, mittaa vyötärö navan kohdalta.
- B11** Pituusmitta A-pisteestä vyötärölinjaan (B9).
- B12** Ympärysmitta paidan halutusta päättymiskohdasta.
- B13** Etäisyys mittapisteiden B9 ja B12 väliltä.
- B14** B13-mitan puolivälistä otettava ympärysmitta.
- B15** Etäisyys mittapisteiden B9 ja B14 väliltä.
- B17** Pituusmitta A-pisteestä paidan päättymiskohtaan (B12).
- B40** Selän pituusmitta A-pisteiden välistä (nikaman C7 kohdalta) vyötärön ympärysmitta B9.
- R1 / L1** Ympärysmitta A-pisteestä kainalon kautta takaisin A-pisteeseen.
- R3 / L3** Pituusmitta A-pisteestä olkapään kärkeen.
- R4 / L4** Pituusmitta olkapäästä kyynärpäähän. Lyhythihaisessa paidassa otetaan pituusmitta haluttuun hihan päättymiskohtaan. Jos hiha ulottuu hauiksen alapuolelle, jaa mitta kolmeen osaan. Jos hiha päättyy hauiksen kohdalle tai sen yläpuolelle, jaa se kahteen osaan. Merkitse kohdat.
- R5 / L5** Mittaa kyynärpään ja ranteen (tai halutun hihan päättymiskohdan) välinen pituus. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat ihoon.
- R6 / L6** Merkityn pisteen ympärysmitta.
- R7 / L7** Merkityn pisteen ympärysmitta.
- R8 / L8** Kyynärpään ympärysmitta.
- R9 / L9** Merkityn pisteen ympärysmitta.
- R10 / L10** Merkityn pisteen ympärysmitta.
- R11 / L11** Ranteen ympärysmitta.
- R12 / L12** Ota pituusmitta kainalosta ranteeseen tai hihan haluttuun päättymiskohtaan.

AD10 Vain poolokaulukseen: Kauluksen yläreunan ympärysmitta.

AD11 Vain poolokaulukseen: Kauluksen haluttu korkeus.



Vatsan alueen lisämitta: Käytä lisämittalomaketta 19 tuotteen istuvuuden takaamiseksi

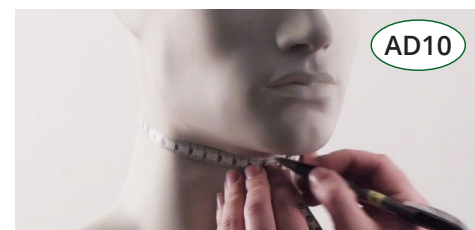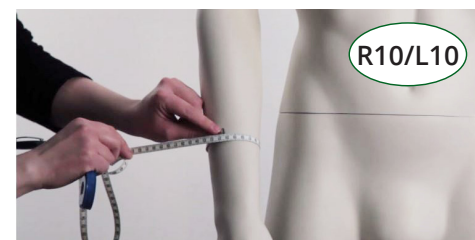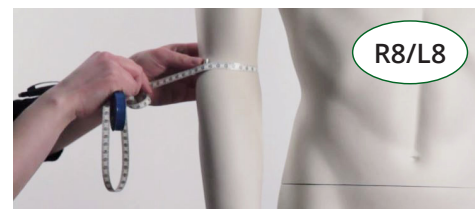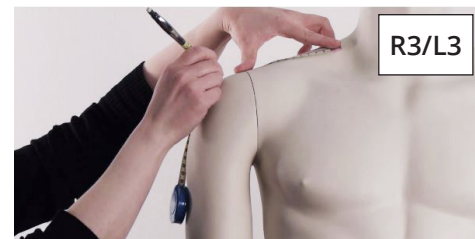

PAREESIPAITA

Pareesipaita mitataan kuten normaali paita.

E1 Ota lisäksi E1-mitta A-pisteestä sirottavan lavan korkeimpaan kohtaan (kuva mittausohjeessa 2).

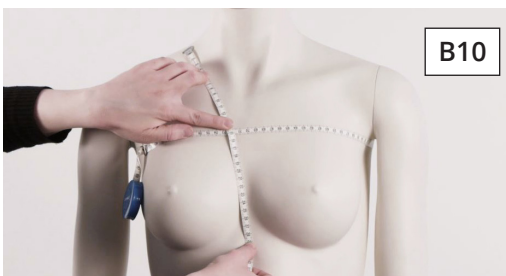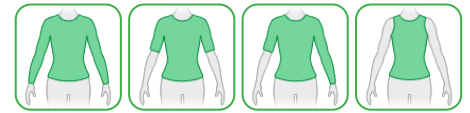

A Merkitse A-pisteet olkalinjan ja kaulan leikkauspisteisiin, joissa epäkärs-lihakset kiinnittyvät kaulan lihaksiin.

B1 Kaulan ympärysmitta A-pisteiden kohdalta.

B2 Rintakehän ympärysmitta kainaloiden kohdalta. Varmista, että mitta-nauha on vaakatasossa myös selän puolelta. Rintavilla naisilla mittanauha pyrkii asettumaan vinoon ja kohoamaan rintojen yläpuolelle. Kiinnitä huomiota, että mittanauha kulkee suorassa, kainaloiden tasossa myös edessä.

B3 Pituusmitta A-pisteestä mittaan B2.

B4 Ympärysmitta aivan rintojen alapuolelta.

R2 / L2 Pituusmitta B2 ja B4 väliltä rinnan korkeimman kohdan yli.

B6 Rintakehän ympärysmitta rintojen korkeimman kohdan yli.

B9 Vyötärön ympärysmitta. Vyötärön paikan voi tarvittaessa määrittää taivuttamalla kehoa kevyesti sivulle. Mitta on yleensä keskivartalon kapein kohta. Ellei selkeää vyötärön kohtaa löydy, mittaa vyötärö navan kohdalta.

B10 Pituusmitta A-pisteestä vyötärölinjaan (B9), kierteen rintojen välistä.

B12 Ympärysmitta paidan halutusta päättymiskohdasta.

B13 Etäisyys mittapisteiden B9 ja B12 väliltä.

B14 B13-mitan puolivälistä otettava ympärysmitta.


B15 Etäisyys mittapisteiden B9 ja B14 väliltä.

B16 Pituusmitta A-pisteestä paidan päättymiskohtaan (B12), kierteen rintojen välistä.

B40 Selän pituusmitta A-pisteiden välistä (nikaman C7 kohdalta) vyötärön ympärysmittaan B9.



R1/L1

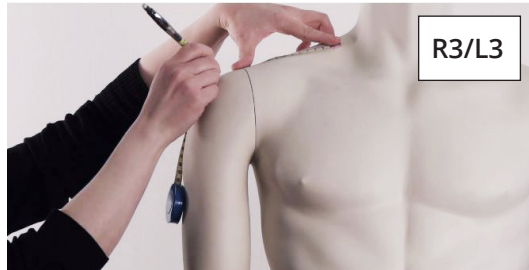


R3/L3




R5/L5




R7/L7

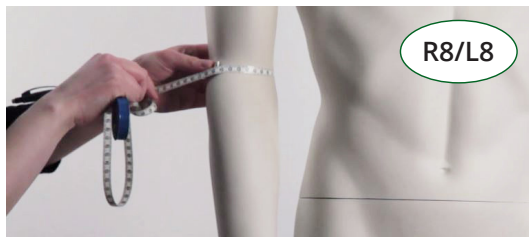

R8/L8

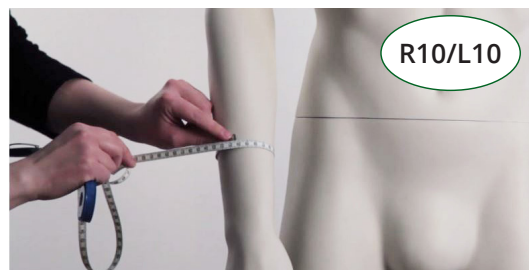

R10/L10

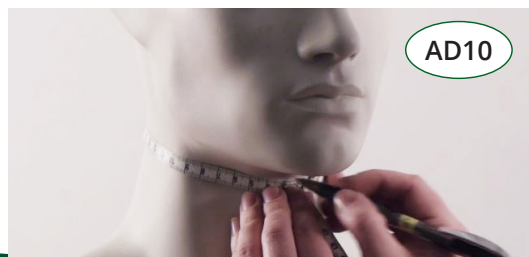


AD10

R1 / L1	Ympärysmitta A-pisteestä kainalon kautta takaisin A-pisteeseen.
R3 / L3	Pituusmitta A-pisteestä merkittyyn olkapään kärkeen.
R4 / L4	Pituusmitta olkapäästä kyynärpäähän. Lyhythihaisessa paidassa otetaan pituusmitta haluttuun hihan päättymiskohtaan. Jos hiha ulottuu hauiksen alapuolelle, jaa mitta kolmeen osaan. Jos hiha päättyy hauiksen kohdalle tai sen yläpuolelle, jaa se kahteen osaan. Merkitse kohdat.
R5 / L5	Mittaa kyynärpään ja ranteen (tai halutun hihan päättymiskohdan) välinen pituus. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat ihoon.
R6 / L6	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R7 / L7	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R8 / L8	Kyynärpään ympärysmitta.
R9 / L9	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R10 / L10	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R11 / L11	Ranteen ympärysmitta.
R12 / L12	Ota pituusmitta kainalosta ranteeseen tai hihan haluttuun päättymiskohtaan.
AD10	Vain poolokaulukseen: Kauluksen yläreunan ympärysmitta.
AD11	Vain poolokaulukseen: Kauluksen haluttu korkeus.

Vatsan alueen lisämitta:

Käytä lisämittalomaketta 19 tuotteen istuvuuden takaamiseksi


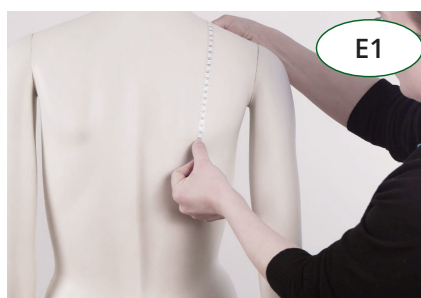


E1

PAREESIPAITA

Pareesipaita mitataan kuten normaali paita.

E1 Pituusmitta A-pisteestä saman puolen siirottavan lavan korkeimpaan kohtaan.

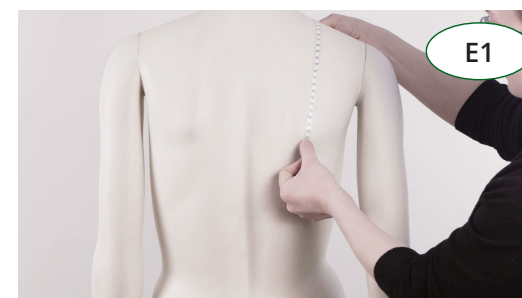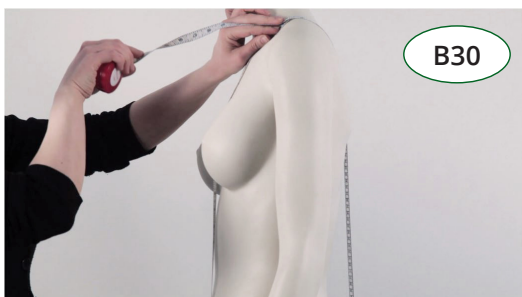

BODY

Bodyn yläosa mitataan kuten paita ja lisäksi tarvitaan ympärysmitta B30:

B30

Ympärysmitta A-pisteestä samaan A-pisteeseen, kiertäen jalkojen ja rintojen välistä.

Huomioi B12/B13 mittoja ottaessa, että mittojen sijainti tulee kohdistaa siihen kohtaan, josta tuotteen jalantien halutaan sivussa alkavan.

BODY LAHKEILLA

Tilattaessa bodya lahkeilla ota lisäksi seuraavat mitat yläreidestä:

R53 / L53

Yläreiden ympärysmitta heti pakaran alta.

R51 / L51

Pituusmitta mitasta R53/L53 lahkeen haluttuun päättymiskohtaan.

R53a / L53a

Reiden ylin ympärysmitta mahdollisimman ylhäältä haarasta. Mitta kulkee takaa pakaran päältä.

R51a / L51a

Pituusmitta R53a/L53a ja R53/L53 mittojen välistä.

R54 / L54

Lahkeen päättymiskohdan ympärysmitta.

B27

Pituusmitta vyötäröltä mitaan R53/L53.

PAREESIBODY

Pareesibody mitataan kuten normaali body. Lisäksi mitataan:

E1


Pituusmitta A-pisteestä saman puolen sirottavan lavan korkeimpaan kohtaan.




R5/L5




R7/L7

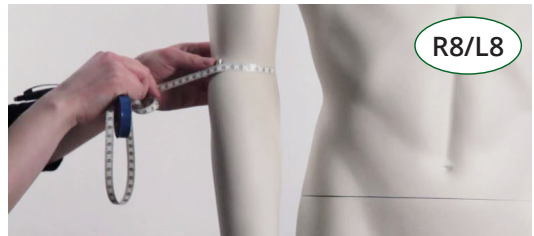

R8/L8

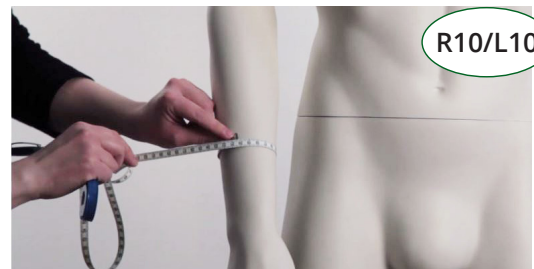

R10/L10

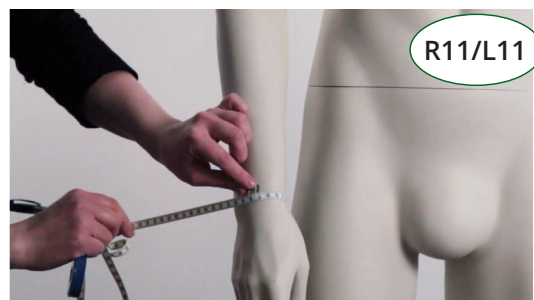

R11/L11

HIHA

Merkitse hihan ylä- ja alareunan paikat.

R4 / L4

Pituusmitta halutusta hihan yläreunasta kyynärpäähän. Jaa pituus kahteen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.

R5 / L5

Pituusmitta kyynärpäältä ranteeseen tai haluttuun päättymiskohtaan. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.

R6 / L6

Hihan halutun yläreunan ympärysmitta.

R7 / L7

Merkityn pisteen ympärysmitta.

R8 / L8

Kyynärpään ympärysmitta.

R9 / L9

Merkityn pisteen ympärysmitta.

R10 / L10



Merkityn pisteen ympärysmitta.

R11 / L11

Ranteen tai hihan päättymiskohdan ympärysmitta.

R12 / L12


Pituusmitta kainalosta ranteeseen tai hihan haluttuun päättymiskohtaan saakka.

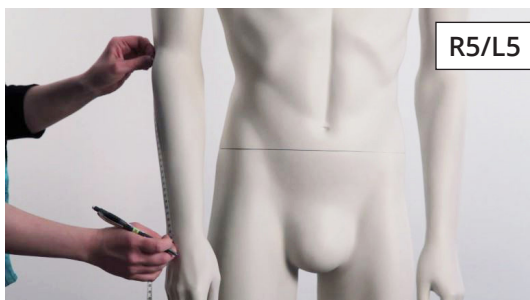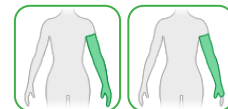

R5/L5

HIHAOSUUS

Merkitse hihan yläreunan paikka.

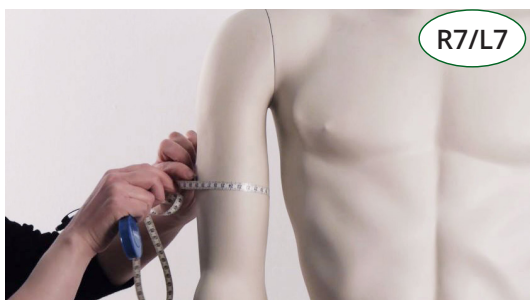

R7/L7

R4 / L4

Pituusmitta halutusta hihan yläreunasta kyynärpäähän. Jaa pituus kahteen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.

R5 / L5


Pituusmitta kyynärpästä ranteeseen tai haluttuun päättymiskohtaan. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.

R6 / L6

Hihan halutun yläreunan ympärysmitta.

R7 / L7

Merkityn pisteen ympärysmitta.

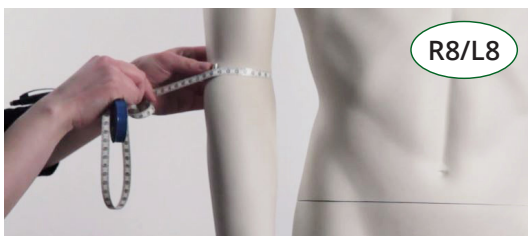

R8/L8

R8 / L8

Kyynärpään ympärysmitta.

R9 / L9

Merkityn pisteen ympärysmitta.



R10/L10

R10 / L10

Merkityn pisteen ympärysmitta.



R11/L11

R12 / L12


Pituusmitta kainalosta ranteeseen.

HIHA-KÄMMENKÄSINE

Mittaa hiha (lomakkeet 6, 7 tai 8) ja käsine (lomake 9). Huomioi, että ympärysmitta R11/L11 on oltava sama mitta hiha- ja käsinelomakkeissa.

HIHA-KÄSINE


Mittaa hiha (lomakkeet 6, 7 tai 8) ja käsine (lomake 9). Huomioi, että ympärysmitta R11/L11 on oltava sama mitta hiha- ja käsinelomakkeissa.

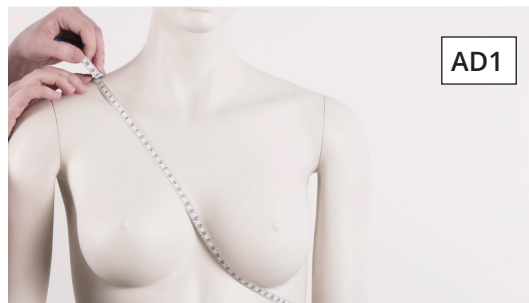

AD1

MALLI 1

AD1 Kiinnityskohdan ympärysmitta. Mittaa A-pisteestä, rintojen välistä, vastakkaisen kyljen kautta takaisin A-pisteeseen.

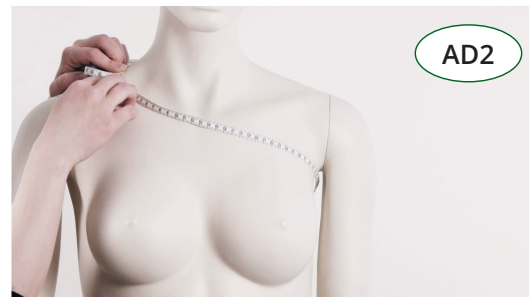

AD2

MALLI 2

AD2 Kiinnityskohdan ympärysmitta. Mittaa A-pisteestä vastakkaisen kainalon kautta takaisin A-pisteeseen.



B2

MALLI 3 - VASTAHIHA

A Merkitse A-pisteet olkalinjan ja kaulan leikkauspisteisiin, joissa epäkäslihakset kiinnittyvät kaulan lihaksiin.

B2 Rintakehän ympärysmitta kainaloiden kohdalta. Varmista, että mittanauha on vaakatasossa myös selän puolelta.

B3 Pituusmitta A-pisteestä mitta B2.

R1 / L1 Ympärysmitta A-pisteestä kainalon kautta takaisin A-pisteeseen.


R3 / L3 Pituusmitta A-pisteestä olkapään kärkeen.

R4 / L4 Pituusmitta olkapään kärjestä kyynärpäähän. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.


R5 / L5 Pituusmitta kyynärpäältä ranteeseen tai haluttuun päättymiskohtaan. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse paikat.

**R6 - R11
L6 - L11** Merkittyjen pisteiden ympärysmitat.

R12 / L12 Pituusmitta kainalosta ranteeseen.

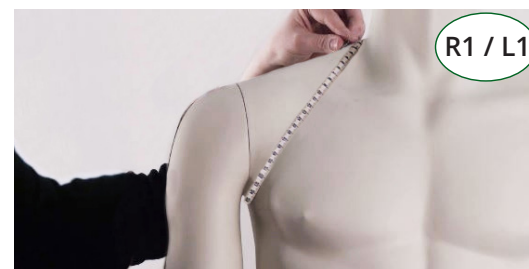

R1 / L1

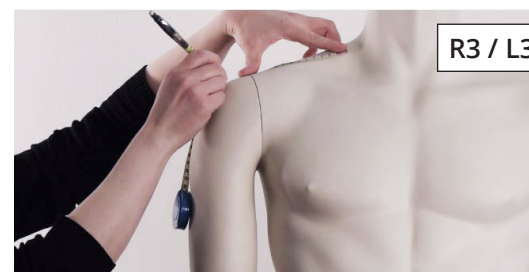

R3 / L3



R4 / L4



R11 / L11



R15 / L15



R20 / L20



R21 / L21



R22 / L22



R24 / L24



R36 / L36



R37 / L37

KÄSINE

Käsi mitataan pöytäpintaa vasten rentona, kämmen ylöspäin.

R11 / L11 Ranteen ympärysmitta.

R15 / L15 Pituusmitta ranteesta käsineen varren päättymiskohtaan. Merkitse kohta.

R16 / L16 Käsineen halutun päättymiskohdan ympärysmitta.

R17 / L17 Pituusmitta viivoittimella peukalonhangasta suoraan alas rannelinjalle.

**R18-20
L18-20** Pituusmitat viivoittimella kämmenen puolelta sormien väleistä rannelinjalle.

R21 / L21 Ympärysmitta MCP-nivelten kohdalta, sormien ollessa yhdessä ja ojennettuina.

R22 / L22 Peukalon tyven ympärysmitta, MP-nivelen yläpuolelta.

R23 / L23 Peukalon DIP-nivelen ympärysmitta.

R24 / L24 Peukalon pituusmitta tai pituusmitta avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

**R25-27
L25-27** Kolme etusormen nivelten ympärysmittaa tyvestä sormenpäähen edeten tai avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

R28 / L28 Etusormen pituusmitta tai pituusmitta avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

**R29-31
L29-31** Kolme keskisormen nivelten ympärysmittaa, tyvestä sormenpäähen edeten.

R32 / L32 Keskisormen pituusmitta tai pituusmitta avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

**R33-35
L33-35** Kolme nimettömän nivelten ympärysmittaa, tyvestä sormenpäähen edeten.

R36 / L36 Nimettömän pituusmitta tai pituusmitta avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

**R37-39
L37-39** Kolme pikkusormen nivelten ympärysmittaa, tyvestä sormenpäähen edeten.

R40 / L40 Pikkusormen pituusmitta tai pituusmitta avonaisen kärjen loppumispisteeseen asti.

KÄMMENKÄSINE

Kämmen mitataan samaan tapaan kuin käsineessä.

Sormien mitat otetaan ainoastaan peukalosta.



Pituusmitat L18/R18 - L20/R20 otetaan haluttuun kämmenkäsineen reunaan, ei sormien väleihin kuten käsineessä.

PITKÄVARTINEN KÄSINE TAI KÄMMENKÄSINE

Mittaa pitkävartista tuotetta varten myös hiha (lomakkeet 6, 7 tai 8). Huomioi, että ranteen ympärysmitta R11/L11 on sama mitta hiha- ja käsinelomakkeissa.

SORMITUPPI

Mitataan halutun sormen mitat kuten käsineessä.

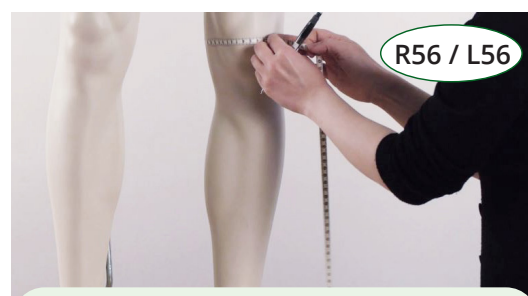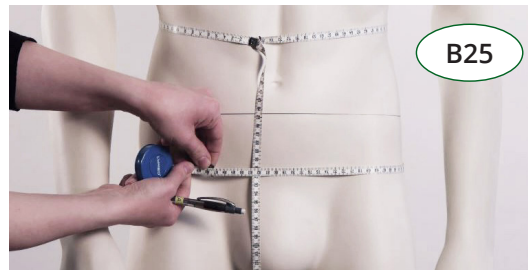

Äitiysvatsamuotoilu housuihin:
katso mittausohje kohdasta
Lisävalinnat

Vatsan alueen lisämitta:
Käytä lisämittalomaketta 19
tuotteen istuvuuden takaamiseksi

HOUSUT

B20 Vyötärön ympärysmitta. Vyötärön paikan voi tarvittaessa määrittää taivuttamalla kehoa kevyesti sivulle. Aikuiset: yleensä keskivartalon kapein kohta. Lapset: ellei selkeää vyötärön kohtaa löydy, mittaa vyötärö navan kohdalta. Mitta on housujen päättymiskohta normaali-vyötäröisessä mallissa. Merkitse kohta kehon etupuolelle.

B21 Mittaa vain korkeavyötäröiseen malliin. Ympärysmitta housujen halutusta yläreunasta. Merkitse kohta kehon etupuolelle.

B22 Mittaa vain korkeavyötäröiseen malliin. Pituusmitta housun halutusta yläreunasta (B21) vyötärölle (B20), etupuolelta mitattuna.

B23 B26-mitan puolivälistä otettava ympärysmitta.

B24 Pituusmitta vyötäröltä ylälantiolle (B23), etupuolelta mitattuna.

B25 Lantion leveimmän kohdan ympärysmitta. Mikäli asiakkaan levein kohta on haaralinjan alapuolella, ota mitta 5 cm haaralinjan yläpuolelta. Merkitse kohta kehon etupuolelle.

B26 Pituusmitta vyötäröltä lantion leveimpään kohtaan (B25), etupuolelta mitattuna.

B27 Pituusmitta vyötäröltä suorana reiden ylimpään ympärykseen (R53/L53), etupuolelta mitattuna.

R51 / L51 Pituusmitta yläreidestä polvilumpion keskelle, etupuolelta mitattuna. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat.

R52 / L52 Pituusmitta polvesta nilkan kapeimpaan kohtaan tai haluttuun lahkeen päättymiskohtaan, etupuolelta mitattuna. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat.

R53 / L53 Reiden ympärysmitta heti pakaralta.

R53a / L53a Reiden ylin ympärysmitta mahdollisimman ylhäältä haarasta. Mitta kulkee takaa pakaralta.

R51a / L51a Pituusmitta R53a/L53a ja R53/L53 mittojen välistä.

R54 / L54 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R55 / L55 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R56 / L56 Polven ympärysmitta polvilumpion keskikohdasta.

R59 / L59 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R60 / L60 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R61 / L61 Nilkan ympärysmitta.

SUKKAHOUSUT / HOUSUT JALKATERÄLLÄ

Mittaa housuosa seuraamalla ylläolevia ohjeita. Jalkaterän mitat jatketaan seuraamalla nilkkasukan mittausohjetta.



R51 / L51

Pituusmitta sukan halutusta yläreunasta polvilumpion keskelle, etupuolelta mitattuna. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat. Yläreuna kannattaa mitata niin ylös kuin mahdollista.



R52 / L52

Pituusmitta etupuolelta mitattuna, polvilumpion keskeltä nilkan kapeimpaan kohtaan malleoluksen yläpuolelle. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat.




R53 / L53

Jalkaputken yläreunan ympärysmitta. Suositellaan otettavaksi reiden ylimmän mahdollisen ympäryksen kohdalta, kuitenkin pakaran alapuolelta.

R54 / L54

Merkityn pisteen ympärysmitta.

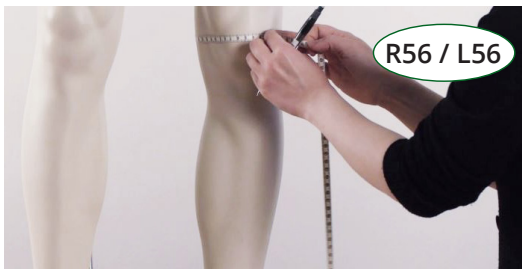

R55 / L55

Merkityn pisteen ympärysmitta.



R56 / L56

Polven ympärysmitta polvilumpion keskikohdasta.

R59 / L59

Merkityn pisteen ympärysmitta.



R60 / L60

Merkityn pisteen ympärysmitta.

R61/L61

Nilkan ympärysmitta malleoluksen yläpuolelta.




VYÖTÄRÖKIINNITYS JALKAPUTKEEN

B27

Pituusmitta yläreiden ylimmästä ympärysmittasta R53/L53 suorana vyötärökiinnityksen haluttuun yläreunaan asti, etupuolelta mitattuna.

B20

Ympärysmitta B27-mitan päätymiskohdasta

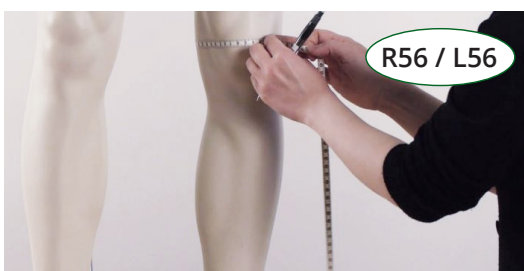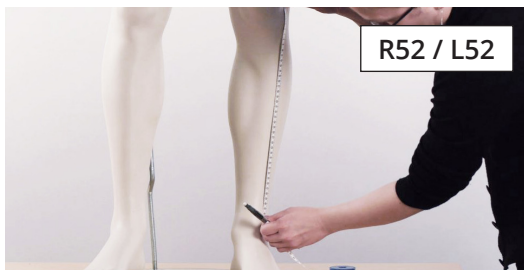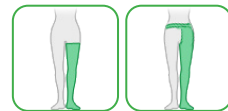



R51 / L51	Pituusmitta sukan halutusta yläreunasta polvilumpion keskelle, etupuolelta mitattuna. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat. Yläreuna kannattaa mitata niin ylös kuin mahdollista.
R52 / L52	Pituusmitta etupuolelta mitattuna, polvilumpion keskeltä nilkan kapeimpaan kohtaan malleoluksen yläpuolelle. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan ja merkitse kohdat.
R53 / L53	Sukan yläreunan ympärysmitta. Suositellaan otettavaksi reiden ylimmän mahdollisen ympäryksen kohdalta, kuitenkin pakarän alapuolelta.
R54 / L54	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R55 / L55	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R56 / L56	Polven ympärysmitta polvilumpion keskikohdasta.
R59 / L59	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R60 / L60	Merkityn pisteen ympärysmitta.
R61 / L61	Nilkan ympärysmitta malleoluksen yläpuolelta.
R63 / L63	Pituusmitta sukan yläreunasta nilkkaan, etupuolelta mitattuna.
R64 / L64	Diagonaalinen ympärysmitta kantapään kärjestä nilkanivelen yli.
R65 / L65	Ympärysmitta jalkapöydän korkeimmalta kohdalta (metatarsaali).
R66 / L66	Jalkapöydän ympärysmitta pikkuvarpaan juuresta (MTP-nivel).
R67 / L67	Pituusmitta nilkasta (R61/L61) lattiaan, otettuna jalan ulkopuolelta.
R68 / L68	Pituusmitta kantapäästä jalkapöydän korkeimpaan kohtaan (R/L65) lattiaa myöten.
R69 / L69	Pituusmitta kantapäästä pikkuvarpaan MTP-niveleen (R66/L66) lattiaa myöten. Käytä kynää apuna asettamalla se kantapään taakse.
R70 / L70	Pituusmitta kantapäästä isovarpaan kärkeen lattiaa myöten. Käytä kynää apuna asettamalla se kantapään taakse.
KÄRKI KIINNI	Piirrä jalan ääriviivat myös tilauslomakkeelle 14.
KÄRKI AUKI	Mittaa R69/L69 kärkiosan haluttuun päättymiskohtaan saakka ulkosyrjältä/pikkuvarpaan puolelta, ja ota ympärysmitta R/L66 tästä kohdasta. Ulkosyrjä kaavoitetaan annetun mitan mukaisesti ja sisäsyrjä mitoitetaan 1,5 cm pidemmäksi, istuvuuden parantamiseksi.

VARVASSUKKA JA MUUT

Käytä vielä lisäksi tilauslomaketta 13 sekä varvassukan mittausohjetta.

VYÖTÄRÖKIINNITYS REISIPITUUSEEN SUKKAAN

B27	Pituusmitta yläreiden ylimmästä ympärysmittasta R53/L53 suorana vyötärökiinnityksen haluttuun yläreunaan asti, etupuolelta mitattuna.
B20	Ympärysmitta B27-mitan päättymiskohdasta

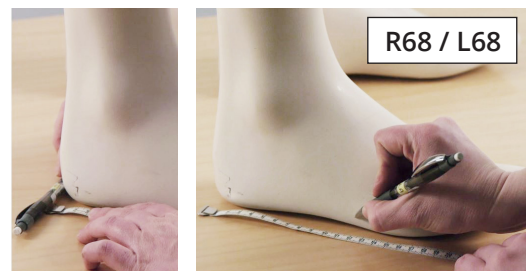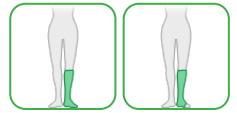

R57 / L57 Sukan yläreunan ympärysmitta.

R58 / L58 Pituusmitta sukan yläreunasta nilkan kapeimpaan kohtaan malleoluksen yläpuolelle, etupuolelta mitattuna. Jaa pituus kolmeen yhtä suureen osaan. Merkitse kohdat.

R59 / L59 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R60 / L60 Merkityn pisteen ympärysmitta.

R61 / L61 Nilkan ympärysmitta.

R64 / L64 Diagonaalinen ympärysmitta kantapään kärjestä nilkkanivelen yli.

R65 / L65 Ympärysmitta jalkapöydän korkeimmalta kohdalta (metatarsaali).

R66 / L66 Jalkapöydän ympärysmitta pikkuvarpaan juuresta (MTP-nivel).

R67 / L67 Pituusmitta nilkasta (R61/L61) lattiaan, otettuna jalan ulkopuolelta.

R68 / L68 Pituusmitta kantapäästä jalkapöydän korkeimpaan kohtaan (R/L65) lattiaa myöten.

R69 / L69 Pituusmitta kantapäästä pikkuvarpaan MTP-niveleen (R66/L66) lattiaa myöten. Käytä kynää apuna asettamalla se kantapään taakse.

R70 / L70 Pituusmitta kantapäästä isovarpaan kärkeen lattiaa myöten. Käytä kynää apuna asettamalla se kantapään taakse.

KÄRKI KIINNI Piirrä jalan ääriviivat myös tilauslomakkeelle 14.

KÄRKI AUKI Mittaa R69/L69 kärkiosan haluttuun päättymiskohtaan saakka ulkosyrjältä/pikkuvarpaan puolelta, ja ota ympärysmitta R/L66 tästä kohdasta. Ulkosyrjä kaavoitetaan annetun mitan mukaisesti ja sisäsyryä mitoitetaan 1,5 cm pidemmäksi, istuvuuden parantamiseksi.

VARVAS-SUKKA JA MUUT Käytä vielä lisäksi tilauslomaketta 13 sekä varvassukan mittausohjetta.

LISÄMITTA: SPORT-SÄÄRYSTIN JA POLVISUKKA

R93 / L93 Akillesvauhvikkeen pituusmitta L/R61-mitasta kaksoiskantalihakseen alkamispisteeseen. Mitataan pohjelihas rentona.





R60 / L60

Ympärysmitta sukan halutusta päättymiskohdasta, merkitse kohta säären etupuolelle.



R61 / L61

R61 / L61

Nilkan ympärysmitta, merkitse kohta nilkan etupuolelle.



R58 / L58

Pituusmitta halutusta sukan päättymiskohdasta nilkkaan, etupuolelta mitattuna.



R64 / L64

R64 / L64

Diagonaalinen ympärysmitta kantapään kärjestä nilkkanivelen yli.



R65 / L65

R65 / L65


Ympärysmitta jalkapöydän korkeimmalta kohdalta (metatarsaali).



R66 / L66

R66 / L66

Jalkapöydän ympärysmitta pikkuvarpaan juuresta (MTP-nivel).

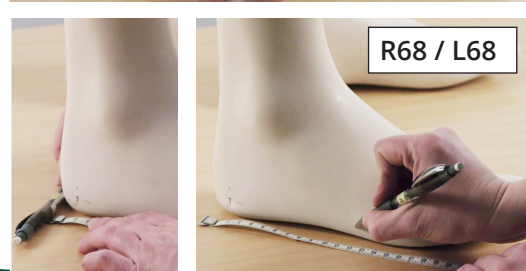

R67 / L67

R67 / L67

Pituusmitta nilkasta (R61/L61) lattiaan, otettuna jalan ulkopuolelta.



R68 / L68

R68 / L68

Pituusmitta kantapäästä jalkapöydän korkeimpaan kohtaan (R/65L65) lattiaa myöten. Käytä kynää mittausapuna asettamalla se kantapään taakse.

R69 / L69

Pituusmitta kantapäästä pikkuvarpaan MTP-niveleen (R66/L66) lattiaa myöten. Käytä kynää mittausapuna asettamalla se kantapään taakse.

R70 / L70

Pituusmitta kantapäästä isovarpaan kärkeen lattiaa myöten. Käytä kynää mittausapuna asettamalla se kantapään taakse.

KÄRKI KIINNI

Piirrä jalan ääriviivat myös tilauslomakkeelle 14.

KÄRKI AUKI

Mittaa R69/L69 kärkiosan haluttuun päättymiskohtaan saakka ulkosyrjältä/pikkuvarpaan puolelta, ja ota ympärysmitta R/L66 tästä kohdasta. Ulkosyrjä kaavoitetaan annetun mitan mukaisesti ja sisäsyrjä mitoitetaan 1,5 cm pidemmäksi, istuvuuden parantamiseksi.

**VARVASSUKKA
JA MUUT**

Käytä vielä lisäksi tilauslomaketta 13 sekä varvassukan mittausohjetta.



lom. 14



R72 / L72



R75 / L75

R66 / L66



R80 / L80



R88 / L88



R89 / L89

VARVASOSA

Ota varvassukkaa varten tarvittavat sukan mitat sekä seuraavat varvasosan mitat:

R71-74 Pituusmitat varpaiden välistä ympärysmittaan R66/L66, isovarpaasta alkaen.
L71-74

R75-79 Varpaiden pituusmitat (MTP-nivelistä lähtien) tai mitat avonaisen kärjen loppumispisteeseen.
L75-79

R80-81 Kaksi ympärysmittaa isovarpaasta (MTP- ja PIP-nivelet)
L80-81

R82-89 Kaksi ympärysmittaa jokaisesta pikkuvarpaasta (MTP- ja DIP-nivelet).
L82-89

R90 / L90 Pikkuvarpaiden ympärysmitta MTP-nivelten kohdalta, varpaat yhdessä.


ERILLINEN VARVIKAS

Mittaa varpaat kuten varvassukassa ja jatka seuraavin mitoin:

R66 / L66 Jalkapöydän ympärysmitta vaakasuoraan pikkuvarpaan juuresta (MTP-nivel).

R91 / L91 Pituusmitta jalkapöydän ympärysmittasta (R66/L66) haluttuun varvasosan päättymiskohtaan.

R92 / L92 Varvasosan päättymiskohdan ympärysmitta.

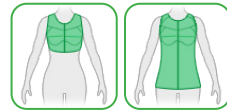

RINTALIIVI

A Merkitse A-pisteet olkalinjan ja kaulan leikkauspisteisiin, joissa epäkäslihakset kiinnittyvät kaulan lihaksiin.

B2 Ympärysmitta ylhäältä kainalon kohdalta. Varmista, että mittanauha on vaakatasossa myös selän puolelta. Rintavilla naisilla mittanauha pyrkii asettumaan vinoon ja kohoamaan rintojen yläpuolelle. Kiinnitä huomiota, että mittanauha kulkee suorassa, kainaloitten tasossa, myös edessä.

B3 Pituusmitta A-pisteestä mitaan B2.

B4 Ympärysmitta aivan rintojen alapuolelta.

R2/L2 Pituusmitta B2 ja B4 väliltä rinnan korkeimman kohdan yli.

B5 Pituusmitta B2 ja B4 väliltä rintojen välistä, ihoa pitkin mitaten.

B6 Rintakehän ympärysmitta rintojen korkeimman kohdan yli.

Rintaliivit pidennetyllä helmalla:

Mikäli liivin halutaan jatkuvan hieman rintojen alapuolta pidemmälle:

***B7** Korkeusmitta B4 linjalta B9 linjalle.

***B9** Ympärysmitta halutusta liivin päättymiskohdasta.

Mikäli tuotteen halutaan jatkuvan vyötärölinjan alapuolelle, tilaa rintaliivitoppi.

Vatsan alueen lisämitta:

Käytä lisämittalomaketta 19 tuotteen vatsanalueen istuvuuden takaamiseksi.

Suosittellemme ottamaan mitat aina keveiden rintaliivien kanssa.

Isot rinnat:

- Rintojen asento mittaushetkellä vaikuttaa rintaliivien kuppien muotoon ja siihen kuinka paljon rintaliivit antavat tukea.
- Rinnat kannattaa kannatella siihen asentoon, johon ne halutaan rintaliivien avulla asettuvan.
- Mikäli asiakas ei käytä rintaliivejä, kannattaa rintoja kannatella esimerkiksi käsin mittaushetkellä.

RINTALIIVITOPPI

Mitat otetaan muuten vastaavasti kuten rintaliivissä ja sen lisäksi:

B7 Korkeusmitta B4 linjalta B9 linjalle.



B9 Vyötärön ympärysmitta, yleensä keskivartalon kapeimmasta kohdasta. Vyötärön paikan voi tarvittaessa määrittää taivuttamalla kehoa kevyesti sivulta sivulle.

B12 Ympärysmitta paidan halutusta päättymiskohdasta

B13 Etäisyys mittapisteiden B9 ja B12 väliltä.

B14 B13-mitan puolivälistä otettava ympärysmitta.

B15 Etäisyys mittapisteiden B9 ja B14 väliltä.

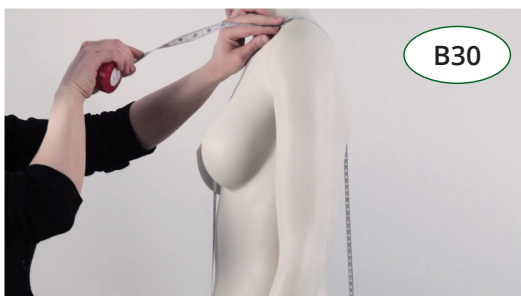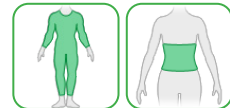**HAALARI**

Mittaa paita lomakkeille 3, 4 tai 5 ja housut lomakkeelle 10.

B30

Ota lisäksi B30-Ympärysmitta A-pisteestä samaan A-pisteeseen, kiertäen jalkojen ja rintojen välistä.

Merkitse ylävartalon mitat lomakkeelle 3, 4 tai 5 mittaan B9 asti ja alavartalon mitat lomakkeelle 10.

Huomioi, että paitalomakkeella B9-mitan on oltava sama kuin housulomakkeella B20-mitan.

VATSATUKI


Mittaa ympärysmitat B9, B12 ja B14 soveltaen paidan mittausohjetta tuotteen halutun korkeuden mukaan.

Ota myös tarvittaessa ylimääräinen ympärysmitta tuen halutun yläreunan kohdalta.

Riippuen halutusta korkeudesta mittaa pituusmitat B15, B13 ja tarvittaessa mitta vyötäröltä haluttuun yläreunaan.

Vatsan alueen lisämitta:

Käytä lisämittalomaketta 19 tuotteen istuvuuden takaamiseksi

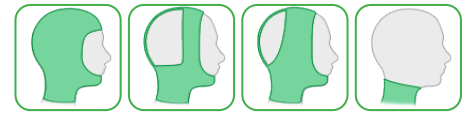

H1



H2




H3




H4



H5

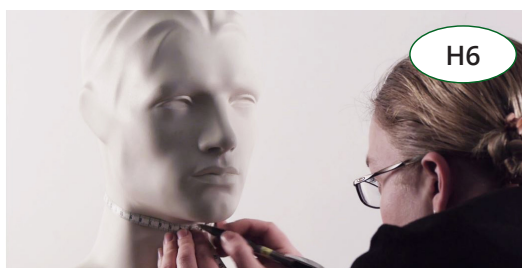

H6

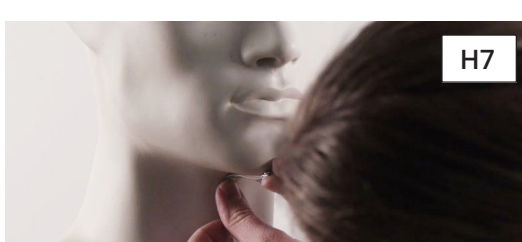

H7

HUPPU

H1 Ympärysmitta pään leveimmältä kohdalta (korvien yläpuolelta).

H2 Mitta korvasta korvaan (korvan yläreunasta) pääläen kautta.

H3 Mitta silmäkulmasta takaraivon kautta toiseen silmäkulmaan.

H4 Leuka – lakipisteen ympärysmitta.

H5 Mitta leuan kärjestä huulten väliin.

H6 Kaulan ympärysmitta leuan alapuolelta.

H7 Mitta leuan kärjestä kaulan alkamiskohtaan.

H8 Ympärysmitta kaulan alareunasta.

H9 Mitta leuan alapuolelta kaulaosuuden päättymiskohtaan.

KAULURI

Mittaa kauluria varten ympärysmittat H6, H8 ja H9.

PÄÄHINE

Mittaa kuten huppu, mutta mittoja H1, H2 ja H3 ei tarvita päähinettä varten.

PENISPUTKI

B50 Ylin mahdollinen ympärysmitta.

B51 Ympärysmitta leveimmästä kohdasta.

B52 Alin mahdollinen ympärysmitta tai avokärkisessä tuotteessa haluttu päättymiskohta.

B53 Pituusmitta ympärysmittojen B50 ja B51 väliltä.

B54 Pituusmitta ympärysmittojen B51 ja B52 väliltä.

B55 Pituusmitta ympäryksestä B52 peniksen tyveen asti, päältä mitaten.

Umpikärkiseen malliin lisäksi:

B56 Viivotinsuora pituusmitta alimmasta ympäryydestä B52 peniksen kärkeen.

Noudata tuotekohtaisia mittausohjeita niin pitkälle kuin mahdollista.

Tyngän pää määrittää, mihin asti normaaleja mittapisteitä voidaan missäkin tapauksessa käyttää.

Käytä mitoille tuotekohtaisia tilauslomakkeita tyngän päähän asti.

TYNGÄN PÄÄ

MA1 Viimeinen mahdollinen ympärys, joka tyngästä voidaan mitata. Tämä ympärysmitta on siis sama kuin tilauslomakkeessa ilmoitettu ympärys.

MA2 Tyngän viivotinsuora korkeus linjalta MA1 tyngän päähän.

MA3 Mitataan edestä ympärysmittasta MA1 taakse ympärysinjalle MA1 mittanauhaa tyngän pintaa pitkin kuljettaen.

MA4 Mitataan ympärysmittasta MA1 sivusta mittanauhaa tyngän pintaa pitkin kuljettaen toiseen sivuun ympärysinjalle MA1.

Ota tyngästä valokuva (mielellään edestä ja sivusta). Valitsemme tyngän muodon perusteella amputaatiopussin kärjen muotoilun.

Mikäli tyngän päässä on pehmeää kudosta, tulisi mittaustulisi tehdä massaa kannatellen. Massaa kannatellaan siten, että se on mitatessa paikalla, jonne se asettuisi tuotteen ollessa puettuna. Mahdollisuuksien mukaan tynkä kannattaa mitata tyngän pää ylöspäin suunnattuna - näin valmis tuote saadaan istumaan tiukasti myös tyngän päästä.

Pyri ottamaan kaikki tuotteen mitat tynkä ja tyngän pää samassa asennossa, jotta asennon vaihtelu ei vaikuta mittoihin.

Vinkki!

Tyngät ovat yleensä haastavia mitata, joten älä epäröi ottaa täydentäviä lisämittoja.

ULKONEVA TYRÄPUSSI

- MB1** Vartalon ympärys ennen tyrän muodon alkamiskohtaa.
- MB2** Vartalon ympärys keskeltä.
- MB3** Vartalon ympärys alhaalta, heti tyrän ylimmän ympäryyden yläpuolelta.
- MB4** Viivotinsuora korkeusmitta MB 1 ja MB 4 väliltä.
- MB5** Viivotinsuora korkeusmitta MB 2 ja MB 3 väliltä.
- *MB6** Ympärysmitta ylhäältä tyrän päästä.
- *MB7** Pituusmitta alkaen keskeltä edestä MB 1 ympäryyden kohdalta, mittanauhaa tyrän pintaa pitkin kuljettaen MB6 ympäryyden kohdalle.
- MB8** Pituusmitta keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten MB 6 ja MB 2 välillä.
- MB9** Tyrän ylin ympärysmitta. Mitataan niin ylhäältä kuin mahdollista mitata, kuitenkin siten, että mittanauha pysyy vaakasuorassa.
- MB10** Pituusmitta keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten linjan MB 2 kohdalta MB 9 kohdalle
- MB11** Ympärysmitta tyrän puolivälistä.
- MB12** Ympärysmitta tyrästä niin alhaalta kuin mahdollista.
- MB13** Viivotinsuora korkeusmitta MB 9 ja MB 11 linjojen väliltä.
- MB14** Viivotinsuora korkeusmitta MB 11 ja MB 12 väliltä.
- MB15** Pituusmitta keskeltä edestä mitaten MB 9 linjan kohdalta jatkaen mittaamista tyrän takapuolelle vastaavaan kohtaan.
- MB16** Viivotinsuoran korkeuden linjalta MB 12 tyrän päähän.
- MB17** Mitataan edestä ympärysmitasta MB 12 taakse ympäryslinjalle MB 12 mittanauhaa tyngän pintaa pitkin kuljettaen.
- MB18** Mitataan ympärysmitasta MB 12 sivusta mittanauhaa tyrän pintaa pitkin kuljettaen toiseen sivuun ympäryslinjalle MB 13.

Mittaa näin kun tuotteeseen halutaan oma erillinen roikkuva pussi kannattelemaan ja tuomaan painetta tyrään tai vastaavaan muotoon. Tyrä roikkuu reilusti haaralinjan alapuolella.

Huomio: mikäli kudος on pehmeää ja muotoutuva, mittaus tulisi tehdä massaa kannatellen. Massaa kannatellaan siten, että se on mitatessa paikalla, jonne se asettuisi tuotteen ollessa puettuna. Pyri ottamaan kaikki tuotteen mitat massa kannateltuna samaan asentoon, jotta asennon vaihtelu ei vaikuta mittoihin.

Ota tyrästä valokuva (mielellään edestä ja sivusta), merkitse kuvaan mittalinjat.

Vinkki! Viivotinsuorat pituusmitat voi olla helpoin mitata hieman sivusta, jotta voimakas muoto ei vääristä mittoja.

Mikäli tyrän muoto ei ole vastaava kuin mittalomakkeen kuvassa, eikä tyrästä ei ole mahdollista ottaa ympärystä MB 6, jätä ympärys tällöin ottamatta.

Tällöin pituusmitta MB 8 kulkee keskellä edessä ihoa pitkin MB 1 linjan kohdalta MB 2 linjan kohdalle.

Ilmoita lisätiedoissa mikäli tyrän muoto sellainen, että MB 6 ja MB 7 mittoja ei ole otettu

Mikäli pussi halutaan kiinnittävän housuun, mittaa lahkeiden mitat housulomakkeelle (tilauslomake 10). Mittaa housun haluttu päättymiskohta vyötäröllä, sekä sen korkeus mittaan MB 1. Lisäksi mitataan B27 kuten housussa.

Mikäli tyrä on muodoltaan hyvin moninainen voi tyrästä ottaa lisäympäryydet mittojen MB 9 ja MB 11 puolivälistä ja MB 11 ja MB 12 puolivälistä.

Käytä lomaketta silloin kun vatsan muoto vaatii sen, että vatsatuesta tulee reilusti pidempi edestä kuin takaa.

Huomio: mikäli kudokset on pehmeää ja muotoutuvaa mittaus tulisi tehdä massaa kannatellen. Massaa kannatellaan siten, että se on mitatessa paikalla, jonne se asettuisi tuotteen ollessa puettuna. Pyri ottamaan kaikki tuotteen mitat massa kannateltuna samaan asentoon, jotta asennon vaihtelu ei vaikuta mittoihin.

Ota tarvittaessa valokuva (mielessään edestä ja sivusta), merkitse kuvaan mittalinjat.

VATSATUKI

MC1 Ympärysmitta ylhäältä vatsatuen halutusta alkamiskohdasta. Edessä mitta kulkee vatsakummun yläpuolelta ja takana kohdasta johon vatsatuen halutaan takana päättyvän. Mitta saa kulkea tarvittaessa vinossa linjassa

MC2 ympärysmitta noin MC 1 ja MC 3 mittojen puolivälistä.

MC3 Vaakasuora ympärysmitta vatsan keskeltä.

MC4 Ympärysmitta noin MC 3 ja MC 5 välistä.

MC5 Ympärysmitta alhaalta vatsatuen halutusta päättymiskohdasta.

MC6 Pituus MC 1 ja MC 2 välisestä etäisyydestä keskeltä takaa mitaten.

MC7 Pituus MC 2 ja MC 3 välisestä etäisyydestä keskeltä takaa mitaten.

MC8 Pituus MC 3 ja MC 4 välisestä etäisyydestä keskeltä takaa mitaten.

MC9 Pituus MC 4 ja MC 5 välisestä etäisyydestä keskeltä takaa mitaten.

MC10 Pituus MC 1 ja MC 2 välisestä etäisyydestä keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten.

MC11 Pituus MC 2 ja MC 3 välisestä etäisyydestä keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten.

MC12 Pituus MC 3 ja MC 4 välisestä etäisyydestä keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten.

MC13 Pituus MC 4 ja MC 5 välisestä etäisyydestä keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten.

Käytä lomaketta silloin, kun vatsan muoto vaatii sen, että paidasta tehdään pidempi edestä ja lyhyempi takaa.

Huomio mikäli kudos on pehmeää ja muotoutuvaa mittaus tulisi tehdä massaa kannatellen. Massaa kannatellaan siten, että se on mitatessa paikalla, jonne se asettuisi tuotteen ollessa puettuna. Pyri ottamaan kaikki tuotteen mitat massa kannateltuna samaan asentoon, jotta asennon vaihtelu ei vaikuta mittoihin.

Useimmissa tapauksissa voit mitata paidan B9 mittaan asti normaalille paitalomakkeelle. Tällöin B9 mitta vastaa MD 1 mittaa ja B9/MD1 mitoitetaan alkamaan vatsakummun alkamiskohdasta.

Vinkki! Viivotinsuorat pituusmitat voi olla helpoin mitata hieman sivusta tai jopa takaa, jotta vatsan voimakas muoto ei vääristä mittoja.

PAITA

- MD1** Ympärysmitta ennen vatsan muodon alkamista.
- MD2** Ympärysmitta noin mittojen MD1 ja MD 3 puolivälistä.
- MD3** Ympärysmitta noin vatsan puolivälistä, leveimmältä kohdalta.
- MD4** Ympärysmitta alhaalta. Mitta otetaan vaakasuorasti siltä kohtaa mihin paidan halutaan takana päättyvän.
- MD5** Paidan alareunan ympärys. Mitta saa kulkea vinossa ja vatsan alta. Takana mitta kulkee MD 4 linjalle
- MD6** Viivotinsuora pituusmitta MD 1 mitasta MD 5 mitan väliltä. Mitta päätetään kohtaan, johon paidan alareuna päättyy keskellä edessä.
- MD7** Viivotinsuora pituus MD 1 ja MD 2 väliltä.
- MD8** Viivotinsuora pituus MD 2 ja MD 3 väliltä.
- MD9** Viivotinsuora pituus MD 3 ja MD 4 väliltä.
- MD10** Viivotinsuora pituus MD 4 ja MD 5 väliltä. Mitta päätetään kohtaan, johon paidan alareuna päättyy keskellä edessä.
- MD11** Pituusmitta MD1 ja MD 2 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten
- MD12** Pituusmitta MD2 ja MD 3 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten
- MD13** Pituusmitta MD3 ja MD 4 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten
- MD14** Pituusmitta MD4 ja MD 5 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten

Suosittellemme mitoittamaan housun aina vatsakummun yläpuolelle, jotta housu pysyy mahdollisimman hyvin paikallaan.

Ohje ei sovellu mikäli housusta halutaan matalavyötäröiset siten, että vyötärölinja kulkee vatsan alta

Huomio: mikäli kudος on pehmeää ja muotoutuvaa mittaus tulisi tehdä massaa kannatellen. Massaa kannatellaan siten, että se on mitatessa paikalla, jonne se asettuisi tuotteen ollessa puettuna. Pyri ottamaan kaikki tuotteen mitat massa kannateltuna samaan asentoon, jotta asennon vaihtelu ei vaikuta mittoihin.

Vinkki! Viivotinsuorat pituusmitat voi olla helpoin mitata hieman sivusta tai jopa takaa, jotta vatsan voimakas muoto ei vääristä mittoja.

HOUSUT & BODY

MD1 Ympärysmitta ennen vatsan muodon alkamista.

MD2 Ympärysmitta noin mittojen MD1 ja MD 3 puolivälistä.

MD3 Ympärysmitta noin vatsan puolivälistä, leveimmältä kohdalta.

MD4 Ympärysmitta alhaalta.

MD6 Viivotinsuora pituusmitta MD 1 mitasta R/L53 linjalle

MD7 Viivotinsuora pituus MD 1 ja MD 2 väliltä.

MD8 Viivotinsuora pituus MD 2 ja MD 3 väliltä.

MD9 Viivotinsuora pituus MD 3 ja MD 4 väliltä.

MD10 Viivotinsuora pituus MD 4 ja MD 5 väliltä. Mitta päättyy R/L53a linjalle.

MD11 Pituusmitta MD1 ja MD 2 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten

MD12 Pituusmitta MD2 ja MD 3 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten

MD13 Pituusmitta MD3 ja MD 4 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten

MD14 Pituusmitta MD4 ja MD 5 väliltä, keskeltä edestä ihoa pitkin mitaten

MD15 Mitta edestä MD 1 linjalta jalkojen välistä taakse MD 1 linjalle

AB - OLKAIMET

Lisämitta olkaimille: Mitta halutusta housun yläreunasta etukappaleelta olan yli takakappaleelle.

ADF - VAIPPALÄPPÄ

Vaihtoehto A Vaippaläpän mittaus yhtä aikaa paidan kanssa. Mittaa vaippaläpän pituus paidan B12 linjalta jalkojen välistä taakse B12 linjalle. Ilmoita pituus lisätieto-kohdassa.

Vaihtoehto B Vaippaläppä mitataan eri kerralla paidan kanssa (esimerkiksi kun vaippaläppä lisätään korjauksena) Mittaa bodymitta B30 eli ympärysmitta A-pisteestä samaan A-pisteeseen, kiertäen jalkojen välistä.

AM - ÄITIYSVATSAMUOTOILU HOUSUIHIN

Mittaus tapahtuu muilta osin kuten perusmallin housuissa, mutta ota huomioon seuraavat kohdat:

Vyötärön ympäryys B20 mitta otetaan vaakasuorasti kohdasta, johon housun vyötärön takana halutaan asettuvan. Täydennä B22 mitan kohdalle paljonko housun vyötäröä halutaan edestä korotettavan. Tällä mitalla huomioidaan kasvavan vatsan tarvitsema lisäpituus eteen. B21 ympärystä ei tarvitse mitata.

Ilmoita lisätiedoissa millä raskausviikolla asiakas mittaushetkellä on.