



Otsikko: Scarban® Velvet Touch -silikonigeeli

FI

Tuotekuvaus: Scarban® Velvet Touch on silikonigeeli arpien (hypertrofisten ja keloidiarprien) hoitoon sekä epänormaalin arpi muodostuksen ehkäisyyn leikkauksen tai tapaturman jälkeen.

Koostumus: Dimetikoni, Dimetikoni Crosspolymeeri, Syklopentasiloksaani, Syklheksasiloksaani.

Ominaisuudet: Scarban® Velvet Touch -silikonigeeli tekee arvista litteämpiä, sileämpiä ja ohuempia sekä vähentää oireita (pitkittynyt punoitus, arven kiristäminen, kutina, nivelten liikerajoitus, epämukavuus ja kosmeettiset haitat). Scarban® Velvet Touch -silikonigeeli on läpinäkyvä geeli, joka ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta kuivuu nopeasti eikä tunnu tahmealta. Geeli muodostaa ihon pinnalle puolitksi okklusiivisen kerroksen, joka lisää ihon (epidermisen) kosteutusta. Lisääntynyt kosteus edistää vaurioituneen arpikudoksen nopeampaa paranemista ja vähentää oireita.

Käyttöaiheet / käyttöalueet: Scarban® Velvet Touch -silikonigeeli soveltuu:

- epänormaalien arpien (hypertrofiset ja keloidit) hoitoon ja ehkäisyyn
- palovamma-arprien hoitoon ja leikkauksien hoitoon
- arven aiheuttamien pitkittyneiden toiminnallisten oireiden hoitoon (pitkittynyt punoitus, arven kiristäminen, kutina, nivelten liikerajoitus, epämukavuus ja kosmeettiset haitat)

Käyttöohje: Parhaan tuloksen saavuttamiseksi Scarban® Velvet Touch -silikonigeelihoito suositellaan aloitettavaksi välittömästi haavan sulkeuduttua (ompeleiden poiston ja ruven häviämisen jälkeen). Pieni määrä silikonigeeliä riittää yhteen käyttökertaan. Optimaalisen hoidon saavuttamiseksi levitä pieni määrä geeliä arvelle kahdesti päivässä kevyin, tasaisin liikkein. Levitä Scarban® Velvet Touch -silikonigeeli uudelleen intensiivisen liikunnan (urheilu) sekä vesikontaktin (suihku, uiminen) jälkeen. Haluttaessa Scarban® Velvet Touch -silikonigeeliä voidaan käyttää yhdessä meikin kanssa geelin kuivumisen jälkeen.

Kuinka pitkään geeliä tulee käyttää? Arven normalisoituminen kestää vähintään 3–6 kuukautta. Käytä Scarban® Velvet Touch -silikonigeeliä niin kauan kuin arpi on koholla, punainen tai aiheuttaa oireita. Hoidon kestosta tulee keskustella hoitavan ammattilaisen/lääkärin kanssa.

Käyttöaika: Yksi Scarban® Velvet Touch -silikonigeelipullo sisältää 15 ml. Oikein käytettynä yksi pullo riittää useiden viikkojen hoitoon. Käyttöaika riippuu hoidettavan arven koosta. Pitkäaikaisessa hoidossa voi olla tarpeen käyttää useita pakkauksia.

Erytishuomiot ja varoimet:

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Vältä kosketusta silmiin ja limakalvoihin.
- Silikonigeeli on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.
- Käytä geeliä vain suljetulle iholle (ruven häviämisen jälkeen), ei koskaan avohaavoihin.
- Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut.

Haittavaikutukset: Harvinaisissa tapauksissa iho voi reagoida herkästi (ihoärsytys) silikonikäsittelyyn. Tällöin hoito tulee keskeyttää tilapäisesti. Tarvittaessa Scarban® Velvet Touch voidaan poistaa miedolla, ihoystävällisellä saippualla. Aloita hoito uudelleen, kun ärsytys on hävinnyt. Jos iho-ongelmat jatkuvat, ota yhteys hoitavaan ammattilaiseen/lääkäriin.

Säilytys: Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöohjeen viimeisin tarkistus: Huhtikuu 2020

Valmistettu Belgiassa

Titel: Scarban® Velvet Touch silikonigele

Bruksanvisning SV

Produktbeskrivning: Scarban® Velvet Touch är en silikonigele för behandling av ärr (hypertrofiska och keloida ärr) samt för att förebygga onormal ärrbildning efter operation eller olycka.

Sammansättning: Dimetikon, Dimetikon Crosspolymer, Cyklopentasiloxan, Cyklohexasiloxan.

Egenskaper: Scarban® Velvet Touch silikonigele gör ärr plattare, slätare och tunnare samt minskar besvär (ihållande rodnad, stramning i ärret, klåda, begränsad ledrörlighet, obehag och kosmetiska besvär). Scarban® Velvet Touch silikonigele är en transparent gel som, tack vare sin unika formulering, torkar snabbt och inte känns klabbig. Gelen bildar ett semiokklusivt lager på hudens yta, vilket ökar hudens (epidermis) återfuktning. Den ökade återfuktningen bidrar till att den skadade ärrvävnaden återhämtar sig snabbare och minskar besvären.

Indikationer / användningsområden: Scarban® Velvet Touch silikonigele är lämplig för:

- behandling och förebyggande av onormala ärr (hypertrofiska och keloida ärr)
- behandling av brännskadeärr och kirurgiska ärr
- behandling av ihållande funktionella besvär orsakade av ärr (ihållande rodnad, stramning i ärret, klåda, begränsad ledrörlighet, obehag och kosmetiska besvär)

Bruksanvisning: För optimalt resultat rekommenderas att behandling med Scarban® Velvet Touch silikonigele påbörjas omedelbart efter att såret har slutit sig (efter att suturer har avlägsnats och eventuella sårskorpor har försvunnit). En liten mängd silikonigele per applicering är tillräcklig. För optimal behandling applicera en liten mängd gel på ärret två gånger dagligen med mjuka, jämna rörelser. Applicera Scarban® Velvet Touch silikonigele på nytt efter intensiv aktivitet (sport) samt efter kontakt med vatten (duscha, simma). Vid behov kan Scarban® Velvet Touch silikonigele användas tillsammans med make-up efter att gelen har torkat.

Hur länge ska gelen användas? Det tar minst 3–6 månader för ett ärr att normaliseras. Använd Scarban® Velvet Touch silikonigele så länge ärret är upphöjt, rött eller orsakar besvär. Rådgör med behandlande vårdpersonal/läkare om behandlingens längd.

Användningstid: En flaska Scarban® Velvet Touch silikonigele innehåller 15 ml. Vid korrekt användning räcker en flaska för flera veckors behandling. Användningstiden beror på storleken på det ärr som ska behandlas. Vid långvarig behandling kan flera förpackningar behövas.

Särskilda anvisningar och försiktighetsåtgärder:

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
- Silikon gelen är endast avsedd för utvärtes bruk.
- Använd endast på slutna hud (efter att sårskorpan har försvunnit), aldrig på öppna sår.
- Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Biverkningar: I sällsynta fall kan huden reagera känsligt (hudirritation) på silikonbehandling. Om detta inträffar ska behandlingen avbrytas tillfälligt. Vid behov kan Scarban® Velvet Touch avlägsnas med en mild, hudvänlig tvål. Återuppta behandlingen när irritationen har försvunnit. Om hudproblemen kvarstår, kontakta behandlande vårdpersonal/läkare.

Förvaring: Utgångsdatum anges på förpackningen.

Senaste revidering av bruksanvisningen: April 2020

Tillverkad i Belgien